

Big och Little Mack

*Enkla och robusta samtalsapparater
för tidig kommunikation*

Användningstips och metoder



REHABCENTER AB

Användbara hjälpmedel för många olika ändamål, beroende på brukarens förmåga och behov. Gör det möjligt att träna orsak/verkan, delta i lekar och aktiviteter, söka kontakt med andra personer, utveckla språk och grundläggande kommunikation

- Klart och tydligt ljud
- Lätta att anpassa med olika monteringsarmar och bärremmar.
- Kan ställas in för att även starta andra apparater vid aktivering av tal.
- Användbara för många olika ändamål beroende på brukarens förmåga.
- Levereras med fyra lock: rött, grönt, gult och blått
- Steglös volymkontroll med AV/PÅ-funktion

Spelar in valfritt meddelande/ljud direkt in i samtalsapparaten. Aktivera tryckplattan så spelar Big/Little Mack upp ljudet, som kan vara upp till två minuter långt. Big Mack går på ett 9-volts batteri vilket gör att den inte behöver laddas och kan användas i flera veckor på ett enda batteri.

BIG Mack:

- Meddelanden/Nivåer: 1/1
- Inspelningstid: 2-min.
- Ingång för ytterligare manöverkontakt: 1
- Utgång för leksak: 1
- Tryckyta: 12 cm
- Tryckkraft: 85-142 g
- Vikt inkl batteri: 439 g
- Batterityp: 9-volt
- Tillbehör: Bärrem, monteringsplatta, utbytbara lock i olika färger
- Monteringsalternativ: *Universal monteringsats*

Art nr: 8031-10



Med 12 cm tryckyta i stark färg lämpar sig Big Mack väl för personer med synnedsättningar och/eller motorik som kräver en stor och robust träffyta.

LITTLE Mack:

- Meddelanden/Nivåer: 1/1
- Inspelningstid: 2-min.
- Ingång för ytterligare manöverkontakt: 1
- Utgång för leksak: 1
- Tryckyta: 6 cm
- Tryckkraft: 57-85 g
- Vikt inkl batteri: 241 g
- Batterityp: 9-volt
- Tillbehör: Bärrem, monteringsplatta, utbytbara lock i olika färger
- Monteringsalternativ: *Universal monteringsatts*
- Art nr: 8030-10



Med 6 cm tryckyta och en vinklad bas rekommenderas Little Mack till personer som kan hantera en mindre tryckyta.

Användningsområden för Big/LITTLE Mack

Big Mack kan både användas för uttåtriktad kommunikation såsom att uttrycka önskemål, vilja, delta i högläsning, meddela ett val vid olika alternativ men även för att inhämta information om exempelvis vad som finns i ett rum, vem som tjänstgör, vad det blir till lunch, hur dags taxin kommer osv. Här nedan listas ett antal exempel på hur Big Mack har använts i olika sammanhang.

- BIG mack kan användas i lekar som Kurragömma och Ta-mig-om-du-kan.
- Små barn kan använda Big Mack för att ta fysisk kontakt (förutsatt att de tycker om fysisk kontakt) , exempelvis “Kittla mig!”, “Klia mig på ryggen!”, “Borsta mitt hår”; osv.
- Sätt upp en Big Mack vid dörren så att det är möjligt att tala om att man lämnar rummet, “Ska bara på toa”, “Är snart tillbaka” eller liknande.
- Sätt upp en Big Mack vid dörren så att någon personal eller anhörig kan tala om att de snart är tillbaka, ute och handlar osv. Informationen kan då upprepas varje gång man trycker på Big Mack.
- Använd Big Mack vid måltider för att säga “Jag är mätt nu” eller “Jag vill ha mer!
- Använd en bok som ni själva har gjort med barnets namn i. Spela in namnet och varje gång det nämns i berättelsen kan barnet själv trycka på Big Mack i stället för läraren.
- Om ni har en grupp med flera användare som har varsin Big Mack kan var och en få ett ord var i en fras och hjälpas åt att säga “God jul” eller “Grattis på födelsedagen”
- Använd en Big Mack på insidan av dörren och en på utsidan, den ena säger “Hej, hur är läget?” och den andra “Hej då!”
- Använd Big Mack (eller ännu bättre Step-by-Step) för att beställa på restaurang.

- Be om en kram.
- Säg "Jag tycker om dig"
- Ropa till alla i familjen att maten är klar.
- Använd Big Mack så att anhöriga/vänner kan lämna meddelanden om personen själv inte är på sitt rum.
- Sätt på en kontaktpassad radio eller lampa.
- Ge en komplimang till en kompis.
- Sjung "Ja må hon leva"
- Sjung en sångvers och använd BigMack till refrängen. Befrämjar både social samverkan , turtagning och, inte minst, gemenskap.
- Använd Big Mack på toaletten för att ropa "Färdig"
- Använd Big Mack för återkommande fraser när ni läser saga, Exempelvis Snipp, snapp snut...." eller "Det var en gång..." eller "Vem är det som bankar på min dörr?"
- Använd Big Mack för att barnet ska kunna ropa "Mamma/Pappa kom!". Barn lär sig ofta att kommunicera snabbt om de varje gång får positiv respons på en sådan uppmaning.
- Använd Big Mack för att skicka någon med ett meddelande, "Det är dags för min medicin" eller "Janne behöver hålsaget"
- Sätt Big Mack utanför en dörr för personer med synnedsättning så att de vet vad som finns inuti rummet.
- Spela in dagens datum eller veckodag eller dagens väder så att alla kan svara på frågor under samlingen.

- Meddela adressen i taxin.
- Heja på favoritlaget.
- Social interaktion, "Hej!", "Hur mår du idag!", "Trevligt att träffas"
- Be någon upprepa vad som sagts.
- Träna orsak-verkan genom att exempelvis ansluta en lampa via PowerLink och tala in "Lampan lyser"
- Utför sysslor, såsom att vispa en sockerkaka eller sätta på kaffebyggaren med Big/Little Mack och PowerLink.

Ni kan säkert komma på mycket mer....Lycka till!

Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

RehabCenter AB

www.rehabcenter.se

info@rehabcenter.se

Tel nr: 08 768 25 00