


**Instruktioner och förslag till  
användning av**

**iTalk2™**

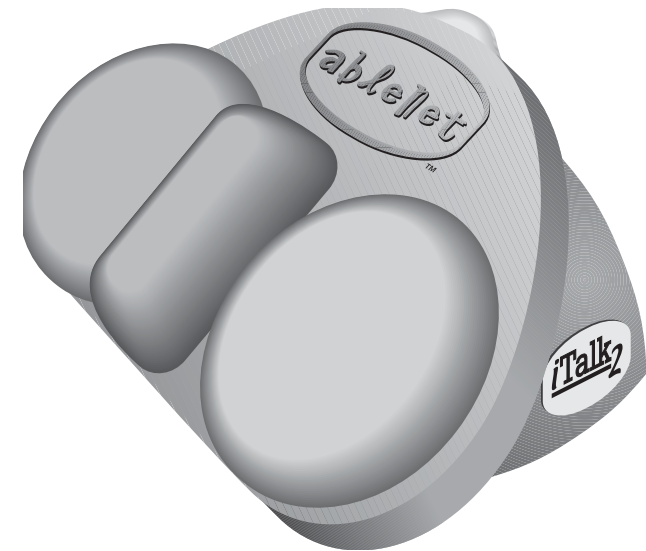

**Kontakta gärna RehabCenter AB  
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00**

**Fax. 08 - 792 49 49**

**e-mail: [info@rehabcenter.se](mailto:info@rehabcenter.se)**



# Innehållsförteckning

Innehåll	Sidan
Egenskaper	2
Att komma igång	3
Installera batteri	
Spela in meddelanden	
Spela upp meddelanden	
Snaplock	4
Monteringsmöjligheter	5
Om den inte fungerar	7
Garanti	8
Reparation / retur	8
Teknisk information	8
Skötsel och lagring	9

## Om din iTalk2™ inte fungerar.

Gå först igenom följande punkter.  
Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB.  
Tel 08 - 768 25 00.

Problem	Lösning
Apparaten återger ej inspelat meddelande	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.</li><li>2. Spela in meddelandet på nytt.</li><li>3. Sätt volymkontrollen i mittläget.</li><li>4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Koppla ur den och prova apparaten igen.</li><li>5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”</li></ol>
Apparaten talar men säger fel meddelande.	Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 sek, sätt i batteriet och spela in på nytt.
Bara en del av meddelandet spelades in.	Meddelandet var längre än 75 sekunder. Spela in ett kortare meddelandet. Om inspelningsknappen (record) släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.
Dålig ljudkvalitet.	Byt batteri.
Talar långsammare.	Byt batteri
Meddelandet upprepas utan nya tryck på talknappen.	Byt batteri

Obs! För att undvika batteriproblem skall alltid Alkaliska (Alkaline) batterier användas.

## Skötsel och lagring

iTalk2™ kommer att fungera under lång tid med ett minimum av service.

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals meddelanden, lite beroende på meddelandelängden.

Det är viktigt att Alkaliska batterier används. Enklare batterier kan medföra sämre ljud och kortare drifttid.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

Om en iTalk2™ inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

iTalk2™ får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

### Observera!


**iTalk2™ får ej dränkas i vatten!**

## Egenskaper

iTalk2™ är en samtalsapparat för två meddelanden.

iTalk2™ har följande egenskaper och möjligheter.

- 8,5 sekund inspelningstid för varje meddelande. ( 17 sek. totalt)
- Fack för förvaring av symboler. Enkel förvaring av symboler mellan olika användningstillfällen.
- Kontakter för anslutning av leksaker eller andra apparater. Används för förstärkt effekt vid träning av orsak / verkan.
- Två kablar för inkoppling av leksaker eller andra apparater ingår
- Två Snaplock ingår.
- Volymkontroll med till/från funktion.
- Monteringsplatta (säljs separat) erbjuder många alternativa monteringsmöjligheter.

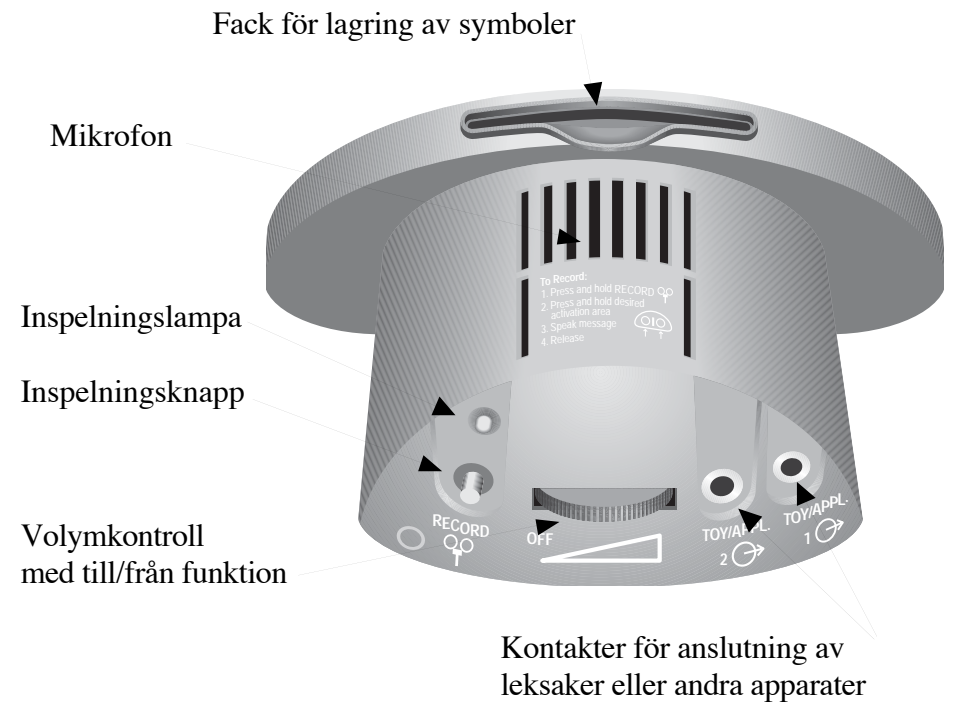


## Att komma igång

### Steg 1 - Installera batteri

Obs! Används monteringsplattan måste den först avlägsnas.

- Ta bort batteriluckan.
- Sätt i ett 9 volt **Alkaline** batteri. ( Ingår ej)
- Sätt tillbaka batteriluckan

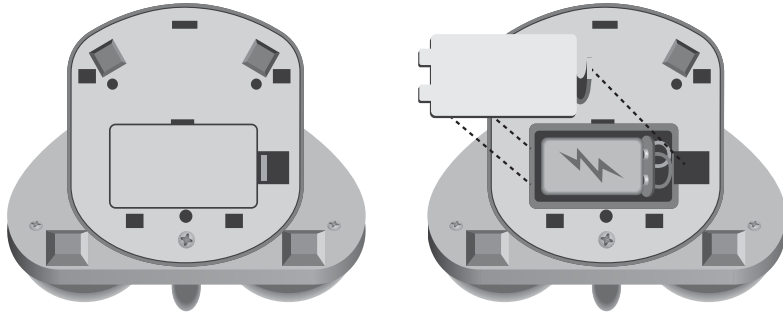

### Steg 2 - Spela in meddelanden

1. Sätt på apparaten.
2. Tryck ner och håll kvar inspelningsknappen (Rec).
3. Håll ner en av talknapparna och spela in första meddelandet (Inspelningslampan skall lysa rött). Tala mot mikrofonen.
4. Släpp talknappen och inspelningsknappen.
5. Repetera steg 2 - 4 med den andra talknappen.

### Steg 3 - Spela upp meddelanden

Tryck på talknappen och ställ in lagom hög volym.

Uppspelningen kan avbrytas med ett tryck på inspelningsknappen.

Det är viktigt att ofta spela in nya meddelanden. Det ger brukaren större möjligheter att använda sin talapparat. Det är även viktigt att meddelandet spelas in av någon person med lämplig röst. T.ex. barnröst för barn.

## Garanti

iTalk2™ har ett års garanti mot fabriktionsfel.

### Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.


### Teknisk information.

- Två 3,5 mm kontakter för anslutning av batteridrivna leksaker.
- Ett 9v batteri.OBS! Använd alltid Alkaliskt batteri (Alkaline).

### Att fästa monteringsplattan på en liten triangulär platta

När iTalk2™ används tillsammans med en monteringsarm från AbleNet skall de skruvar och vingmuttrar som levererades med triangelplattan användas. iTalk2™ kommer då att lätt kunna monteras och demonteras från monteringsarmen.

Liten triangulär platta

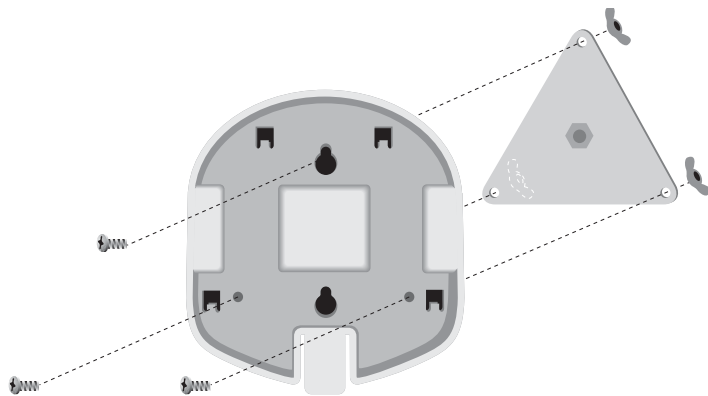

### Att kombinera uppspelning av meddelande med aktivering av en batteridrivna leksaker eller apparat

Med denna funktion kan iTalk2™ aktivera en batteridrivna leksak lika lång tid som ett inspelat ljud varar. Förutom en leksak behövs en kabel för batteridrivna leksaker (säljs separat).

1. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i det uttag märkt toy/appliance på din iTalk2™ som motsvarar aktuell talknapp.
2. Koppla ihop kabelns andra ände med kabeln för batteridrivna leksaker och inkopplad leksak. Sätt på leksaken.
3. Tryck på talknappen för att spela upp meddelandet och aktivera leksaken.

### Snaplock

I leveransen av iTalk2™ ingår ett Snaplock. Använd detta lock för att placera symboler eller bilder på talknappen. Locket kan även användas som skydd om andra saker skall fästas (limmas eller tejpas) på tryckknappen.

### Andra monteringsmöjligheter (säljs separat)

- Ultrastick eller Dual Lock för montage på hårda, plana ytor.
- Bärrem för att bära apparaten över axeln eller runt midjan.
- Monteringsarm:
  - Universalarm med vred
  - Universalarm med spak
  - Slimarm
  - Sensitrac Flat Pad
  - Sensitrac med justerbar arm



Obs! Glöm ej att uppge om det krävs en stor eller liten monteringsplatta vid beställning av monteringsarm.

## Monteringsmöjligheter

### Monteringsplatta


Som tillbehör till iTalk2™ finns en löstagbar monteringsplatta.

#### Lossa monteringsplattan från iTalk2™

1. Tryck in låsknappen för snabbfästet.
2. Drag plattan mot apparatens baksida.

#### Fästa monteringsplattan på iTalk2™


1. Passa in de fyra klackarna på monteringsplattan i motsvarande hål i botten på iTalk2™.
2. För plattan framåt till den snäpper fast.

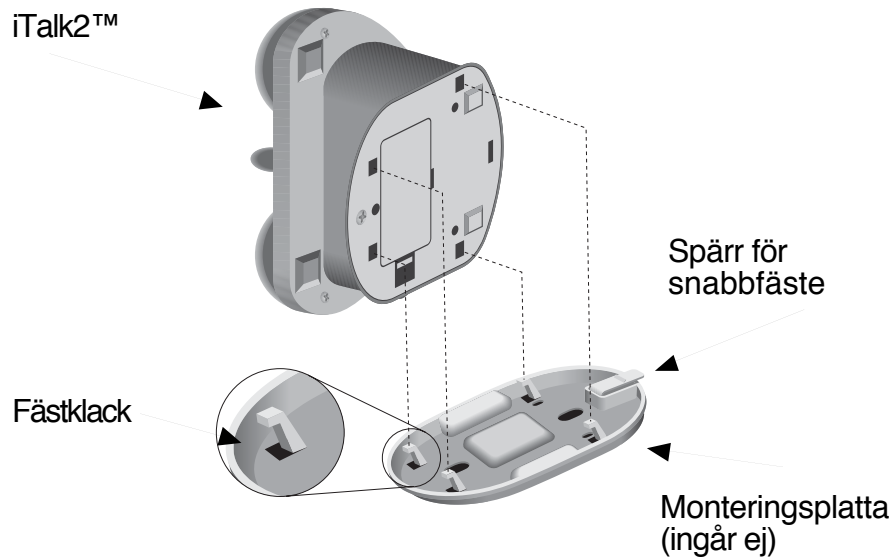

### Löstagbar montering på vägg (bild 1)

1. Placera monteringsplattan på väggen och markera plats för de nyckelhålsformade skruvhålen.
2. Borra hål vid markeringarna och sätt i skruvarna.
3. Skruva in skruvarna i väggen men låt ca 5 mm sticka ut.

**Bild 1: Löstagbar montering**

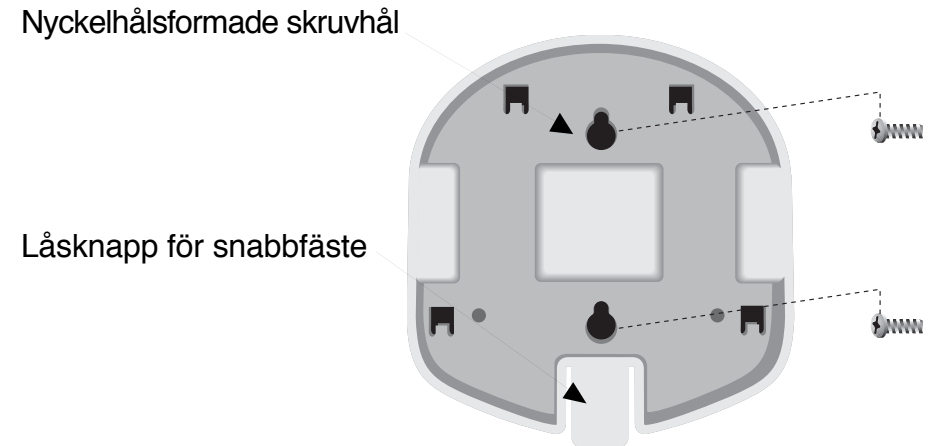

### Permanent montering på vägg (bild 2)

För permanent bruk kan plattan skruvas fast med de två runda hålen samt det övre nyckelhålet.

**Bild 2: Permanent montering**

