

## **Kundservice, reparationer och returer.**

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan kontakten returneras för service. Om kontakten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer kontakten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

Kasserade JellyBean Twist och Specs kan återvinnas som elektronikavfall eller hanteras enligt lokala föreskrifter.

## **Garanti**

Jelly Bean och Specs Switch har två års garanti mot fabrikationsfel. Efter reparation är garantin 90 dagar.

**Kontakta gärna RehabCenter AB  
för ytterligare information**

**[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
[info@rehabcenter.se](mailto:info@rehabcenter.se)**

**Tel. 08 - 768 25 00  
Fax. 08 - 792 49 49**

---

## **Användarvägledning**

**Jelly Bean<sup>®</sup>**  
**och**  
**Specs<sup>™</sup> Switch**

---

## Introduktion

Jelly Bean® och Specs™ switch kan användas för att styra:

- 220v elektriska apparater som kopplas via en godkänd styrbox.
- Batteridrivna leksaker eller apparater som ansluts via en batterikabel.
- Talapparater med 3,5mm kontakt för anslutning av extra manöverkontakt.
- Datorer via ett switch interface.
- Diaprojektorer som kan förses med adapter för fjärrstyrning.

Det finns många olika sätt att montera och fästa kontaktorna i rätt position. På en slät yta kan kontaktorna fästas med tre skruvar, med ett självhäftande mtrl som HandiTak®, Dual Lock™ eller UltraStick™. Man kan även använda en av monteringsarmarna SlimArmstrong® eller Universalarmen.

Styrboxar, batterikabel, switchinterface för datorer och samt alla olika alternativen på fästnanordningar kan beställas från RehabCenter AB.

## Individuella egenskaper hos de olika switcharna

### Specs: Alternativa bottenplattor.

Tre olika bottenplattor medföljer Specs™ switch. Dessa möjliggör många olika monteringsalternativ. För att byta botten skall de tre skruvarna på undersidan lossas. På bottenplattorna finns styrtappar som skall passas in i motsvarande hål i switchen. Se till att kabel ligger i sitt spår. Fäst därefter den nya plattan med de tre skruvarna. Använd aldrig en switch utan bottenplatta som skyddar kabel och mekanism.

### Bottenplatta med fläns.

Bottenplattan med fläns har större diameter än switchen för att underlätta montering. Plattan med fläns kan fästas som beskrivits ovan.

### Bottenplatta för ett band.

Bottenplattan för ett band används för att underlätta montering av switchen på t.ex ett arm eller nackstöd på en rullstol. Ett fjädrande velcro™ band ingår. Extra band kan köpas som tillbehör. Vid montering av bandet skall det vändas så att den mjuka sidan kommer mot användarens hud. Om bandet klipps av kan änden smältas med en tändsticka för att förhindra att bandet repas upp. **OBS!** Var försiktig så bandet ej börjar brinna. Låt bandet svalna ordentligt innan det kommer i kontakt med användaren.

### Liten bottenplatta utan fläns.

Den lilla plattan har samma diameter som switchen. Den kan användas t.ex om två switchar skall monteras med minsta möjliga avstånd. Den kan ofta monteras med självhäftande mtrl. mot ett slätt underlag.

### JellyBean Twist®.

JellyBean Twist levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs.

## Säkerhetstips

- Läs instruktioner för apparater som kopplas till en switch före användning.
- Var uppmärksam om en apparat som rör sig eller avger värme placeras nära en switchanvändare.
- Använd aldrig en Jelly Bean® eller Specs™ switch, en styrbox eller leksak eller annan el.apparat i eller intill vatten där de kan bli blöta.

## Skötsel och förvaring

För att rengöra Jelly Bean® eller Specs™ switch skall en torr trasa eller ett mildt rengöringsmedel användas. **Spola aldrig en switch med vatten. Tag aldrig bort den färgade toppen på Specs switchen.** Koppla alltid bort switchen från alla utrustningar före rengöring.

## Felsökning

Om ansluten utrustning eller apparat slutar fungera kan följande kontrolleras.

- Kontrollera alla elektriska kopplingar, kablar och kontakter.
- Kontrollera placeringen av ev. batterikabel i batterifacket på en leksak
- Kontrollera att alla till/från knappar är i läge till.
- Prova ansluten apparat utan inkopplad switch för att kontrollera funktionen.
- Prova batterikabel eller styrbox genom att ansluta en annan switch.