

Step-by-Step med nivåer levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock placeras. Detta förhindrar att det färgade locket skruvas loss oavsiktligt.

Kasserade BIG och LITTLE Step-by-Step kan återvinnas som elektronikavfall eller hanteras enligt lokala föreskrifter.

**Kontakta gärna RehabCenter AB  
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00**

**Fax. 08 - 792 49 49**

**e-mail: [info@rehabcenter.se](mailto:info@rehabcenter.se)**

## **Instruktioner och förslag till användning av**

### **Step-by-Step communicator med nivåer**



Step-by-Step communicator med nivåer



# Innehållsförteckning

## Anteckningar

Innehåll	Sidan
Förslag till användning	2
Ritningar	3
Att komma igång	4 - 6
Installera batteri	
Spela in meddelanden	
Spela upp meddelanden	
Byta nivå	
Snaplock	
Fler möjligheter	6 - 11
Spela upp meddelande med en extern kontakt	
Styra leksaker och apparater	
Batteridrivna saker	
Apparater som drivs med 220v	
Step-by-Step med nivåer monteringsplatta	12
Andra monteringsmöjligheter	13 - 14
Om den inte fungerar	15
Garanti	16
Reparation / retur	16
Skötsel och lagring	17

## Skötsel och lagring

Step-by-Step med nivåer kommer att fungera under lång tid med ett minimum av service.

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals meddelanden, lite beroende på meddelandelängden.

Det är viktigt att Alkaliska batterier används. Enklare batterier kan medföra sämre ljud och kortare drifttid.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

Om en Step-by-Step med nivåer inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

Step-by-Step med nivåer får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

**Observera!**  
**Step-by-Step med nivåer får ej dränkas i vatten!**

## Förslag till användning av Step-by-Step med nivåer

Kraften hos samtal och ämnen.

Förmågan att kommunicera är viktig för alla individer. Genom att samtala med andra, kommentera dagens olika händelser och aktiviteter samt genom att dela information kan elever förstå att ord är viktiga och har en mening.

Step-by-Step med nivåer är ett bra hjälpmedel för att ge elever tillgång till förinspelade meddelanden på olika nivåer. Använd Step-by-Step med nivåer, BIG Step-by-Step eller LITTLE Step-by-Step för att ge brukaren möjlighet att uppleva ”riktig” konversation och samtidigt aktivt träna förmågan att kommunicera i många dagliga aktiviteter.

---

Nivå 1. Morgonsamtal. Berätta om vädret.

- ”Det är blåsigt och mulet ute idag.”
- ”Löven blåser från träden.”
- ”Himlen är helt grå.”
- ”Tror du att det kommer att regna idag?”

Nivå 2. Läsning. Led en diskussion om en uppläst berättelse.


- ”Vad handlade berättelsen om?”
- ”Vem var din favoritperson.”
- ”Hur kände du dig när (något i berättelsen) hände?”
- ”Vilken del av berättelsen tyckte du bäst om?”

Nivå 3. Matematik. Led klassen i träning av huvudräkning.

- ”Nu skall vi träna 5:ans tabell.”
- ”Är ni beredda?”
- ”Ok. Då börjar vi.”
- ”1x5 är 5, 2x5 är 10, 3x5 är 15.....”

Det är viktigt att ofta spela in nya meddelanden. Det ger brukaren större möjligheter att använda sin talapparat. Det är även viktigt att meddelandet spelas in av någon person med lämplig röst. T.ex. barnröst för barn.

## Step-by-Step med nivåer

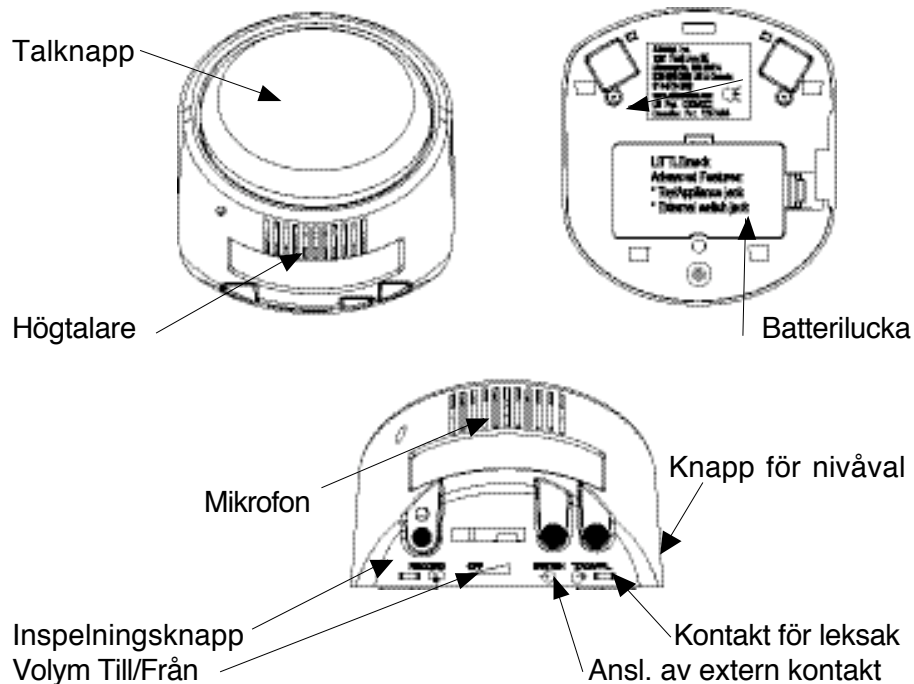

## Garanti

Step-by-Step med nivåer har ett års garanti mot fabriktionsfel.

### Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

## Om din Step-by-Step med nivåer inte fungerar.

Gå först igenom följande punkter.  
Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB.  
Tel 08 - 768 25 00.

Problem	Lösning
Apparaten återger ej inspelat meddelande	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.</li><li>2. Spela in meddelandet på nytt.</li><li>3. Sätt volymkontrollen i mittläget.</li><li>4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Koppla ur den och prova apparaten igen.</li><li>5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”</li></ol>

---

Apparaten talar men säger fel meddelande.	Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 sek, sätt i batteriet och spela in på nytt.
---	--

---

Bara en del av meddelandet spelades in.	Meddelandet var längre än 75 sekunder. Spela in ett kortare meddelandet. Om inspelningsknappen (record) släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.
---	---

---

Dålig ljudkvalitet.	Byt batteri.
---------------------	--------------

Talar långsammare.	Byt batteri
--------------------	-------------

Meddelandet upprepas utan nya tryck på talknappen.	Byt batteri
--	-------------

Obs! För att undvika batteriproblem skall alltid Alkaliska (Alkaline) batterier användas.

## Att komma igång med Step-by-Step med nivåer



Step-by-Step med nivåer

### Steg 1 - Installera batteri

- Tag bort monteringsplattan för att komma åt batteriluckan.
- Ta bort batteriluckan.
- Sätt i ett 9 volt **Alkaline** batteri.
- Sätt tillbaka batteriluckan.



### Steg 2 - Spela in meddelanden

**Nivåer kan spelas in eller ändras oberoende av varandra.**

1. Sätt på apparaten.
2. Ställ in nivåknappen på nivå ett.



3. Tryck ner och håll kvar inspelningsknappen till den röda lampan tänds. Släpp knappen. Step-by-Step med nivåer är nu i inspelningsläge.

4. Håll ner den stora talknappen och spela in första meddelandet. Tala mot mikrofonen. Röda lampan blinkar under inspelning.

Exempel på meddelande ett, nivå ett:

”Vet du vad Sveriges näst största sjö heter”

5. Släpp talknappen.

6. Håll ner den stora talknappen igen och spela in nästa meddelande.

Exempel på meddelande två, nivå ett:

” Den heter Vättern”

7. Släpp talknappen.

8. Repetera steg 4 - 5 till alla meddelanden på nivå ett är inspelade.

9. Skjut nivåknappen till nivå två.

10. Repetera steg 4 - 5 till alla meddelanden på nivå två är inspelade.

Exempel på meddelanden på nivå två:

- ”Nu skall vi träna matte”
- ”Är du beredd?”
- ”Hur mycket är 2x5?”

11. Skjut nivåknappen till nivå tre.

12. Repetera steg 4 - 5 till alla meddelanden på nivå tre är inspelade.

Exempel på meddelanden på nivå tre:

- ”Det här var en bra bok”
- ”Kan du vara snäll och vända sida”
- ”Vad föreställer den bilden”

13. Tryck en gång på inspelningsknappen. Lampan skall nu slockna.

**Step-by-Step med nivåer har totalt 75 sek. taltid. Därför kan många meddelanden läsas in innan minnet är fyllt. Lampan kommer att blinka gult när 10 sek. taltid återstår.**

### Steg 3 - Spela upp meddelanden


Välj önskad nivå med skjutknappen, tryck på talknappen och ställ in lagom hög volym. Alla meddelanden kommer att spelas upp ett för varjre tryck på talknappen i samma ordning som de spelats in.

### Byta nivå

Skjut knappen för nivåval till önskat läge.

### Att fästa monteringsplattan på en liten triangulär platta

När Step-by-Step med nivåer används tillsammans med en monteringsarm från AbleNet skall de skruvar och vingmuttrar som levererades med triangelpattan användas. Step-by-Step med nivåer kommer då enkelt kunna monteras och demonteras från monteringsarmen.

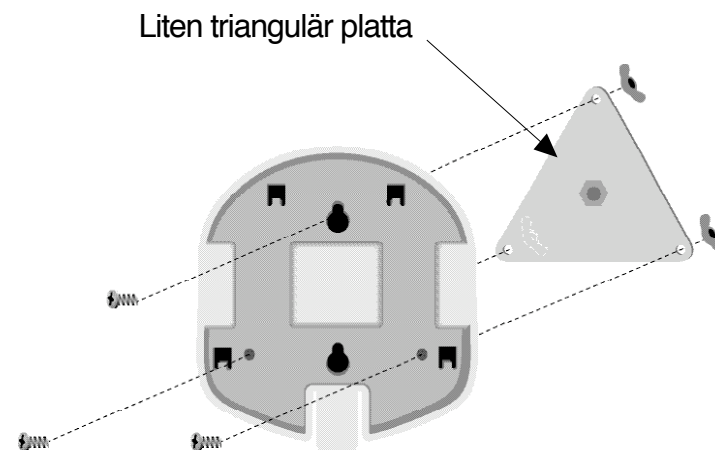

### Andra monteringsmöjligheter (säljs separat)

- Ultrastick eller Dual Lock för montage på hårda, plana ytor.
- Bärrem för att bära apparaten över axeln eller runt midjan.
- Monteringsarm:
  - Universalarm med vred
  - Universalarm med spak
  - Slimarm
  - Sensitrac Flat Pad
  - Sensitrac med justerbar arm




Obs! Glöm ej att uppge om det krävs en stor eller liten monteringsplatta vid beställning av monteringsarm.

## Andra monteringsmöjligheter

### Löstagbar montering på vägg (bild 1)

1. Placera monteringsplattan på väggen och markera plats för de nyckelhålsformade skruvhålen.
2. Borra hål vid markeringarna och sätt i skruvarna.
3. Skruva in skruvarna i väggen men låt ca 5 mm sticka ut.


Bild 1: Löstagbar montering

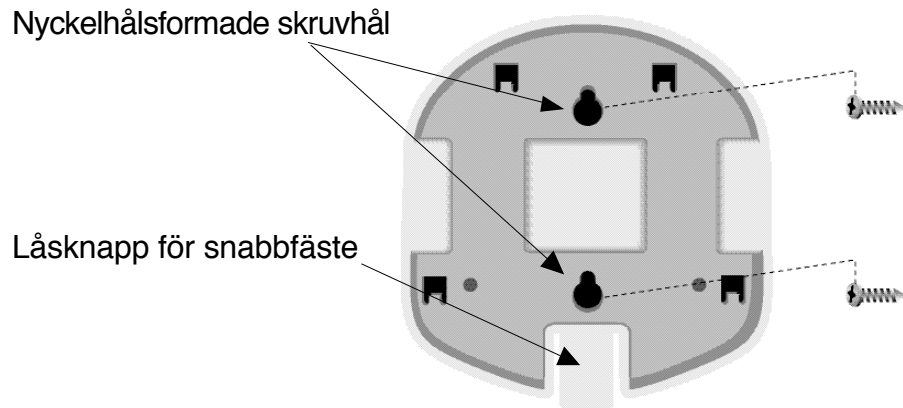

### Permanent montering på vägg (bild 2)

För permanent bruk kan plattan skruvas fast med de två runda hålen samt det övre nyckelhålet.

Bild 2: Permanent montering

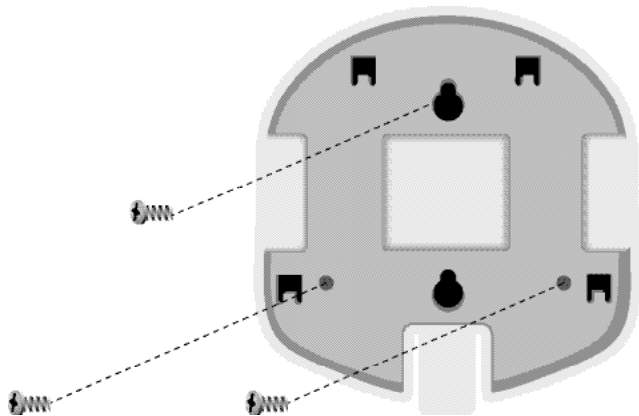


## Snaplock

I leveransen av Step-by-Step med nivåer ingår ett Snaplock. Använd detta lock för att placera symboler eller bilder på talknappen. Locket kan även användas som skydd om andra saker skall fästas (limmas eller tejpas) på tryckknappen.

## Fler möjligheter

### Spela upp ett meddelande med en extern kontakt

1. Koppla in en valfri kontakt med en 3,5 mm propp i uttaget för en extern kontakt på din Step-by-Step. 
2. Spela in ett meddelande.
3. Tryck på den externa kontakten för att spela upp meddelandet.



## Repetera ett meddelande

Denna funktion gör det möjligt att repetera ett meddelande i en sekvens.

1. Tryck på talknappen så att ett meddelande spelas upp.
2. Gör ett kort tryck på inspelningsknappen när meddelandet tystnat.
3. Meddelandet kommer nu att repeteras varje gång talknappen trycks ner.
4. Gör ett kort tryck på inspelningsknappen för att fortsätta med nästa meddelande.

Obs! Tryck ej för länge på inspelningsknappen. Step-by-Step hamnar då i inspelningsläge och alla inspelade meddelanden kommer att raderas.

## Att styra leksaker och andra apparater

### Batteridrivna leksaker och apparater

Med denna funktion kan Step-by-Step med nivåer aktivera en batteridrivna leksak lika lång tid som ett inspelat ljud varar. Förutom en leksak behövs en fil och en kabel för batteridrivna leksaker (säljs separat). Gå vidare till punkt tre om din apparat redan är anpassad.



Batteridrivna leksak




Fil



Kabel för batteridrivna leksak

1. Öppna batteriluckan på leksaken och gör ett spår i den med filen. Detta för att kabeln för batteridrivna saker skall kunna placeras rätt.

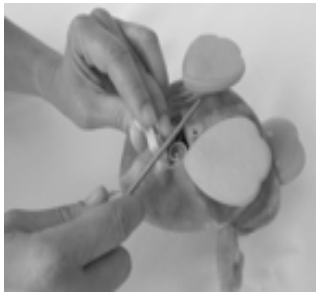

2. Placera batterikabelns kopparplatta mellan antingen den positiva eller negativa polen på batteriet och dess kontakt. Stäng sedan batteriluckan



## Step-by-Step med nivåer - monteringsplatta

Step-by-Step med nivåer levereras med en löstagbar monteringsplatta.




### Lösa monteringsplattan från Step-by-Step med nivåer

1. Tryck in låsknappen för snabbfästet.
2. Drag plattan mot apparatens baksida.

### Fästa monteringsplattan på Step-by-Step med nivåer

1. Passa in de fyra klackarna på monteringsplattan i motsvarande hål i botten på Step-by-Step med nivåer.
2. För plattan framåt till den snäpper fast.

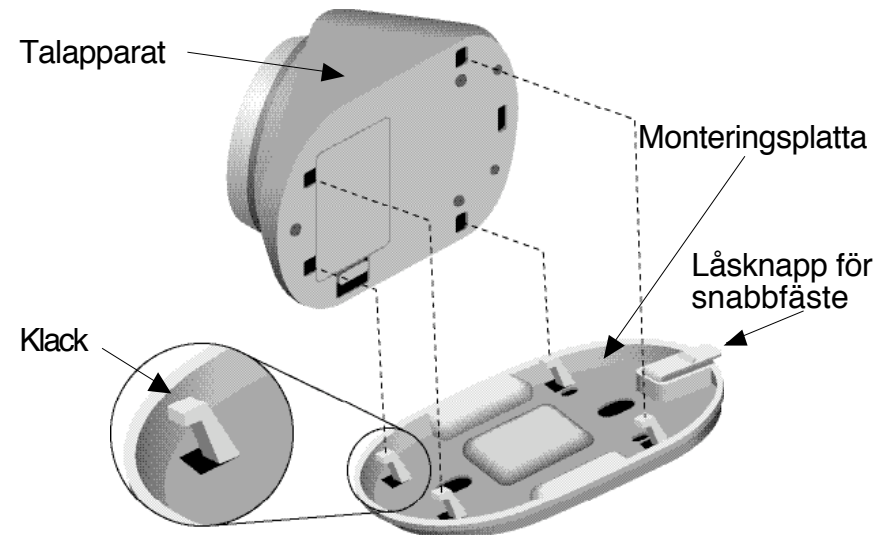



2. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget märkt toy/appliance på Step-by-Step med nivåer.



3. Koppla in kabelns andra ände i kontakt märkt Switch 1 eller 2 på PowerLink®3.



4. Koppla in PowerLink®3 i vägguttaget.  
5. Koppla in apparaten i motsvarande uttag på PowerLink®3. Kontrollera att apparaten är påslagen.  
6. Ställ in önskad tid och timerfunktion på PowerLink®3.  
7. Tryck på den stora talknappen för att spela upp meddelandet och aktivera den anslutna apparaten/leksaker.



3. Spela in en sekvens med meddelanden i din Step-by-Step med nivåer.

- Bestäm en sekvens som skall spelas in och vilket eller vilka meddelanden som skall aktivera leksaken/apparaten.
- Ställ knappen för nivåval i läge ett.
- Spela in sekvensen med meddelanden.

*VIKTIGT: Nivå ett måste alltid spelas in först, sedan nivå 2 och 3. Alla nivåer måste spelas in på en gång, i en sekvens.*

Exempel på meddelande:

*VIKTIGT: Vid inspelning av de meddelanden som skall aktivera en leksak skall inspelningsknappen tryckas in och släppas en gång samtidigt som meddelandet spelas in.*

Aktivitet på nivå ett: Leka med en leksak.

- ”Hej.”
- ”Kom och titta, jag har något att visa.”
- ”Jag kan få pingvinen att dansa.”
- ”Titta nu!” - Tryck en gång på inspelningsknappen samtidigt som meddelandet spelas in för att leksaken skall aktiveras vid uppspelning av detta meddelande.
- ”Såg du eller skall jag visa igen?”

Aktivitet på nivå två: Starta en batteridriven fläkt.

Ställ knappen för nivåval i läge två.

- ”Det är verkligen varmt här.”
- ”Kom så kan jag svalka oss.”
- ”Visst är det skönt när fläkten blåser”  
- Tryck en gång på inspelningsknappen samtidigt som meddelandet spelas in för att leksaken skall aktiveras vid uppspelning av detta meddelande.

Aktivitet på nivå tre: Klippa papper tillsammans med en kamrat.

Ställ knappen för nivåval i läge tre.

- ”Har du lust att klippa med mig?”
- ”Bra, håll i papperet så startar jag saxen.”
- ”Nu klipper vi”

- Tryck en gång på inspelningsknappen samtidigt som meddelandet spelas in för att leksaken skall aktiveras vid uppspelning av detta meddelande.

4. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget märkt toy/appliance på din Step-by-Step.



5. Koppla ihop kabelns andra ände med kabeln för batteridrivna leksaker och inkopplad leksak. Sätt på leksaken.



6. Tryck på talknappen för att spela upp meddelandet och aktivera leksaken.



Om du vill att leksaken skall vara aktiverad en längre tid kan en timer användas



Switch Latch and Timer (Timer)



Alla delar hopkopplade

### Leksaker och apparater som drivs med 220v

Med denna metod är det möjligt att låta en Step-by-Step på ett säkert sätt styra apparater som skall anslutas till 220v.

En styrbox PowerLink®3 och en 220v apparat behövs för att göra detta.

1. Spela in en sekvens med meddelanden i din Step-by-Step med nivåer.
  - Bestäm en sekvens som skall spelas in och vilket eller vilka meddelanden som skall aktivera leksaken/apparaten.
  - Ställ knappen för nivåval i läge ett.
  - Spela in sekvensen med meddelanden.

*VIKTIGT: Vid inspelning av de meddelanden som skall aktivera en apparat skall inspelningsknappen tryckas in och släppas en gång samtidigt som meddelandet spelas in.*

Exempel på meddelande:

Aktivitet: Att läsa en saga.

- ”Har du lust att läsa en saga?”
- ”Du kan börja läsa när jag tänt lampan.”
- ”Titta nu!” - Tryck på inspelningsknappen samtidigt som meddelandet spelas in för att lampan skall tändas vid uppspelning av detta meddelande.
- ”Ok. Nu ser du nog att läsa.”