



# JELLY BEAMER™

En kortfattad starthjälp för  
Jelly Beamer™  
Trådlös manöverkontakt

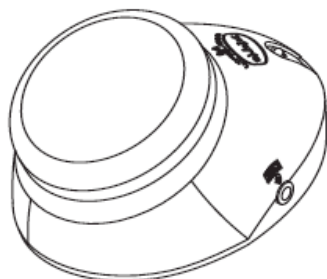


AbleNet, Inc.  
www.ablenetinc.com

## 1 Strömförsörjning av Jelly Beamer™

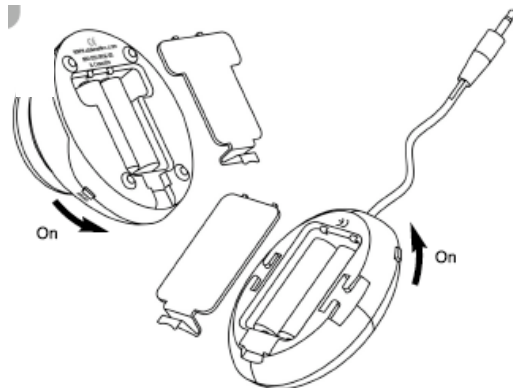

Sätt två AA batterier i sändaren och mottagaren.  
Batteriernas riktning visas på kåporna.  
Skjut strömbrytarna till läge "On".  
Signallampen blinkar till när apparaten slås på


## 3 Aktivering av Jelly Beamer™

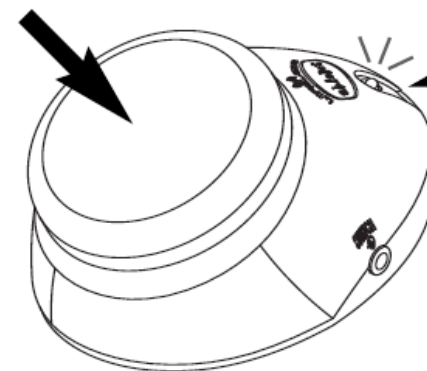


**Tryck på sändarens aktiveringsyta.**  
Signallamporna på båda enheterna tänds.

## 2


### Inkoppling av Jelly Beamer's™ mottagare

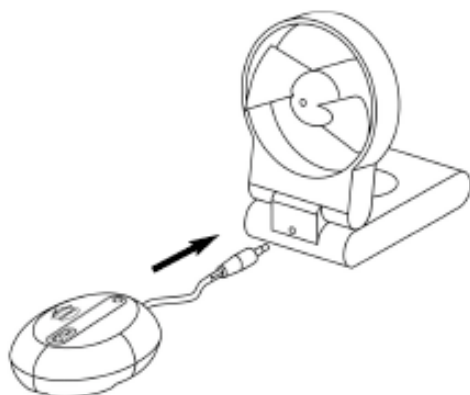

**Koppla mottagaren till en apparat eller dator.**  
Skall Jelly Beamer™ kopplas till dator krävs ett switchinterface (ingår ej).

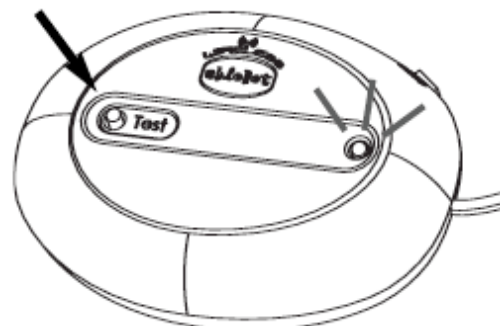


**Prova inkopplingen med ett tryck på mottagarens testknapp.**  
Mottagarens signallampa och den inkopplade apparaten aktiveras.

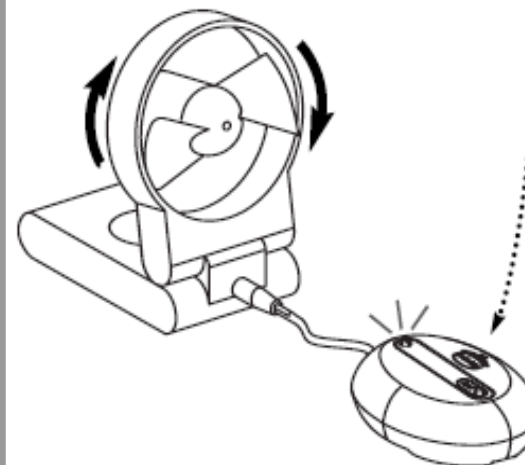


**Den inkopplade apparaten aktiveras.**  
Jelly Beamer's™ räckvidd är max 10 m.

## Jelly Beamer™ i korthet

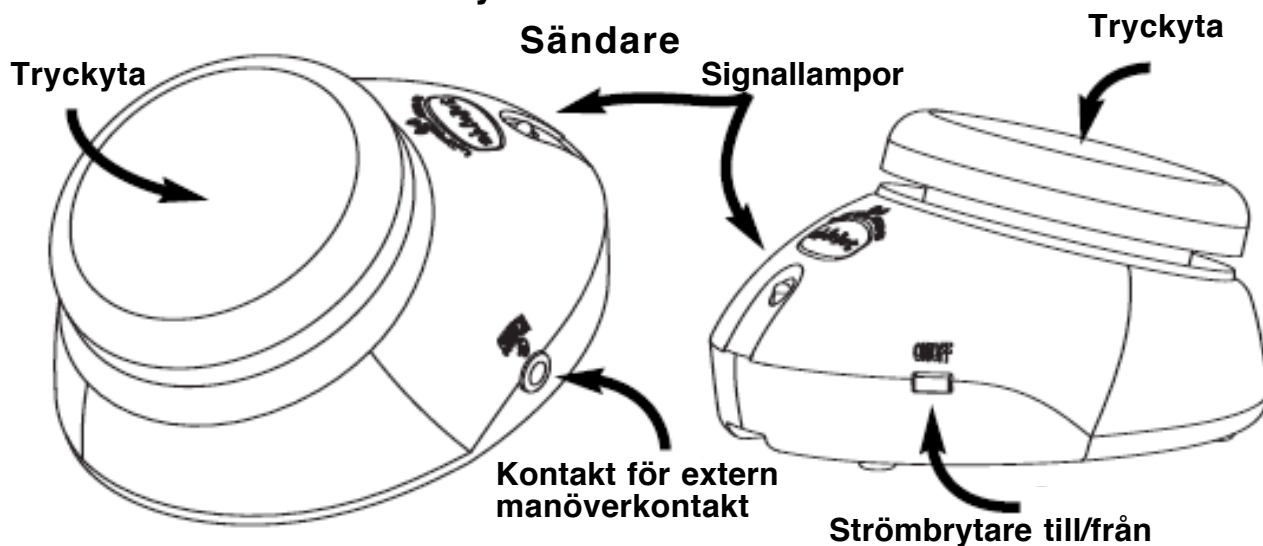

### Signallampa

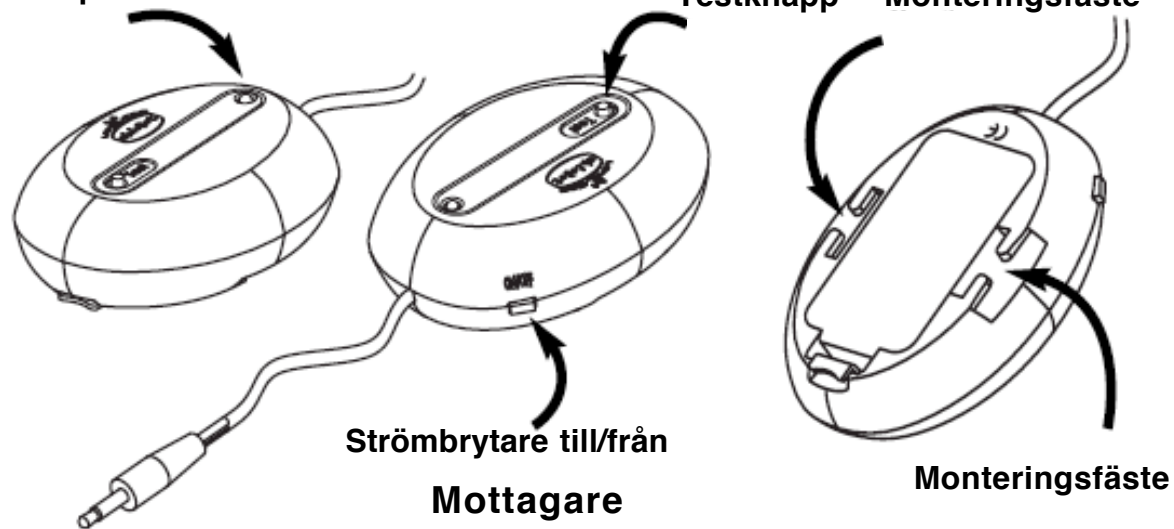

## Jelly Beamer™ information

### Introduktion.

Jelly Beamer består av två delar, sändare och mottagare. Dessa gör det möjligt att trådlöst styra vanliga switchanpassade saker som t.ex.:

- Batteridrivna leksaker.
- Elektriska apparater som ansluts via reläbox.
- Datorer som ansluts via switchinterface.
- Samtalsapparater.

### Alternativa monteringsmöjligheter.

Jelly Beamer kan monteras på många olika sätt. Några exempel är med hjälp av:

- Dual Lock.
- Kardborrband.
- UltraStick®.
- Monteringsarmar som t.ex. Slimarm..

### Skötsel och säkerhet.

- Jelly Beamer får ej användas i vatten eller placeras så den kan bli blöt.
- Jelly Beamer kan rengöras med en torr eller lätt fuktad trasa
- Jelly Beamer drivs av två AA batterier för var del. När batterierna börjar bli dåliga blinkar signallampan 3ggr.

### För ytterligare information eller service kontakta:

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18

187 40 TÄBY

Tel. 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

info@rehabcenter.se

www.rehabcenter.se

Se även det Engelska Quickstart Guide