


Lingo

Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation

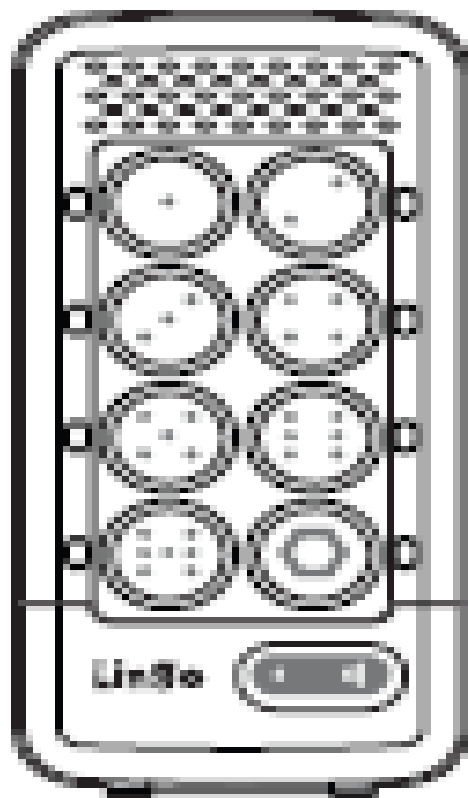


Snabbstart för att komma igång



Överlägg och idé, www.ablenetinc.com

1

Att ladda och starta

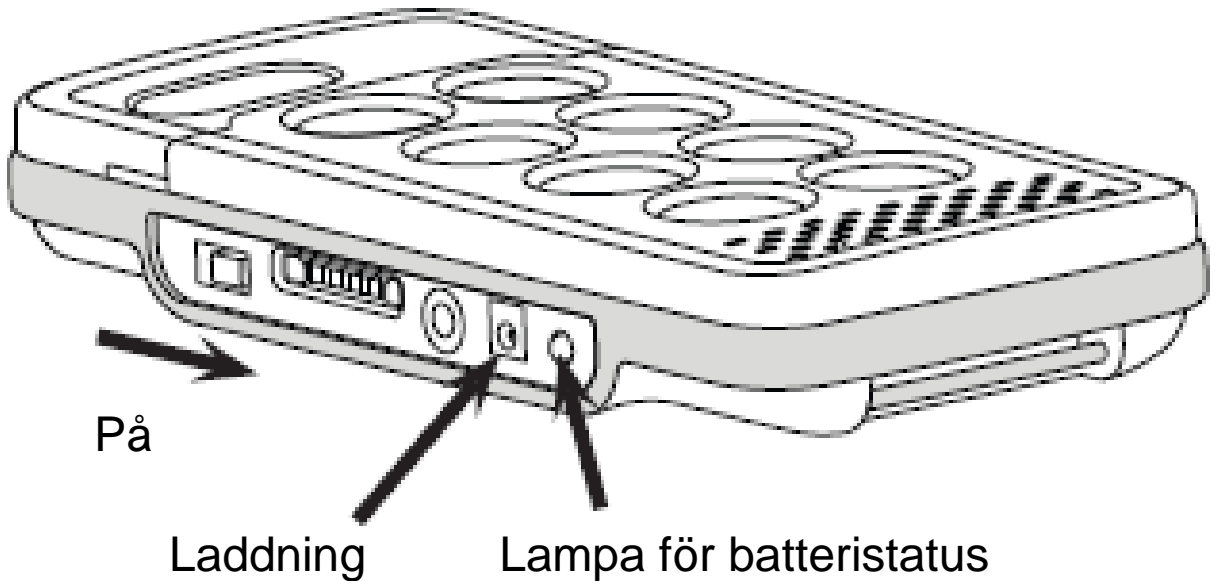


Koppla in den medföljande laddaren i urtaget på sidan av Lingo och anslut laddaren till ett väggurtag. Ladda tills lampan för batteristatus lyser GRÖN!

Obs! När Lingo laddas från urladdat läge (blinkande rött ljus) krävs tre timmars laddning.

Obs! När Lingo behöver laddas blinkar lampan för batteristatus tre gånger.

2

Att starta inspelningsläge

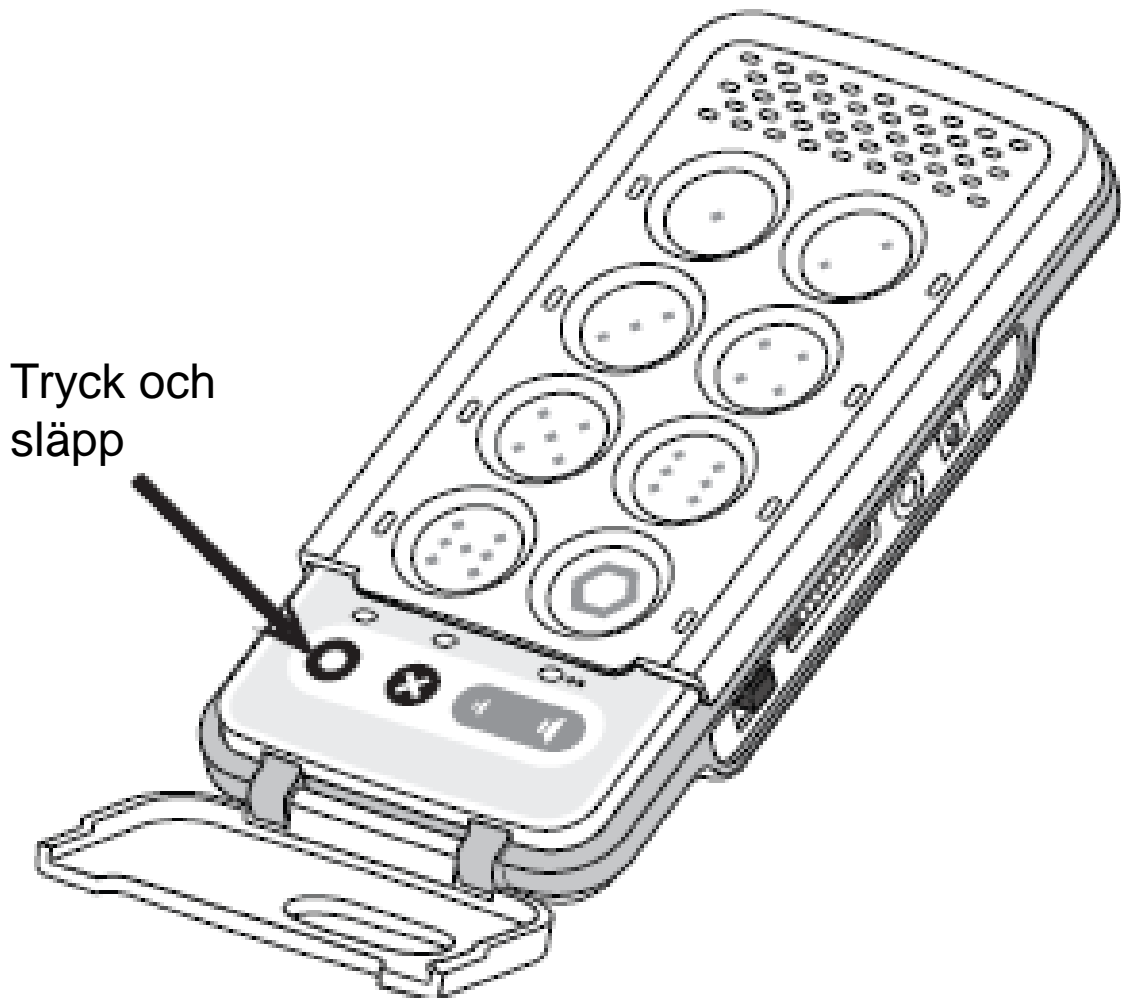

Tryck och
släpp


**Tryck ner och släpp inspelningsknappen.
Inspelningslampan tänds.**

Obs!. Lamporna för meddelandestatus kommer att visa om platsen är tillgänglig eller inte. Röd = redan inspelat meddelande, Gul = ledig

3

Att spela in enskilda meddelanden

Tryck in, håll ner och tala

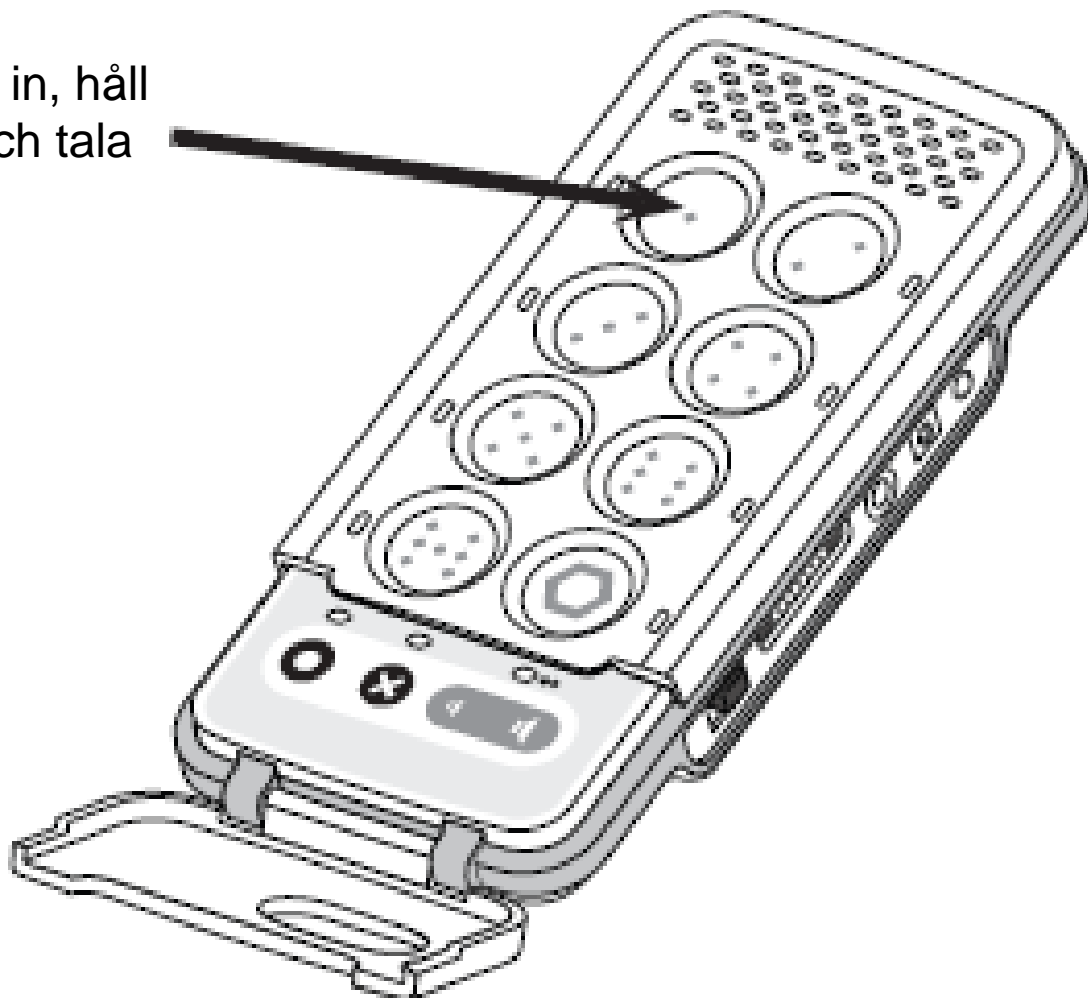


Tryck in och håll nere knappen där meddelandet ska spelas in. Börja tala efter pipet. Släpp när meddelandet är färdigt. Upprepa proceduren för övriga knappar. (Upp till 25 sekunder för knapp 1-7)

Obs! Inspelningslampan blinkar rött under inspelningen men byter till gult när endast 10 sekunder återstår.

4

Att spela in en meddelandesevens

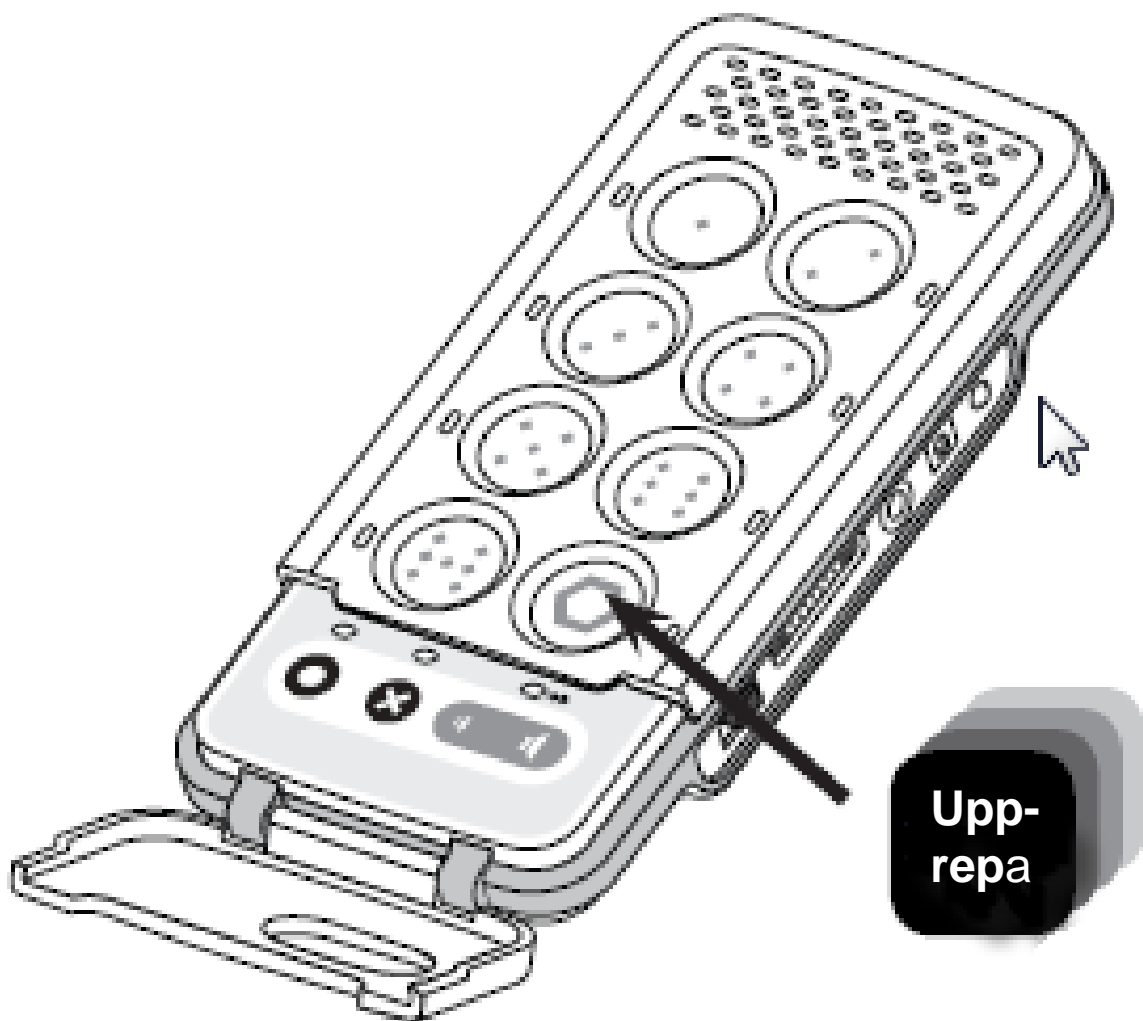

Upprepa instruktionerna från Steg 3 på anvisad knapp för att spela in en meddelandesevens.
(Upp till 60 sekunder under denna knapp)

Obs! Inspelningslampan blinkar rött under inspelningen men byter till gult när endast 10 sekunder återstår.

5

Att gå ur inspelningsläge






Tryck ner och släpp inspelningsknappen för att gå ur inspelningsläge. Nu är Lingo färdig för att användas.


Obs! Upprepa instruktionerna från steg 2, 3 och 5 med raderaknappen för att ta bort meddelanden från knappar.

Att lägga till och ta bort meddelanden i en sekvens

Med knappen för meddelandesekvenser är det möjligt att spela upp en sekvens av meddelanden i samma ordning som de spelats in. För att ändra på något av de enskilda meddelandena som ingår i sekvensen, följ nedanstående instruktioner.

Att lägga till ett meddelande i en sekvens:

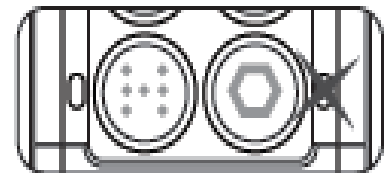


1. Tryck ned  tills meddelandet efter vilket ett nytt skall läggas till har spelats
2. Tryck ned  två gånger för att komma till tilläggsläge (Inspelnings- och meddelandelamporna tänds)
3. Tryck ned och håll in  under det att du talar. Släpp när meddelandet är klart. (Lingo kommer att ge ifrån sig ett pip och lamporna aktiveras under inspelningen)
4. Lingo lämnar tilläggsläget när inspelningen är klar





Att lägga till och **ta bort** meddelanden i en sekvens

Med knappen för meddelandesequenser är det möjligt att spela upp en sekvens av meddelanden i ordning. För att ändra på något av de enskilda meddelandena som ingår i sekvensen, följ nedanstående instruktioner.

Att **ta bort** ett meddelande i en sekvens:

1. Tryck ned  tills meddelandet som du vill radera har spelats
2. Tryck ned  två gånger för att komma till raderingsläge (Radera- och meddelandelamporna tänds)
3. Tryck ned och släpp  . (Lingo kommer att ge ifrån sig ett pip och lamporna aktiveras när meddelandet raderas)
4. Lingo lämnar raderingsläget när meddelandet tagits bort

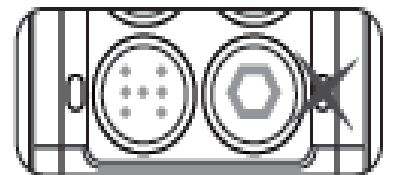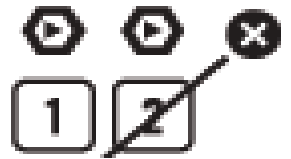


Tillbehör och avancerad användning

Låsa kontrollpanelen

För att låsa eller låsa upp kontrollpanelen, tryck ned inspelningsknappen och knappen för ökad volym samtidigt. När panelen är låst fungerar inte kontrollerna.

Lampor på kontrollpanelen visar dess status: RÖD= låst, GUL= olåst

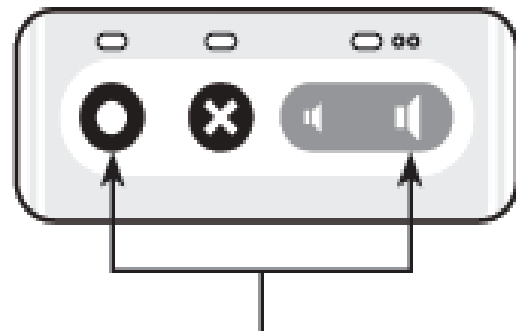


Tryck och släpp för att låsa/låsa upp

Radera allt

För att tömma apparaten på samtliga meddelanden trycker du ner raderaknappen och håller den intryckt i 10 sekunder.

Byta skyddsraster

För att ta bort det skyddande rastret, skjut rastret mot högtalaren tills det lossnar. Det går att byta till andra raster med 2, 4 eller 8 rutor.

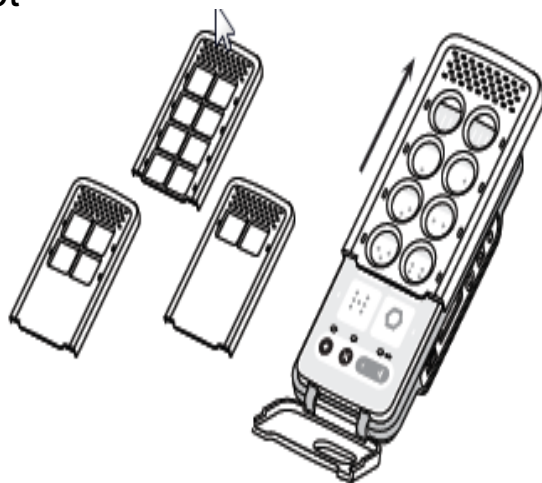


Sätta fast bältes-clips

Fäst kardborr-änden av det medföljande bandet vid monteringspunkterna på baksidan av "Lingo".

Skjut bältes-clipset på plats på plastknoppen. Tryck tills det klickar på plats. (För att ta loss, tryck på den räfflade klämman högst uppe på bältes-clipset.

Produktskiss och garantier


Ovansida

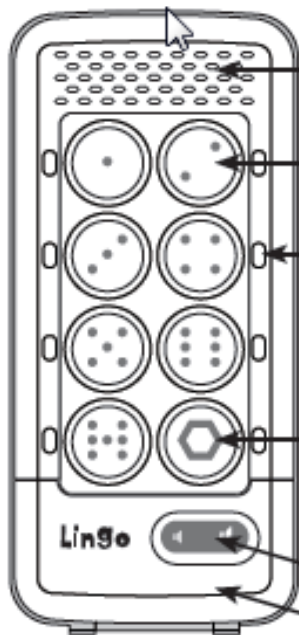

Högtalare
Knappar för meddelanden
Lampa för meddelande-status
Knapp för medd. sekvens
Volym
Kontrollucka


Monteringspunkt

Undersida

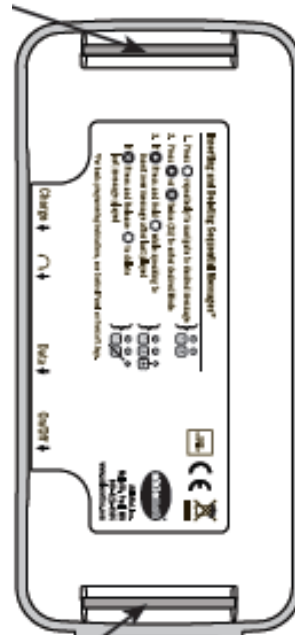

Monteringspunkt

Kontrollpanel

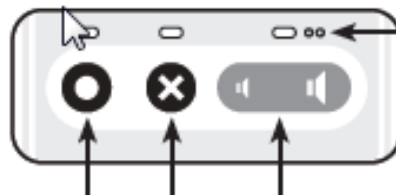

Inspelning Radera Volym

Mikrofon

Röd lampa vid min/maxvolym



AV/PÅ
Dataport

Hörlurar

Laddare och lampa för energistatus
Blinkande – låg
Röd – laddar
Grön - fulladdad

Lingo kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats lätt i vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Lingo bör ej tas isär för rengöring.

Lingo kan återvinnas som elektronikavfall eller enligt lokala föreskrifter för liknande produkter.

Lingo har två års garanti om inte annat avtalats.

För vidare information om teknik, garantier eller övrig information, kontakta
RehabCenter AB,
Enhagsvägen 18
187 40 TÄBY

www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se

08 – 768 25 00