

Talking Brix™

ablenet

Byggbara kommunikationsknappar -
Skapa en egen kommunikationsapparat

Fäste för
montering



Meddelande-
knappar



Högtalare

REHABCENTER AB

För att spela in meddelanden på Talking Brix™

1. Sätt på Talking Brix med on/offknappen på baksidan av apparaten. Lampan på apparatens baksida skall blinka rött en gång.
2. Tryck ned och håll in meddelandeknappen i fem sekunder. Börja tala när lampan blinkar rött. Obs! apparaten kommer först att spela upp befintligt tal innan den går in i inspelningsläge.
3. Släpp upp meddelandeknappen när meddelandet är färdigt. Lampan kommer att slockna. Talking Brix kan lagra upp till 10 sekunder ljud.
4. Tryck på meddelandeknappen för att spela upp meddelandet. Lampan kommer att blinka rött en gång när meddelandeknappen aktiveras.

För att använda bilder lyft bara av knappens genomskinliga lock.

För att sätta ihop och montera Talking Brix™

Använd hakarna och spåren på Talking Brix för att skapa en samtalsapparat med flera olika meddelanden. Placera en hake i den tomma delen av spåret och skjut den på plats. Brix kan kopplas ihop på många sätt och anpassas till varje individs önskemål.

Sätt fast Talking Brix med hjälp av den inbyggda magneten på baksidan eller sätt fast ett kardborrfäste på baksidans släta yta.

För att ladda Talking Brix™

Vid låg batterinivå kommer Talking Brix att blinka rött tre gånger efter uppläst meddelande. Ladda Talking Brix med den medföljande laddaren genom att ansluta apparaten via USB-sladden och laddaren till ett vägguttag. Lampan kommer att lysa med ett fast rött sken vid laddning och ett fast grönt sken när apparaten är färdigladdad. Observera att Talking Brix inte kan användas under pågående laddning.

RehabCenter AB
Enhagsvägen 18
187 40 Täby

Webb: www.rehabcenter.se , www.ablenetinc.com
E-post: info@rehabcenter.se
Tel. 08 – 768 25 00