


## Kort introduktion till manöverkontakt med en funktion

### Anslut kontakten



Plugga in en kontakt med en funktion i en kontaktpassad apparat med en standard 3,5 mm ingång. Notera att det för att styra en dator behövs en s.k. bläckfisk (ingår ej).

### Tryckyta

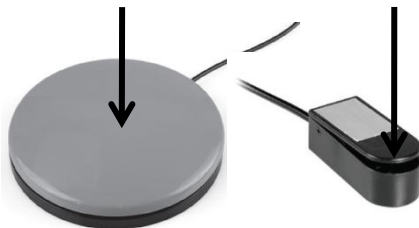

Endast ett tryck på tryckytan behövs för att aktivera en ansluten apparat eller leksak.

### Förvaring och skötsel

- Koppla loss kontakten innan den rengörs med fuktig trasa eller alkohol.
- Dra inte i sladden eller linda den runt kontakten
- Lägg inte ned den i vatten eller rengör med rengöringsmedel
- Försök inte öppna eller ta isär kontakten
- Utsätt inte kontakten för extrem hetta eller kyla

### Andra funktioner

Big Red och Jelly Bean:

- Ett genomskinligt lock kan skaffas för att skydda ev bild.
- Kontaktarna levereras med fyra, utbytbara lock. Skruva av locket motsols och skruva på det medsols.

