

Allora

Innehållsförteckning

1 - Inledning 4

- 1.1 Rengöringsanvisningar 4
- 1.2 Bärväskan 4

2 - Säkerhetsåtgärder 6

3 - Stänga av/slå på Allora 8

- 3.1 Återställ 8

4 - Skärm 1 och skärm 2 10

5 - Tangentbordet 14

- 5.1 Funktionstangent 15
- 5.2 Ljudtangent 16
- 5.3 Meddelandetangent 16
- 5.4 Ljudtangent 16
- 5.5 Piltangent (upp) 16
- 5.6 Piltangent (ned) 16
- 5.7 Piltangent (vänster) 17
- 5.8 Piltangent (höger) 17
- 5.9 Bekräftelsetangent 17
- 5.10 Rensa eller ignorera 17
- 5.11 Tangent för användningsalternativ 17
- 5.12 Favorittangent 17
- 5.13 Strömbrytare 17
- 5.14 Korrigeringstangent 17
- 5.15 Returtangent 18
- 5.16 Skifftangent 18

6 - Anslutningar och indikatorer 20

- 6.1 Framsida 20

- 6.1.1 Mikrofon 20
- 6.1.2 Batteriladdningsindikator 20
- 6.1.3 Strömindikator 20
- 6.1.4 IR-fönster 21
- 6.2 Sida 21
 - 6.2.1 Kontakt 1 21
 - 6.2.2 Kontakt 2 21
 - 6.2.3 USB-port 21
 - 6.2.4 Hörlurar 21
 - 6.2.5 Adapteringång 21
- 6.3 Baksida 21
- 6.4 Skärm 2 22
 - 6.4.1 Strömbrytare 23
 - 6.4.2 Återställ 23
 - 6.4.3 Volym upp 23
 - 6.4.4 Volym ned 23

7 - Batterier 24

- 7.1 Byta ut Alloras batteri 24
- 7.2 Byte av batteri på Skärm 2 25

8 - Alloras olika användningsalternativ 26

- 8.1 Kommunikation 26
 - 8.1.1 Spara meddelanden 27
- 8.2 Spela in 28
- 8.3 Göra anteckningar 28
 - 8.3.1 Göra anteckningar 29
 - 8.3.2 Spara anteckning 29
 - 8.3.3 Öppna anteckning 29
 - 8.3.4 Spara anteckning (USB) 29
 - 8.3.5 Öppna anteckning (USB) 29
 - 8.3.6 Radera anteckning 29
- 8.4 Omgivningskontroll (tillval) 30

Allora 2

- 8.4.1 Spela in infraröda koder 30
- 8.4.2 Överföra infraröda koder 31
- 8.5 Skicka och ta emot textmeddelanden 31
 - 8.5.1 Installera SIM-kortet 31
 - 8.5.2 Ange PIN-koden. 32
 - 8.5.3 Ansluta till en telefonoperatör 32
 - 8.5.4 Skicka ett SMS 33
 - 8.5.5 Ta emot SMS 34

9 - Använda Allora med manöverkontakter. 36

- 9.1 Använda en kontakt. 36
- 9.2 Skanning med två kontakter. 37

10 - Översikt över menyn och inställningarna 40

- 10.1 Tal 41
 - 10.1.1 Språk 41
 - 10.1.2 Röst 41
 - 10.1.3 Tempo 41
 - 10.1.4 Röstvolym 41
 - 10.1.5 Volym 42
 - 10.1.6 Eko av tecken 42
 - 10.1.7 Eko av ord 42
 - 10.1.8 Ange eko 42
 - 10.1.9 Lägg till uttal 42
 - 10.1.10 Ta bort uttal 42
 - 10.1.11 Tangentbord 43
 - 10.1.12 Typ 43
 - 10.1.13 Ljud 43
 - 10.1.14 Hålltid för siffror 43
 - 10.1.15 Fördröjning efter val 43
 - 10.1.16 Fördröjningstid 43
- 10.2 Scanning 44
 - 10.2.1 Algoritm 44
 - 10.2.2 Stega 44
 - 10.2.3 Välj 44
 - 10.2.4 Stegtid 44
 - 10.2.5 Lämna rad 45

- 10.2.6 Pausa scanning 45
- 10.2.7 Fördröjning före val 45
- 10.2.8 Ljud 45
- 10.3 Skärm 45
 - 10.3.1 Ljusstyrka 45
 - 10.3.2 Endast versaler 45
 - 10.3.3 Teckensnitt 46
 - 10.3.4 Teckensnitt för prediktion 46
- 10.4 Skärm 2 46
 - 10.4.1 Text 46
 - 10.4.2 Text medan du skriver 46
 - 10.4.3 Endast versaler 46
 - 10.4.4 Rader 46
 - 10.4.5 Ljud 47
 - 10.4.6 Rullningstyp 47
- 10.5 Prediktion 47
 - 10.5.1 Prediktion 47
 - 10.5.2 Lägg till ord 47
 - 10.5.3 Ta bort ord 48
 - 10.5.4 Autoinlärning 48
 - 10.5.5 Skiftlägeskänslig 48
 - 10.5.6 Maximalt antal repetitioner 48
 - 10.5.7 Mellanslag efter skiljetecken 48
- 10.6 Datum/tid 49
 - 10.6.1 Ändra datum 49
 - 10.6.2 Ändra tid 49
- 10.7 Mobiltelefon 49
 - 10.7.1 Mobiltelefon 50
 - 10.7.2 SMS-ljud 50
 - 10.7.3 PIN-kod 50
 - 10.7.4 (Åter)anslut 50
- 10.8 Allmänt 50
 - 10.8.1 Menyspråk 51
 - 10.8.2 Ange lösenord för meny 51
 - 10.8.3 Standby efter 51
 - 10.8.4 Avstängning efter 51
 - 10.8.5 Statusfält 51

Allora 2

- 10.8.6 Förkortningar 52
- 10.8.7 Spela in med brusfilter 52
- 10.8.8 Läs sparat meddelande 52
- 10.8.9 Stjärna 52
- 10.8.10 Skift + stjärna 52
- 10.8.11 Fn + stjärna 52
- 10.8.12 Verktygsmeny 52
- 10.8.13 Säkerhetskopiera/återställ 53

Copyright

© Copyright Jabbla

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem, översättas till något språk eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller via inspelning utan ett i förväg skriftligt medgivande av Jabbla.

1 - Inledning

Allora är ett mycket lättanvänt textbaserat kommunikationshjälpmedel. Meddelanden skrivna på Alloras tangentbord läses upp av en talsyntes med hög kvalitet. Intelligent ord- eller meningsprediktion, förlagrade meddelanden och förkortningsexpansion ökar avsevärt kommunikationshastigheten.

En bortkopplingsbar skärm 2 med hög kontrast gör det möjligt för kommunikationspartnern att visuellt följa det som skrivs.

Allora har en inbyggd mikrofön som möjliggör röstinspelning. Dessa inspelningar går att länka till enskilda tangenter på tangentbordet.

Allora går att utrusta med en valfri GSM-modul som gör det möjligt att skicka och ta emot SMS-meddelanden.

Allora är avsedd för kommunikation och ska inte användas i kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte.

Allora går även att utrusta med en IR-omgivningskontroll (GEWA) som går att lära att sända IR-koder som startar andra enheter. Den är utformad för allmän användning med audiovisuella apparater och tillämpningar för automatisering i hemmet. Detta tillägg får inte användas i kliniska, terapeutiska eller i diagnostiska applikationer.

Allora är portabel, men går även att fästa vid rullstolar.

Allora är enkel att använda med tilläggfunktioner som stöder kommunikationen. Vi rekommenderar att du läser den här guiden innan du använder enheten.

1.1 Rengöringsanvisningar

Vi rekommenderar att rengöra Allora regelbundet för att minimera bakteriespridning. Tangentbordet kräver särskild uppmärksamhet, eftersom detta är en samlingsplats för bakterier.

Vi rekommenderar rengöringsmedel särskilt avsedda för utrustning, t.ex. eller ett antiseptiskt desinfektionsmedel som (läs anvisningarna). Använd alltid en fuktig trasa.

Ta bort damm med en torr, mjuk trasa. Ta bort fläckar på höljet med en fuktig trasa. Undvik att fukt tränger in i högtalaröppningarna, mikrofonöppningen och i anslutningarna. Smuts på anslutningarna går att ta bort med en bomullspinne.

Rengör skärmen med en torr trasa. Använd inte pappershanddukar eftersom de kan orsaka små repor på skärmen. Ta bort fettfläckar på skärmen med rengöringsmedel särskilt avsedda för rengöring av bildskärmar (spray eller dukar) eller med ett antiseptiskt desinfektionsmedel. Tryck inte hårt mot skärmen när du rengör.

1.2 Bärväskan

Allora går att använda säkert i bärväskan. Lägg enheten i bärväskan och bär den i remmen så att den inte faller till marken. Om du fäster bärremmen i motsatta hörn på bärväskan går det att bära enheten samtidigt som den är välplacerad. Kontrollera alltid att bärväskan är stängd så att Allora inte faller ut.

Rengör bärväskan med en torr eller lätt fuktad trasa. Det går även att använda en mjuk handborste.

2 - Säkerhetsåtgärder

Tack vare sin låga vikt är Allora bärbar och lämplig att använda mobilt. Vi rekommenderar dock att alltid bära Allora i både väskan och bärremmen. På detta sätt undviker du att enheten faller till marken och kanske skadas.

Kontrollera att Allora är korrekt monterad och fäst när den används på en rullstol.

Enheten använder ett Li-ion-batteri. Kasta inte det gamla batteriet när du byter ut det, utan följ de lokala reglerna för avfallshantering. Det går även att skicka tillbaka batteriet till Alloras leverantör.

Förvara Allora avstängd med laddat batteri om du inte ska använda enheten under en längre tidsperiod. (Tryck på strömbrytaren i fem sekunder.)

Undvik att förvara enheten nära värmekällor eller på platser som blir mycket varma. På sommaren kan det bli mycket varmt i till exempel en bil. Höga temperaturer kan påverka Alloras drift och batteritid negativt.

Allora är inte vattenbeständig, men är stänkskyddad på tangentbordssidan. Högtalaröppningarna genom vilka fukt och smuts kan tränga in finns på enhetens undersida. Kommer vatten in i högtalarutrymmet kan detta påverka högtalarnas funktion och sänka ljudkvaliteten. Var försiktig när du rengör Allora och följ rengöringsanvisningarna.

3 - Stänga av/slå på Allora

Tryck på strömbrytaren  för att stänga av Allora. Strömbrytaren finns uppe till höger på tangentbordet. Det tar ungefär 25 sekunder att starta datorn. Under start blinkar strömindikatorn långsamt. När strömindikatorn lyser grönt är enheten startad och klar att använda när markören visas på skärmen. Det går nu att skriva ett meddelande med tangentbordet. Tryck på Retur-

tangenten  för att höra meddelandet.

Tryck kort på strömbrytaren för att ställa i Allora i vänteläge. Strömindikatorn tänds nu var fjärde sekund. I detta läge är Alloras strömförbrukning minimal. Tryck på valfri tangent för att starta Allora från vänteläget.

Tryck på strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av Allora helt och hållet.

3.1 Återställ

Om Allora är inaktiv (t.ex. på grund av en elektrostatisk urladdning på en anslutning), går det att återställa enheten med återställningsknappen. När enheten stängs av, tryck på strömbrytaren en gång till för att starta om Allora. Återställningsknappen finns på enhetens undersida.



Återställ

4 - Skärm 1 och skärm 2

Allora har två grafiska bildskärmar som visar tecken med olika storlek.

Den första och största skärmen, ovanför tangentbordet, visar meddelanden som skrivs in. Denna skärm visar även ord- eller meningsprediktion. Till höger om skärmen visas lägesindikatorer. På Alloras framsida finns en andra och mindre bildskärm som visar meddelandet som du skriver in.



Den första skärmen är indelad i tre delar. Den största delen används till att skriva meddelanden. Ett meddelande kan innehålla flera rader. Vid tryck på returtangenten läses meddelandet upp. Du behöver inte ta bort meddelandet för att skriva ett nytt meddelande, vilket innebär att det är enkelt att gå tillbaka till

tidigare meddelanden. Använd piltangenten  eller  för att navigera till meddelandet du vill använda igen och läsa upp det valda meddelandet

genom att trycka på "bekräftelsetangenten" .

Skärmens andra del längst ned på skärmen är avskild från den första delen med en vågrät linje. I den här delen av skärmen visas ord- eller meningsprediktionerna. Det går även att välja bort prediktion och använda hela

skärmen till meddelanden. Växla mellan ordprediktion, meningsprediktion eller

ingen prediktion genom att trycka på tangentkombinationen  .

Skärmens tredje del till höger visar Alloras viktigaste lägesindikatorer.

	Batteristatus
	Aktivera/inaktivera ljud
	Status för Fn- eller Skift-tangent
	Nytt meddelande
	GSM-mottagning
	SMS-läge

Den andra och mindre skärmen på Alloras framsida visar meddelandet du skriver. Det går dock att endast visa hela meddelande när det läses upp.




På den här skärmen går det att visa en, två eller tre textrader. Detta bestämmer även tecknens storlek. Väljer du en textrad blir tecknen större, men färre tecken visas samtidigt. Fler textrader ger mindre tecken.

Den andra skärmen är normalt fäst vid Allora, men det går att ta bort den från enheten och placera den bättre så att fler personer kan se skärmen.

Det går även att bära den andra skärmen eller ge den till din kommunikationspartner. Detta är särskilt praktiskt om du befinner dig i en bullrig miljö eller om du vill ha ett privat samtal.



Koppla bort den andra bildskärmen från Allora genom att trycka på spaken bakom skärmen och ta ut skärmen ur sitt fack.

Vi rekommenderar inte att ta bort den andra bildskärmen från Allora eller att sätta tillbaka den när Allora startar. Du bör vänta med detta tills enheten är helt startad.

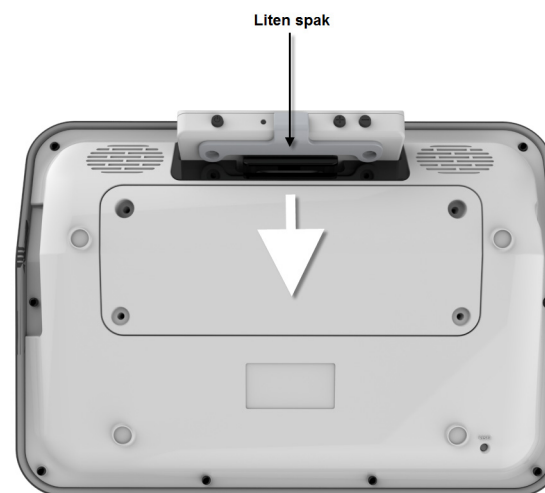

När den andra bildskärmen kopplas bort från Allora, upprättas en trådlös anslutning mellan Allora och den andra bildskärmen. Du hör ett kort pip ljud när anslutningen är upprättad och klar att använda. Den andra skärmen har både text och ljud.

Den andra skärmen går att bära med en rem eller ställas på de båda benen på ett bord. Benen ser även till att den andra skärmen lutar något bakåt och att ljudet strålar direkt mot lyssnaren.

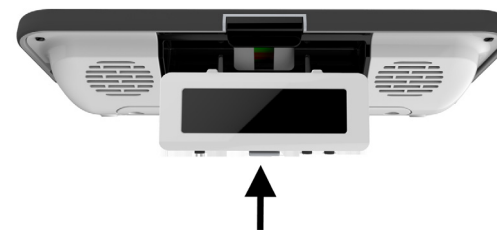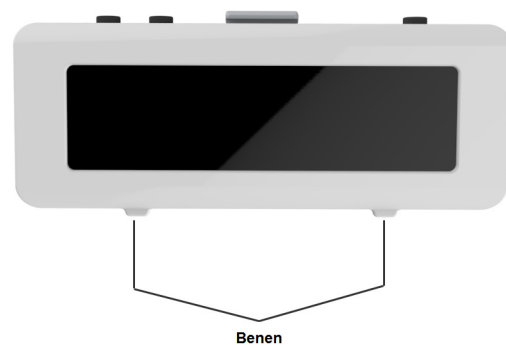

För att få en pålitlig trådlös anslutning bör du hålla ett avstånd på omkring tre meter mellan den andra skärmen och Allora.

Sätt tillbaka den andra skärmen på Allora: för in skärmen med stöden uppåt i Alloras fack enligt bilden. Anslutningen till Allora är endast fullständig om du hör ett klick.

5 - Tangentbordet


Allora har ett vattenbeständigt tangentbord i gummi med tangenter i samma storlek som ett vanligt tangentbord. Tangentbordet har ett fullständigt alfabet, siffror, ofta använda specialtecken (visade med blått), funktionstangenten Fn, en skifftangent, en returtangent och ett antal kontrolltangenter.

Skriv ett tecken på skärmen genom att trycka med motsvarande tangent. Tangentnedtryckningens fördröjningstid är justerbar för att undvika oönskad upprepning eller oavsiktliga tangentnedtryckningar. Observera att användning av fördröjningstider ställs in enligt användarens behov. Placeras enheten hos en ny användare är det viktigt att säkerställa att inställningarna uppfyller användarens behov annars verkar det som om tangentbordet är långsamt eller inte fungerar ordentligt.

Välj en siffra genom att trycka ned sifvertangenten något längre tills siffran visas på skärmen. Tryck kort på sifvertangenterna 1 till 5 för att välja motsvarande ord från ordprediktionslistan som visas längst ned på skärmen.

Tecknen intill siffrorna 6, 7, 8, 9, 0 skrivs in genom att trycka kort på motsvarande tangenten, precis som de övriga tecknen på tangentbordet.

Följande beskriver ett antal viktiga tangenter på Alloras tangentbord.

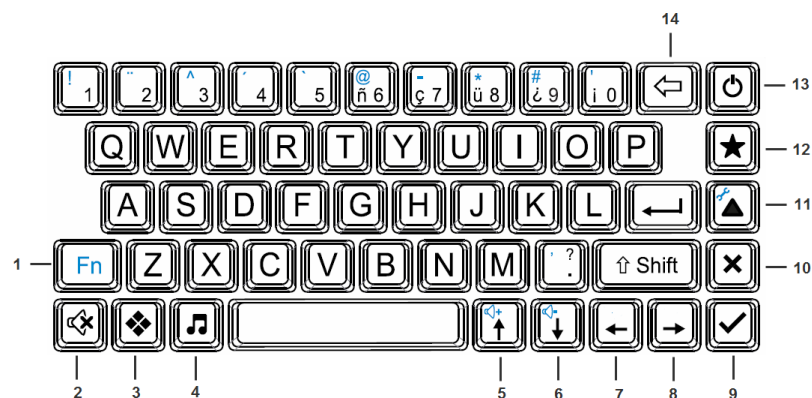

5.1 Funktionstangent

Funktionstangenten Fn används alltid tillsammans med en annan tangent. Tryck till exempel på funktionstangenten och tryck sedan på tangent 1 för att skriva ett utropstecken. Du behöver inte hålla ned funktionstangenten för att göra en kombination, det går att först trycka ned Fn, släppa den och sedan trycka på 1 om du vill skriva ett utropstecken. På samma sätt går det att välja alla specialtecken i blått i det övre vänstra hörnet på sifvertangenterna.

De blå symbolerna på en del tangenter visar en funktion som går att aktivera när tangenten används i kombination med Fn-tangenten. Kombinationer med andra tangenter som inte har en blå symbol är också möjliga.

Följande lista ger en översikt av de övriga kombinationerna med funktionstangenten.

Table 1: Funktionstangentkombination

		Öka volymen.
		Minska volymen.
		Öppna Alloras inställningsmeny.
		Stäng av/slå på ljudet.

Table 1: Funktionstangentkombination

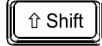
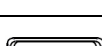
		Lägg till meddelandet på listan med meningsprediktioner.
	 	Ta bort meningsprediktionen som visas från listan med meningsprediktioner.
		Läs upp datum.
		Läs upp tid.
		Öka teckenstorleken. När största teckenstorlek uppnåtts, börjar nästa steg om från den minsta teckenstorleken och ökar sedan igen.
	 	Minska teckenstorleken. När minsta teckenstorlek uppnåtts, börjar nästa steg om från den största teckenstorleken och minskar sedan igen.
		Stäng av eller slå på den andra bildskärmen. Den här inställningen sparas tills den ändras på nytt.
		Växla mellan ljud från den andra bildskärmen eller från Allora (endast när den andra bildskärmen är bortkopplad). Den här inställningen sparas tills den ändras på nytt.

Table 1: Funktionstangentkombination

		Växla mellan ordprediktion, meningsprediktion och ingen prediktion. Den här inställningen sparas tills den ändras på nytt.
		Visa Alloras batteristatus, den andra skärmens status och den inbyggda programvarans version.
		Visa kommunikationsleverantör, telefonoperatörens signalstyrka (endast SMS) och ledigt minne till textmeddelanden.

5.2 Ljudtangent

Stoppa ljuduppspelning. Detta är praktiskt om du gör ett misstag.

5.3 Meddelandetangent

Meddelandetangenten används till att öppna ett sparad meddelande. Tryck först på meddelandetangenten och sedan på en siffra eller bokstav. Meddelandet som är kopplat till den tangenten visas. Detta gäller även kombinationen:

- meddelandetangent + Fn + siffra eller tecken,
- meddelandetangent + Skift + siffra eller tecken,
- meddelandetangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.

Spara ett meddelande på en tangent genom att först skriva meddelandet, sedan

trycka på meddelandetangenten  två gånger följt av den siffra eller

bokstav under vilken du vill spara meddelandet. Tryck sedan på bekräfta 

eller ignorera . Det går även att använda följande kombinationer som platser för att spara ett meddelande:

- Fn + siffra eller tecken,
- Skift + Fn + siffra eller tecken,
- Fn + Skift + siffra eller tecken.

5.4 Ljudtangent

Ljudtangenten används till att spela upp sparade ljud eller inspelningar. Tryck först på ljudtangenten och tryck sedan på en siffra eller bokstav för att spela upp den associerade inspelningen. Detta gäller även kombinationen:

- ljudtangent + Fn + siffra eller tecken,
- ljudtangent + Skift + siffra eller tecken,
- ljudtangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.

Tryck på ljudtangenten två gånger för att spela upp "uppmärksamhetsljudet".

Mer information om ljudinspelning finns i Spela in på sidan 28.

5.5 Piltangent (upp)

Flyttar upp markören en rad eller ökar volymen i kombination med Fn-tangenten.

5.6 Piltangent (ned)

Flyttar ned markören en rad eller sänker volymen i kombination med Fn-tangenten.

5.7 Piltangent (vänster)

Flyttar markören ett steg åt vänster.

5.8 Piltangent (höger)

Flyttar markören ett steg åt höger.

5.9 Bekräftelsetangent

Tryck på bekräftelsetangenten för att läsa upp eller upprepa meddelandet där markören befinner sig. Godkänn ett val (i inställningarna eller i programmen).

Tryck på Skift +  för att läsa upp alla meddelanden som skrivits sedan den senaste skärmrensningen.

5.10 Rensa eller ignorera

Rensa skärmen eller ignorera en åtgärd (i inställningarna eller i programmen).

5.11 Tangent för användningsalternativ

Tryck på programtangenten för att visa en lista med tillgängliga program i Allora. Beroende på tillgängliga alternativ och användarbehörigheter kan programmen vara:

- Nytt meddelande (tillägg): att skriva ett nytt SMS
- Läs meddelanden (tillägg): att läsa ett SMS

- Spela in: att göra en ljudinspelning
- IR-omgivningskontroll (tillägg)
- Adressbok (tillägg)
- Anteckningar: att göra anteckningar
- Kommunikation: grundprogram, att skriva och få uppläst

När du inte är i favoritprogrammet för kommunikation (du använder ett annat

alternativ eller ändrar inställningarna), tar dig -tangenten alltid tillbaka till användningsalternativet Kommunikation. (se Stjärna på sidan 52.)

Tryck på Fn +  för att öppna Alloras inställningsmeny.

5.12 Favorittangent

Tryck på favorittangenten om det valda användningsalternativet ska starta omedelbart. Den här tangenten går även att kombinera med funktionstangenten Fn och med Skift-tangenten för att starta två andra favoritalternativ.

5.13 Strömbrytare

Mer information om hur du stänger av eller slår på Allora finns i Stänga av/slå på Allora på sidan 8.

5.14 Korrigeringstangent

Tryck på korrigeringstangenten för att ta bort det senast inskrivna.

5.15 Returtangent

Tryck på returtangenten för att börja på ny rad eller skriva ett nytt meddelande. När talparametern Ange eko är på (standardinställning) läses även meddelandet upp.

5.16 Skifttangent

Tryck på skifttangenten om du vill skriva stora bokstäver. Du behöver inte hålla ned skifttangenten.

Skifttangenten används även till vissa kombinationer.


Andra användbara kombinationer är:

 + siffra 1-5 för att läsa upp motsvarande ordprediktioner.

  återställa senast borttagna meddelande.

  Läs alla meddelanden som skrivits sedan den sista skärmrensningen.

6 - Anslutningar och indikatorer

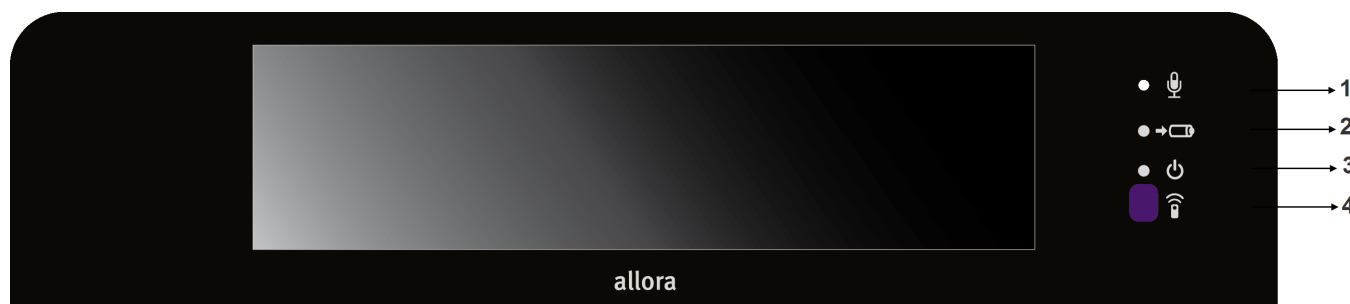

1. Mikrofon 2. Batteriladdningsindikator 3. Strömindikator 4. IR-fönster

6.1 Framsida

6.1.1 Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen används till högkvalitativa inspelningar. Du behöver inte vara nära mikrofonen under inspelning. Håll ett avstånd på ungefär 20 cm och tala i normal samtalston.

6.1.2 Batteriladdningsindikator

Batteriladdningsindikatorn tänds när Alloras nätadapter ansluts till vägguttaget. Indikatorn lyser orange under laddning. Den blir grön när batteriet är fulladdat. Använd inte andra nätadapterar än den som medföljde Allora.

6.1.3 Strömindikator

Strömindikatorn visar Alloras driftstatus. Indikatorn är inte tänd när Allora är helt avstängd.

Allora kan dock vara i strömsparläge (vänteläge). I detta fall tänds strömindikatorn var fjärde sekund för att indikera att enheten är redo för kommunikation när du behöver.

Strömindikatorn blinkar när enheten är på och under start. Detta kan ta omkring 25 sekunder. Strömindikatorn är tänd när startförloppet är avslutat och Allora är klar att använda.


Vi rekommenderar inte att ta bort den andra bildskärmen från Allora eller att sätta tillbaka den när Allora startar. Du bör vänta till enheten är helt startad eller när Allora är i vänteläge.

Blinkar strömindikatorn rött när du trycker på strömbrytaren för att slå på enheten, innebär detta att batteriet måste laddas.

6.1.4 IR-fönster

IR-fönstret används till att lära in infraröda koder. Håll fjärrkontrollen till enheten från vilken du vill lära ett kommando på omkring 5 cm avstånd från det här fönstret under inläring av koden.

6.2 Sida

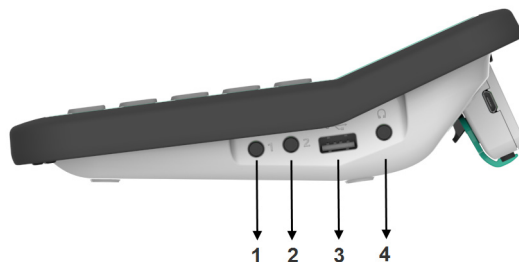

1. Kontakt 1 2. Kontakt 2 3. USB-port 4. Hörlurar 5. Adapteringång

6.2.1 Kontakt 1

Använd den här ingången till att ansluta Kontakt 1 till Allora för att styra enheten med skanning med en kontakt..

6.2.2 Kontakt 2

Använd den här ingången till att ansluta Kontakt 2 till Allora för att styra enheten med skanning med två kontakter.

6.2.3 USB-port

USB-porten används till att överföra anteckningar eller säkerhetskopiera data till eller återställa data från en minnessticka. Den här porten har ingen annan funktion.

6.2.4 Hörlurar

Här ansluter du hörlurar.

6.2.5 Adapteringång

Det här är nätadapters ingång. Använd inte andra nätadapterar än den som medföljde Allora. Adaptern laddar även Alloras inbyggda batteri och den andra bildskärmens batteri.

6.3 Baksida

Batterifacket och återställningsknappen finns på Alloras undersida.

Allora har ett laddningsbart batteri. Det här batteriet laddas med adaptern som medföljer enheten. SIM-kortets anslutning finns i batterifacket på Alloras undersida. Batterifacket bör endast öppnas om batteriet behöver bytas ut eller för att sätta in eller byta ut SIM-kortet. Batterifacket öppnas med en särskild skruvmejsel (Torx TX 10).

Återställningsknappen stänger av Allora om den slutar fungera normalt. Tryck på strömbrytaren för att starta om Allora.

6.4 Skärm 2




1. Batterifacket 2. Återställningsknappen



Allora har en andra bildskärm (Skärm 2) som visar meddelanden du skriver. Det går dock endast att visa hela meddelandet när det läses upp.

Det går att välja mellan en, två eller tre textrader. Tecknen är större med en textrad. Detta visar dock färre tecken samtidigt. Tecknen är mindre om du väljer tre textrader.

Skärm 2 är fäst vid Allora men går även att koppla bort från enheten. Skrivna meddelanden och ljud stöds även när Skärm 2 är bortkopplad från enheten.

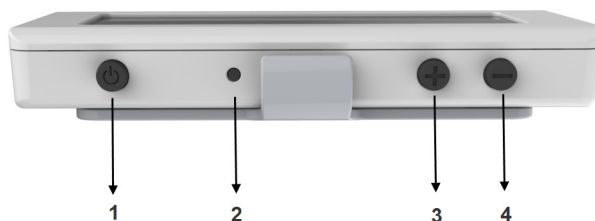

1. Strömbrytare 2. Återställ 3. Volym upp 4. Volym ned

Skärm 2 en har ett antal styrknappar. Dessa knappar är endast aktiva när skärmen är bortkopplad från huvudenheten.

6.4.1 Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att slå på Skärm 2 (eller stänga av den om den är på). Du behöver endast göra detta när den andra skärmen inte sitter i Allora. När den andra bildskärmen slås på, etableras en trådlös anslutning mellan Allora och den andra skärmen. Detta tar en stund. Du hör ett pip ljud när anslutningen är upprättad. En symbol som bekräftar anslutningen visas en kort stund på Skärm 2.

6.4.2 Återställ

Tryck på återställningsknappen och stäng Skärm 2 om den inte längre reagerar. Återställningsknappen aktiveras genom att trycka in den med ett spetsigt föremål, såsom en kulspetspenna. Tryck in knappen försiktigt tills du hör ett klick och tryck sedan på strömbrytaren för att slå på bildskärmen igen.

6.4.3 Volym upp

Den här knappen ökar volymen på Skärm 2. Den ändrar även volyminställningen på Allora. Volymnivån visas på skärmen.

6.4.4 Volym ned

Den här knappen sänker volymen på Skärm 2. Den ändrar även volyminställningen på Allora. Volymnivån visas på skärmen.

Anslutningen på sidan av Skärm 2 sida används endast för underhåll.

Tryck på Volym ner-knappen och strömbrytaren samtidigt för att visa den andra bildskärmens parametrar. Dessa är: serienummer, Mac-adress (detta är den trådlösa anslutningens identifieringsadress), programvaruversion och batteristatus.

7 - Batterier

Allora har ett inbyggt Li-ion-batteri. När batteriet är laddat ger Allora tio timmar av kontinuerligt ljud och tal. Batteriets kapacitet tillsammans med enhetens strömsparfunktioner bör vara tillräckliga för att ge användaren en hel dags användning innan uppladdning krävs.

Anslut nätadaptern för att ladda det inbyggda batteriet. Använd inte andra nätadapterar än den som medföljer Allora.

Det går att använda Allora under laddning, men i detta fall tar det längre tid att ladda batteriet.

Batteriladdningsindikatorn går från orange till grön när batteriet är helt laddat. I detta fall går det att ta ut nätadaptern. Vi rekommenderar att nätadaptern kopplas bort från enheten när batteriet är laddat, eftersom detta förhindrar onödiga olyckor som t.ex att dra i nätkabeln.

Även Skärm 2 har ett inbyggt batteri. Detta batteri laddas av Allora när den andra bildskärmen sätts tillbaka i Allora.

Tryck på Volym ner-knappen och strömbrytaren samtidigt för att visa parametrar för Skärm 2. Dessa är: serienummer, Mac-adress (detta är den trådlösa anslutningens identifieringsadress), programvaruversion och batteristatus.

7.1 Byta ut Alloras batteri

Batteriet finns i Alloras batterifack. Batterifackets lock är fäst med specialskruvar. Ta endast bort batterilocket när det är nödvändigt och använd rätt skruvmejsel, en Torx TX 10.

Tryck ned strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av enheten helt och hållet. Kontrollera att Allora inte är ansluten till elnätet.

Lägg Allora med skärmen nedåt på ett mjukt underlag så att bildskärmen inte skadas.

Skruva loss skruvarna med en Torx TX 10 skruvmejsel. Lyft batterilocket med skruvhålen bort från höljet. Batteriet är nu synligt och går att ta ut ur enheten. Sätt in det nya batteriet i enheten. Kontrollera att batteriet sitter rätt och har kontakt. Detta bör gå att göra utan större kraft.

Sätt tillbaka batterilocket. Även detta går att sätta tillbaka utan större kraft.

Skruva tillbaka batterilocket på plats med en Torx TX 10 skruvmejsel. Skruva inte åt skruvarna för hårt.

7.2 Byte av batteri på Skärm 2

Kontakta leverantören för byte av batteri på Skärm 2.

Kasta inte batteriet, utan följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering. Det går även att lämna tillbaka batteriet till enhetens leverantör.

8 - Alloras olika användningsalternativ

Allora stöder olika användningsalternativ. Beroende på tillgängliga alternativ och användarbehörigheter kan programmen vara:

- Nytt meddelande (tillägg): att skriva ett nytt SMS
- Läs meddelanden (tillägg): att läsa ett SMS
- Spela in: göra en ljudinspelning
- IR-omgivningskontroll (tillägg)
- Adressbok ((tillägg))
- Anteckningar: att göra anteckningar
- Kommunikation: grundalternativ, att skriva och få uppläst text

8.1 Kommunikation

Alloras grundläggande användningsområde är att skriva och läsa upp meddelanden i situationer ansikte mot ansikte. Allora startar alltid med det här användningsalternativet. Arbetar du i ett annat program eller om du har ändrat Alloras inställningar, kommer du tillbaka till alternativet. Kommunikation genom

att trycka på tangenten för användningsalternativ .

Skriv ett meddelande genom att helt enkelt använda Alloras tangentbord.

Det går att välja ett av orden som visas på ordprediktionslistan (på skärmens nedre del) genom att välja motsvarande siffra, 1 till 5. Det finns aldrig fler än fem ord på listan.

Tryck på tangenten med siffran 1 när du använder meningsprediktion för att välja den predicerade meningen. tryck på 2 för att visa nästa mening om en sådan finns.

Skriv siffror genom att trycka och hålla ned siffertangenten något längre till siffran visas på skärmen.

Tryck på returtangenten  för att börja på ny rad eller läsa meddelandet. Stäng av Ange eko i talinställningarna om du inte vill använda returtangenten till att läsa upp meddelandet.

Det går även att använda bekräftelsetangenten  till att läsa upp meddelandet som finns vid markören.

Öka teckenstorleken med tangentkombinationen  .

De behöver inte ta bort meddelandet för att skriva ett nytt meddelande. Det går att behålla meddelanden i dina samtal och gå tillbaka till något av dem med

piltangenterna  eller . Tryck på bekräftelsetangenten för att läsa det valda meddelandet.

Tryck på tangentkombinationen   för att läsa upp alla meddelandena.

Tryck på -tangenter om du vill rensa alla meddelanden. Tar du bort meddelanden oavsiktligt, går det att återställa borttagna meddelanden genom

att trycka på tangentkombinationen  .

Det går att välja mellan ordprediktion, meningsprediktion och ingen prediktion

med tangentkombinationen  .

8.1.1 Spara meddelanden

1. Lägg till meddelanden till listan med meningsprediktioner

Rensa alla meddelanden genom att trycka på -tangenter. Skriv ditt

meddelanden och tryck på tangentkombinationen  . Du hör ett kort ljud som bekräftar att meningen lades till på meningsprediktionslistan.

Använd tangentkombinationen    till att ta bort meningen som visas i prediktionsområdet från meningsprediktionslistan.

2. Spara meddelanden under en tangent

Rensa alla meddelanden genom att tryck på -tangenter. Skriv meddelandet och tryck två gånger på meddelandetangenten , följt av ett tecken eller en siffra. Bekräfta med  om du vill att meddelandet kopplas till det valda tecknet eller den valda siffran. Trycka på  för att ignorera.

Det går även att använda följande tangentkombinationer till att spara meddelanden:

- Fn + siffra eller tecken,
- Skift + Fn + siffra eller tecken,
- Fn + Skift + siffra eller tecken.

Hämta ett meddelande genom att trycka på meddelandetangenten  och sedan på en siffra eller bokstav. Meddelandet som är kopplat till den tangenten visas på skärmen. Det går att lägga till något om du vill och sedan trycka på

bekräftelsetangenten  för att läsa upp det.

Vill du läsa upp meddelandet omedelbart efter att det hämtats, måste du aktivera inställningen "läs lagrat meddelande" (se Läs sparade meddelanden på sidan 52).

Detta gäller även tangentkombinationerna:

- meddelandetangent + Fn + siffra eller tecken,
- meddelandetangent + Skift + siffra eller tecken,

- meddelandetangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.

3. Använda en förkortning som meddelande

Det går även att byta ut meddelandet mot en förkortning. Alloras förkortningsexpansion utökar förkortningen till en fullständig mening när du vid tryck på mellanslag.

Skapa en förkortning genom att först skriva ett meddelande.

Tryck på meddelandetangenten  två gånger följt av förkortningen du vill använda. Bekräfta med  om du vill att meddelandet kopplas till förkortningen. Tryck på  för att ignorera.

Hämta meddelandet genom att helt enkelt skriva förkortningen och trycka på mellanslag.

8.2 Spela in

Allora har en inbyggd mikrofon som gör det enkelt att spela in röstmeddelanden.

Tryck på programtangenten  för att visa de tillgängliga programmen och välj Spela in. Bekräfta valet med returtangenten och starta inspelningen. Följ anvisningarna.

1. Välj ett tecken som du vill koppla till inspelningen.
2. Tryck på och håll ned motsvarande tangent. Inspelningen startar efter två sekunder.

3. Håll ned tangenten så länge som du vill spela in.
4. Släpp tangenten om du vill stoppa inspelningen.

Tryck på tangenten  på nytt för att höra inspelningen. Tryck på och håll ned tangenten om du vill göra om inspelningen.

Spela upp en inspelning när du är i kommunikationsalternativet genom att helt enkelt trycka på ljudtangenten följt av tecknet som är kopplat till ljudet eller inspelningen du vill spela upp.

Det går även att använda följande tangentkombinationer till att spara inspelningar:

- Fn + siffra eller tecken,
- Skift + Fn + siffra eller tecken,
- Fn + Skift + siffra eller tecken.

8.3 Göra anteckningar

Det går att skriva anteckningar med Allora. Anteckningar lagras på enheten eller på ett USB-minne för att överföras till en dator. På samma sätt går det att förbereda anteckningar eller samtal på en dator och överföra dem till Allora. Dataöverföringen mellan Allora och datorn sker med ett USB-minne.

8.3.1 Göra anteckningar

Skriv en anteckning genom att rensa skärmen med -tangenten. Nu kan du börja skriva anteckningen. Tryck på returtangenten för att börja på ny rad. Trycker du på returtangenten läses föregående mening automatiskt upp. Det går att undvika detta genom att inaktivera Ange eko i talinställningarna eller så går

det att stänga av ljudet med tangentkombinationen  .

Spara anteckningen genom att trycka på programtangenten , välja Anteckningar och sedan trycka på returtangenten.

Du kan sedan välja:

8.3.2 Spara anteckning

Spara anteckningen i Alloras inbyggda minne. När du gör detta ombeds du ge anteckningen ett namn.

8.3.3 Öppna anteckning

Välj det här alternativet om du vill öppna en anteckning som är sparad på Allora. En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd piltangenterna

 eller  till att navigera till anteckningen som du vill öppna och tryck på returtangenten. Anteckningen visas nu på skärmen.

Det går inte att redigera anteckningen eller navigera till en mening som du vill

läsa upp. Tryck sedan på -tangenten.

8.3.4 Spara anteckning (USB)

Välj detta alternativ om du vill spara anteckningen på ett USB-minne. Du ombeds att ge anteckningen ett namn.

8.3.5 Öppna anteckning (USB)

Välj det här alternativet om du vill öppna en anteckning som är sparad på ett USB-minne. En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd

piltangenterna  eller  till att navigera till anteckningen som du vill öppna och tryck på returtangenten. Anteckningen visas nu på skärmen.

Det går inte att redigera anteckningen eller navigera till en mening som du vill

läsa upp. Tryck sedan på -tangenten.

8.3.6 Radera anteckning

Välj det här alternativet om du vill ta bort en anteckning som är sparad på Allora. En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd piltangenterna

 eller  till att navigera till anteckningen som du vill ta bort och tryck

på returtangenten. Använd -tangenten till att bekräfta eller ignorera med

-tangenten.

8.4 Omgivningskontroll (tillval)

Är din Allora utrustad med en enhet för omgivningskontroll går det att använda Allora till att skicka IR-koder för styrning av andra enheter, t.ex. tv, cd-spelare eller till och med lampor, dörrar och fönster. Detta är endast möjligt om dessa enheter stöder IR-styrning och om IR-koderna identifieras av GEWA-enheten på Allora.

8.4.1 Spela in infraröda koder

På skärmens högra sida, under strömindikatorn, finns ett lila fönster. Det är fönstret genom vilket Allora spelar in de infraröda koderna (IR). Observera att en del enheter har komplicerad IR-kodning. Är detta fallet är det möjligt att koderna inte går att lära in.



Tryck på tangenten för användningsalternativ  för att visa de tillgängliga alternativen. Välj Omgivningskontroll och tryck på returtangenten.

Det går nu att välja mellan:

1. Skicka
2. Lär in

3. Säkerhetskopiera (via USB)

4. Återställ (via USB)

Tryck på 2 för att välja Lär in.

Du får en lista med de tillgängliga platserna (kommandona) som kan innehålla en infraröd kod: gw1 .. gw150

Använd piltangenterna  eller  till att välja ett av kommandona och tryck på returtangenten för att starta inläringen:

Först tillfrågas du om du vill skriva över det befintliga kommandot. Tryck på



om du vill skriva över och lära in en ny kod. Tryck på  om du inte vill göra detta.

Placera fjärrkontrollen till den enhet vars infraröda koder du vill lära in omkring fem centimeter från det lila fönstret och tryck på knappen på fjärrkontrollen för det kommando du vill lära in. Håll ned denna knapp till Allora ber dig släppa den.

Allora ber dig upprepa detta. Tryck på och håll ned samma knapp en andra gång till Allora ber dig släppa den igen.

Det går nu att ge kommandot ett visst namn, volym upp, tv på osv. Välj helst ett kort namn som beskriver kommandot.

8.4.2 Överföra infraröda koder

Tryck på programtangenten  för att visa de tillgängliga programmen. Välj Omgivningskontroll och tryck på returtangenten.

Det går nu att välja mellan:

1. Skicka
2. Lär in
3. Säkerhetskopiera (via USB)
4. Återställ (via USB)

Tryck på 1 för att välja Skicka.

Du får en lista med de tillgängliga platserna (kommandona) som kan innehålla en infraröd kod: gw1 .. gw150 En del kommandon kan ha fått ett annat namn under inläringen.

Använd piltangenterna  eller  till att välja kommandot som du vill utföra och tryck sedan på returtangenten . Den infraröda koden överförs nu.

Till 111 av de 150 Gewa-kommandona finns det även en associerad tangent eller tangentkombination. Om du känner till tangenten eller tangentkombinationen går den därför att skriva in direkt.

8.5 Skicka och ta emot textmeddelanden

Allora går att utrusta med en GSM-modul som gör det möjligt att skicka och ta emot SMS från en annan person. Är din Allora utrustad med den här modulen måste programmet initieras innan det går att använda. Gör detta genom att utföra följande tre steg: installera SIM-kortet, ange motsvarande PIN-kod och anslut slutligen till en telefonoperatör.

8.5.1 Installera SIM-kortet

SIM-kortet är ett litet chipkort som måste föras in i Allora för att kunna använda GSM-modulen.




SIM-kortet finns i Alloras batterifack.

Tryck ned strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av enheten helt och hållet. Kontrollera att Allora inte är ansluten till elnätet.

Lägg Allora med skärmen nedåt på ett mjukt underlag så att bildskärmen inte skadas.

Skruva loss skruvarna med en Torx TX 10 skruvmejsel. Lyft batterilocket med skruvhålen bort från höljet. Batteriet är nu synligt och går att ta ut ur enheten.

Följande bild visar SIM-kortets plats.

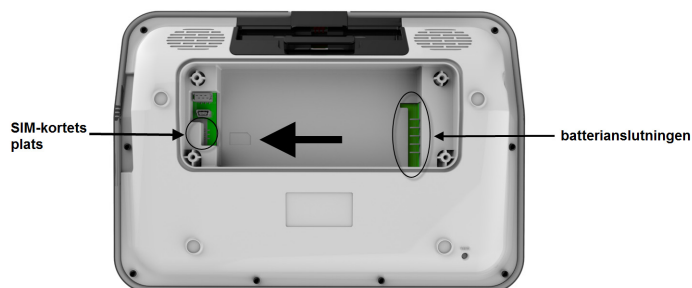

I batterifacket finns en liten bild som visar SIM-kortets rätta placering. Skjut försiktigt in SIM-kortet i pilens riktning i SIM-kortets anslutning.

Sätt tillbaka batteriet i batterifacket. Sätt först in batteriets vänstra sida (intill SIM-kortet) först i facket och släpp sedan försiktigt batteriets andra sida i batterianslutningen. Detta säkerställer att både SIM-kortet är säkrat och att batteriet får god kontakt.

8.5.2 Ange PIN-koden.

När SIM-kortet är installerat går det att ange PIN-koden.

Tryck på Fn  för att komma till Alloras inställningar.

Navigera med piltangenterna  eller  till posten Mobiltelefon och tryck på returtangenten. Du har nu öppnat mobiltelefonens inställningar i Allora.

Navigera med piltangenterna  eller  till posten PIN-kod och tryck på returtangenten. Följande fönster visas på skärmen:



Ange PIN-koden och bekräfta med  eller tryck på  för att avbryta.

8.5.3 Ansluta till en telefonoperatör

När PIN-koden har angivits korrekt är du klar att ansluta till en telefonoperatör.

Tryck på Fn  för att komma till Alloras inställningar.

Navigera med piltangenterna  eller  till posten Mobiltelefon och tryck på returtangenten. Du har nu öppnat mobiltelefonens inställningsmeny i Allora.

Navigera med piltangenterna  eller  till posten (Åter)anslut och tryck på returtangenten. När du har en anslutning visas statussymbolen för

signalstyrka  till höger på skärmen.

Tangentkombinationen   gör det möjligt att visa signalstyrkan, telefonoperatören och ledigt minne på SIM-kortet. Lagg märke till att om minne på SIM-kortet är fullt går det inte längre att ta emot nya SMS. Det går att skapa ledigt minnesutrymme genom att ta bort gamla meddelanden om detta inträffar.

8.5.4 Skicka ett SMS

Det är praktiskt att först skapa en kontaktlista.

Öppna kontaktlistan genom att trycka på tangenten för användningsalternativ



för att visa alternativen.

Navigera med piltangenterna  eller  till 5 - Adressbok och tryck på returtangenten .

Följande fönster visas på skärmen:

Välj <Lägg till kontakt> och tryck  om du vill lägga till en ny kontakt.

Ange namn och telefonnummer och bekräfta med  eller tryck på  för att avbryta.

Upprepa detta om du vill lägga till fler kontakter.

Om du väljer en befintlig kontakt är det möjligt att redigera eller ta bort den.

Tryck på  eller  för att återvända till programmet Kommunikation.



Nu går det att skriva SMS-meddelanden. Tryck på tangenten för användningsalternativ för att visa de tillgängliga alternativen.

Navigera med piltangenterna  eller  till posten 1 - Nytt meddelande och tryck på returtangenten.

En tom skärm öppnas där du skriver meddelandet. I meddelandets statusavsnitt påminner en (S)-ikon att du är i SMS-läget.

Tryck på bekräftelsetangenten  när meddelandet är klart att skicka. Din kontaktlista visas på skärmen. Skriv in ett telefonnummer direkt eller använd

piltangenterna  eller  till att välja en kontakt på listan.

Tryck på returtangenten  för att skicka meddelandet. Du hör ett ljud och texten Meddelandet skickat visas när meddelandet har skickats iväg.

Tryck på  en gång till om du vill skicka meddelandet till en annan kontakt.

Tryck på tangenten för användntangenten för användningsalternativ  för att återvända till alternativet Kommunikation.

8.5.5 Ta emot SMS

När du får ett SMS från en annan person visas en kuvertikon i statusfönstret. Du hör även ett ljud. Observera att kuvertikonen även visar att det finns nya, olästa meddelanden.

Läs ett nytt meddelande genom att trycka på tangenten för

användningsalternativ  och välj Läs meddelanden. En lista med meddelanden visas på skärmen med det senaste meddelandet högst upp.

Den första raden visar avsändaren, den andra raden visar meddelandets inledning. En asterisk * före avsändaren visar att detta meddelande inte ännu är läst.

Använd piltangenterna  eller  till att navigera till meddelandet som du vill läsa och öppna det genom att trycka på returtangenten .

Hela meddelandet visas nu på skärmen.



Navigera i meddelandet med piltangenterna  eller .

Lägg märke till att meddelandets avsändare, datum och tid visas vid slutet av meddelandet. Det går att välja att svara på meddelandet direkt (tryck på sifvertangent 1 - Svara) eller att ta bort meddelandet (tryck på sifvertangent 2 - Ta bort) eller läsa upp det (tryck på sifvertangent 3 - Läs).

Meddelandena lagras på SIM-kortet och i Alloras internminne. SIM-kortet lagrar de fem senaste meddelandena, alla övriga meddelanden lagras i Alloras internminne.

9 - Använda Allora med manöverkontakter.

Allora går även att använda med en eller två manöverkontakter. Allora visar då de tecken och funktioner på skärmen som du kan behöva för att skriva ett meddelande. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda visas, tryck på kontakten för att göra valet. Den här funktionen kallas för skanning.

För att leda dig igenom skanningen, visar Allora en följd av alfanumeriska tecken som du kan välja bland för att skriva en mening eller ett meddelande. Dessa rader visas längst ned på skärmen, där ordprediktionen normalt visas. I en annan algoritm är sekvenserna inte tangentbordets rader utan ordnas i en effektivare följd. Det finns två format för skanning och de är följande:

1. Skanna tangentbord rad för rad.

Skärmen visar varje rad på tangentbordet i följd. Med kontakten går det att välja raden på vilket önskad bokstav finns och sedan skanna över bokstaven. När den valts startar skanning efter rad på nytt.

2. Skanna vanliga bokstäver.

I det här formatet visas bokstäverna ordnade efter användningsfrekvens, till exempel, bokstäver såsom vokaler och vanliga konsonanter visas först och sedan mindre vanliga konsonanter på efterföljande rader. Detta ger en effektivare skanningupplevelse och minskar tiden för att skriva meddelanden.

9.1 Använda en kontakt.

Med en skannande kontakt stegar man igenom de olika sekvenserna automatiskt med en viss rytm.

Anslut en kontakt till kontaktingång 1 på Allora (observera att skanning startar automatiskt när kontakten ansluts) och ställ in rätt parametrar enligt följande:

Tryck på tangentkombinationen  . Följande lista visas på skärmen:



Använd piltangenterna  eller  till att välja Scanning och tryck sedan på returtangenten . Följande lista med inställningar visas på skärmen:



Välj först **Algoritm**. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja Qwerty, men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här algoritmen skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en effektivare ordning för tecken och funktioner.

Ställ in **Stega** på Automatisk. Detta innebär att Allora automatiskt stegar igenom de skanningsalgoritmens olika sekvenser. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda visas, tryck på kontakten för att göra valet.

Inställningen **Välj** gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga tangentnedtryckningar.

Stegtid definierar hastigheten som används när Allora stegar igenom de olika sekvenserna.

Gör du ett misstag och till exempel väljer en rad med tecken där tecknet du vill ha inte visas, går det att vänta till Allora har stegat igenom raden ett antal gånger för att till slut lämna "fel" rad. Inställningen **Lämna rad** ställer in antalet gånger Allora stegar igenom en rad innan den lämnas.

Pausa scanning ställer in antal sekvenser som Allora kör innan den stoppar algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det intervallet. Skanningen startas om automatiskt om kontakten trycks ned.

Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till exempel darning.

Inställningen **Fördröjning före val** ställer in den fördröjningstiden.

Allora kan lägga till ett litet ljud varje gång den visar nästa tecken eller teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten. **Ljud** på/av lägger till eller stänger av ljudet vid varje steg.

Tryck på  för att stoppa skanning. Tryck på kontakten för att starta skanning igen.

9.2 Skanning med två kontakter.

Använd kontakt 1 till att stega igenom skanningsalgoritmens på varandra följande sekvenser. Gör valet med kontakt 2.

Anslut kontakterna till de avsedda kontaktingångarna på Allora. Skanning starta automatiskt när du aktiverar kontakt 1.

Tryck på tangentkombinationen   för att ställa in rätt parametrar. Följande lista visas på skärmen:



Välj Scanning med piltangenterna  eller  och tryck sedan på returtangenten . Följande lista med inställningar visas på skärmen:



Välj först **Algoritm**. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja Qwerty, men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här algoritmen skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en effektivare ordning för tecken och funktioner.

Ställ in **Stega** på Tryck på kontakt. Detta innebär att Allora visar nästa sekvens när du aktiverar kontakt 1. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda visas, tryck på kontakt 2 för att göra valet.

Inställningen **Välj** gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga tangentnedtryckningar.

Gör du ett misstag och till exempel väljer en rad med tecken där tecknet du vill ha inte visas, går det att vänta till Allora har stegat igenom raden ett antal gånger för att till slut lämna "fel" rad. Inställningen **Lämna rad** ställer in antalet gånger Allora stegar igenom en rad innan den lämnas.

Pausa scanning ställer in antal sekvenser som Allora kör innan den stoppar algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det intervallet. Skanningen startas om automatiskt om kontakten trycks ned.

Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till exempel darrning.

Inställningen **Fördröjning före val** ställer in den fördröjningstiden.

Allora kan lägga till ett litet ljud varje gång den visar nästa tecken eller teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten. **Ljud** på/av lägger till eller stänger av ljudet vid varje steg.

Tryck på  för att stoppa skanning. Tryck på kontakten för att starta skanning igen.

10 - Översikt över menyn och inställningarna

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna Alloras inställningsmeny. Följande lista visas på skärmen:



Det går att stänga inställningsmenyn när som helst genom att trycka på tangenten för användningsalternativ .

Följande översikt förklarar de olika tangenterna som går att använda till att ändra inställningarna.

 eller 	Navigera på listan med inställningar eller undermenyer.
 eller 	Välja en undermeny.
 eller 	Ändra en inställning.
	Stänga en undermeny

	Återvända till alternativet Kommunikation och tillämpa ändringarna.
---	---

10.1 Tal

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Tal och tryck på . Följande lista visas på skärmen:



Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.1.1 Språk

Välj bland de olika språken på din Allora.

10.1.2 Röst

Välj bland de olika rösterna för ett visst språk.

10.1.3 Tempo

Ställ in röstens tempo. Högre siffra ger högre rösttempo.

10.1.4 Röstvolym

Detta är den valda röstens volym. Volymen kan variera beroende på språk, rösten och tillämpad röstteknik. Den här volymen bör endast ställas in en gång. Värdet 7 är lagom. Det går att höja den här volymen om nödvändigt, i en del fall kan detta leda till en förvrängd röst.

10.1.5 Volym

Det här är Alloras volyminställning. Den här inställningen går även att ändra med

tangentkombinationen   för att öka volymen eller med

  för att sänka volymen.

10.1.6 Eko av tecken

När detta är inställt, läser Allora varje tecken som skrivs.

10.1.7 Eko av ord

När detta är inställt, läser Allora varje ord som skrivs (efter ett mellanslag).

10.1.8 Ange eko

Ett skrivet meddelande läses upp när du trycker på returtangenten . Är inställningen inaktiverad går det fortfarande att använda bekräftelsetangenten


 till att läsa upp meddelandet där markören befinner sig.

Använd tangentkombinationen   till att läsa upp alla meddelanden som skrivits efter skärmrensningsskommandot.


10.1.9 Lägg till uttal

Om ett visst ord inte uttalas korrekt, går det att lägga till det i Alloras uttalslexikon.

Lägg till ett ord genom att trycka på .

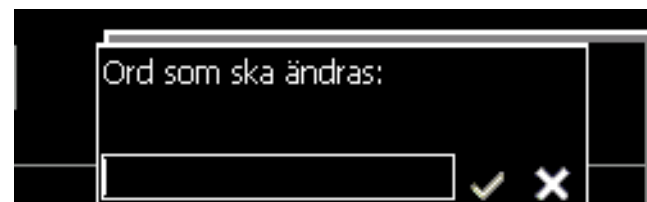

Skriv sedan om ordet på ett sådant sätt att det uttalas bättre.

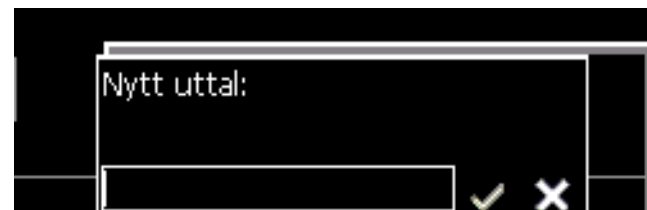

Tryck på  för att bekräfta eller avvisa med .

10.1.10 Ta bort uttal


Tryck på  för att öppna listan med ord i uttalslexikonet. Välj ett ord med

piltangenterna  eller  och tryck på returtangenten .

Tryck på  för att ta bort det från lexikonet eller  för att ignorera.

10.1.11 Tangentbord

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Tangentbord och tryck på . Följande lista visas på skärmen:

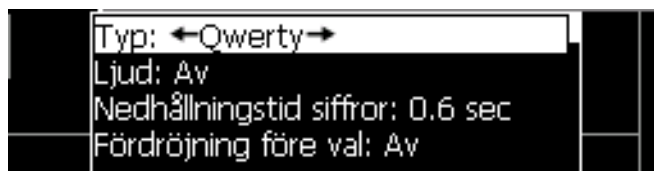

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.1.12 Typ

Den här inställningen bestämmer tangentbordets layout. Ändra endast den här inställningen om tangentbordet inte motsvarar tangentbordet på din Allora.

10.1.13 Ljud

Ställ in Ljud om du vill ha ett ljud vid varje tangentnedtryckning.

10.1.14 Hålltid för siffror

Den här inställningen anger hur längre en sifvertangent måste vara nedtryckt innan motsvarande siffra skrivs i meddelandet.

Sifvertangenterna 1 till 5 används även till att välja prediktion. Gör detta med en kort tryckning på sifvertangenterna.

10.1.15 Fördröjning efter val

Förhindra oönskade tangentnedtryckningar, till exempel på grund av darrning, går det att ställa in fördröjningstiden innan en ny tangentnedtryckning godkänns.

10.1.16 Fördröjningstid

Förhindra oavsiktliga tangentnedtryckningar, till exempel på grund av darrning, går det att ställa in hur länge en tangent måste vara nedtryckt innan den godkänns.

Viktig anmärkning!

De två sista inställningarna kan, om de ställs in på ett visst värde, ge intrycket av att Allora har slutat

fungera. Kom därför ihåg att om dessa fördröjningar är inställda på en viss tid, svarar tangentbordet långsamt.

10.2 Scanning

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Scanning och tryck på . Följande lista visas på skärmen:



Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.2.1 Algoritm

Den här inställningen ställer in algoritmen som används för att gå igenom ordningen. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja Qwerty, men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här algoritmen skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en effektivare ordning för tecken och funktioner.

10.2.2 Stega

Ställ in på Automatisk om du använder en kontakt. De efterföljande sekvenserna visas automatiskt med en inställd rytm (Stegtid).

Om du använder två kontakter bör den här inställningen ställas in på Tryck på kontakt.

Detta innebär att Allora visar nästa sekvens när du aktiverar kontakt 1. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda visas, tryck på kontakt 2 för att göra valet.

10.2.3 Välj

Inställningen Välj gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga tangentnedtryckningar.

10.2.4 Stegtid

Stegtid definierar hastigheten eller rytmen som används när Allora stegar igenom de olika sekvenserna.

10.2.5 Lämna rad

Den här inställningen ställer in antal gånger Allora stegar igenom en rad innan den går vidare (om du gör ett misstag och väljer fel ordning).

10.2.6 Pausa scanning

Den här inställningen definierar antal sekvenser som Allora kör innan den stoppar algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det intervallet. Skanningen startas om automatiskt om en kontakt trycks ned.

10.2.7 Fördröjning före val

Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till exempel darrning.

10.2.8 Ljud

Allora kan lägga till ett litet ljud (Ljud=på) varje gång den visar nästa tecken eller teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten.

10.3 Skärm

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Skärm och tryck på . Följande lista visas på skärmen:



Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.3.1 Ljusstyrka

Ställ in ljusstyrkan på skärm 1 på 1, 2 eller 3 för att få ljusare tecken. Observera att högre ljusstyrka använder mer ström och förkortar batteritiden.

10.3.2 Endast versaler

När det här alternativet är inställt, skriver Allora endast med stora bokstäver på den första skärmen.

10.3.3 Teckensnitt


Inställningen Teckensnitt ställer in teckenstorleken på skärmen mellan 7 och 24 bildpunkter.

10.3.4 Teckensnitt för prediktion

Inställningen Teckensnitt för prediktion ställer in teckenstorleken på ord- eller meningsprediktionen på skärmen mellan 7 och 24 bildpunkter.

10.4 Skärm 2

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Skärm och tryck på . Följande lista visas på skärmen:

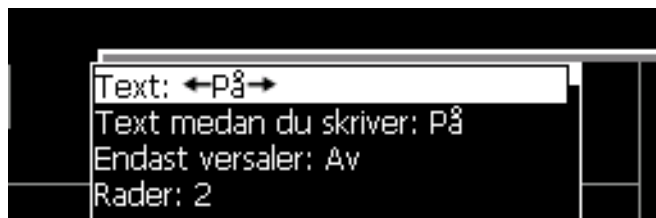

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.4.1 Text

När inställningen Text är avstängd visar inte skärm 2 meddelandet.

10.4.2 Text medan du skriver

Vill du inte visa meddelandet på den andra skärmen när du skriver det, måste du ställa in värdet på "av". Meddelandet visas sedan endast på den andra skärmen när Allora läser upp det.

10.4.3 Endast versaler

Med denna inställning visas tecknen på den andra skärmen endast med stora bokstäver.

10.4.4 Rader

Den här inställningen anger hur många textrader den andra skärmen stöder. Det går att välja mellan en, två eller tre rader. Ju fler textrader du väljer, desto mindre blir tecknen.

10.4.5 Ljud

Den andra bildskärmen har små högtalare. Dessa högtalare aktiveras vanligen när den andra skärmen kopplas bort från Allora och upprättar en trådlös anslutning. Det går dock att behålla ljudet i Alloras högtalare (Ljud=av).

10.4.6 Rullningstyp


Den här inställningen definierar hur meddelandet visas på den andra skärmen när det läses upp.

Ord för ord innebär att meddelandet visas ord för ord på den andra skärmen synkroniserat med talet.

När den är inställd på Textning försöker den andra skärmen visa så många ord som möjligt synkroniserat med talet.

10.5 Prediktion

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Prediktion och tryck på . Följande lista visas på skärmen:

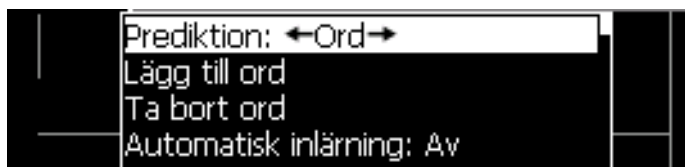

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.5.1 Prediktion

Det går att välja mellan ordprediktion, meningsprediktion eller ingen prediktion.


Med ordprediktion förutsäger Allora maximalt fem ord. Tryck på sifvertangenten 1 till 5 för att välja motsvarande ord.

Med meningsprediktion, tryck på tangenten 1 för att välja meningen, tryck sedan på sifvertangenten 2 för att visa nästa mening (om en sådan finns).

10.5.2 Lägg till ord

Välj den här inställningen om du vill lägga till ett nytt ord i prediktionsdatabasen.

Tryck på returtangenten . Följande fönster visas på skärmen:

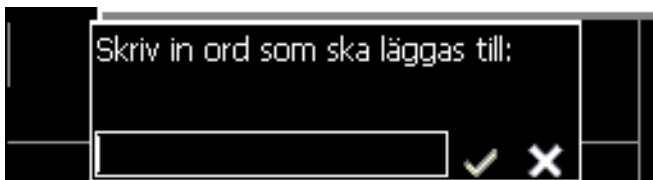


Skriv in ordet du vill lägga till i ordprediktionsdatabasen.

Bekräfta med bekräftelsetangenten  eller  avbryt med .

10.5.3 Ta bort ord

Välj den här inställningen om du vill ta bort ett ord från ordprediktionsdatabasen.

Tryck på returtangenten . Följande fönster visas på skärmen:

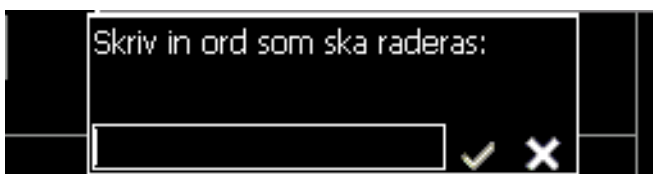

Skriv in ordet du vill ta bort från prediktionslistan. Bekräfta med

bekräftelsetangenten  eller avbryt med .

10.5.4 Autoinläring

Den här inställningen ställer in om Allora automatiskt lägger till nya ord i ordprediktionsdatabasen eller inte.

Av innebär att inga nya ord läggs till i databasen.

Ord innebär att Allora automatiskt lägger till orden du skriver i databasen. Om ordet redan finns anpassas dess frekvens (sannolikheten att ordet skrivs).

Frekvenser innebär att Allora endast justerar frekvenserna för ord och ordpar som redan finns i befintliga databasposter.

Alla innebär att Allora automatiskt lägger till nya ord i databasen och även justerar frekvenserna för befintliga databasposter.

10.5.5 Skiftlägeskänslig

När denna inställning är aktiverad tar ordprediktionen hänsyn till stora bokstäver. Är den inaktiverad påverkar stora bokstäver inte prediktionen.

10.5.6 Maximalt antal repetitioner


Den här inställningen anger hur ofta en prediktion upprepas i den visade ordlistan innan det ersätts av en annan prediktion.

10.5.7 Mellanslag efter skiljetecken

Med denna inställning läggs ett mellanslag automatiskt till efter ett skiljetecken.

10.6 Datum/tid

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Datum/tid och tryck på . Följande lista visas på skärmen:

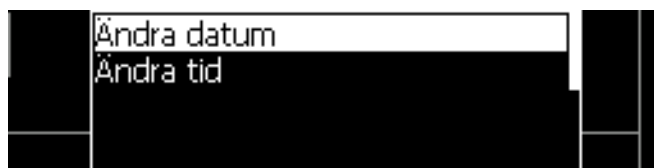

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.6.1 Ändra datum

Tryck på Retur-tangenten  och ange år. Bekräfta med

bekräftelsetangenten  eller avbryt med . Fyll i månad (1-12) och dag (1-31) på samma sätt. Du hör ett kort ljud när inställningen slutförs.

Läs upp datumet med tangentkombinationen  . Datumet visas även på skärmen.

10.6.2 Ändra tid

Tryck på Retur-tangenten  och ange timme. Bekräfta med


bekräftelsetangenten  eller avbryt med . Ange minuter på samma sätt. Du hör ett kort ljud när inställningen slutförs.

Läs upp tiden med tangentkombinationen  . Tiden visas även på skärmen.

10.7 Mobiltelefon

Är din Allora utrustad med en GSM-modul går det att initiera enheten med dessa inställningar. Observera att modulen endast stöder att skicka och ta emot SMS:

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Mobiltelefon och tryck på . Följande lista visas på skärmen:

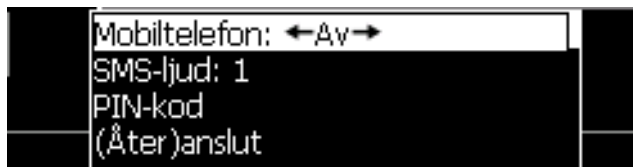

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Öppna undermenyn genom att trycka på .

Stäng undermenyn genom att trycka på .

10.7.1 Mobiltelefon

Den här inställningen gör det möjligt att stänga av och slå på mobiltelefonenheten.

10.7.2 SMS-ljud

Välj ljudet (1 till 3) du vill höra när ett meddelande tas emot.

10.7.3 PIN-kod

Tryck på returtangenten  för att öppna undermenyn.

Skriv in PIN-koden till ditt SIM-kort. Bekräfta med bekräftelsetangenten  eller avbryt med .

10.7.4 (Åter)anslut

När PIN-koden har angivits måste du ställa in anslutningen till en telefonoperatör. Nästa gång du startar Allora görs detta automatiskt (när Mobiltelefon är inställd på "på").

Tappar du anslutningen går det att återansluta med (Åter)anslut.

10.8 Allmänt

De allmänna inställningarna anger menyspråk, strömhantering, favoritprogram.

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Allmänt och tryck på . Följande lista visas på skärmen:



Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Tryck på  om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på .

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:


10.8.1 Menyspråk

Den här inställningen ställer in menyspråket.

10.8.2 Ange lösenord för meny

Ställ in ett lösenord som förhindrar obehörig åtkomst till inställningsmenyn. Är ett lösenord inställt, tillfrågas du varje gång du vill öppna inställningsmenyn.

Tryck på Retur-tangenten  för att ange lösenordet.

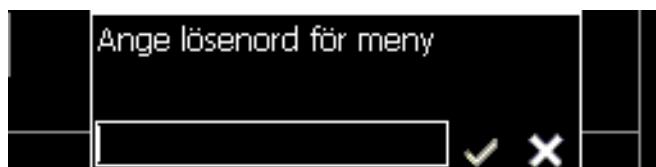

Bekräfta med bekräftelsetangenten  eller avbryt med .

Ta bort lösenordet?

När du är i inställningsmenyn går det att ta bort det aktuella lösenordet så här: välj Allmänt och sedan Ange lösenord för meny. Bekräfta utan att skriva in tecken. Nu går det att öppna inställningsmenyn utan lösenord.

10.8.3 Standby efter

Används inte Allora under en viss tid, stängs den automatiskt av i ett läge som minskar strömförbrukningen avsevärt för att spara batteritid. Dettaläge kallas för vänteläge.

Inställningen Standby efter anger inaktivitet i antal minuter innan Allora automatiskt går till vänteläget.

Observera att det även går att gå till vänteläget med en kort tryckning på strömbrytaren.

Allora går ut ur vänteläget när du trycker på en tangent.

10.8.4 Avstängning efter

Den här inställningen bestämmer efter hur många timmar Allora stängs av automatiskt.

Efter automatisk avstängning måste Allora startas med strömbrytaren.

10.8.5 Statusfält

Allora visar statusparametrarna till höger på skärmen när den här inställningen aktiveras. Statusparametrarna är:

Batteri, ljud av, status för tangenterna Fn och Skift, meddelanden, SMS-läge, signalstyrka.

10.8.6 Förkortningar

Den här inställningen expanderar automatiskt lagrade förkortningar.

10.8.7 Spela in med brusfilter

Spelar du in i en bullrig miljö, kan inspelningen bli bättre med brusfiltret,

10.8.8 Läs sparad meddelande

Har du lagrat meddelanden under en tangent går de att öppna genom att trycka

på meddelandetangenten  och motsvarande tangent. Meddelandet visas sedan på skärmen. När inställningen Läs sparad meddelande är aktiverad, läses även meddelandet upp automatiskt.

10.8.9 Stjärna

Allora har en specialtangent, stjärntangenten  som startat ett förvalt användningsalternativ. Välj något av följande:

- <Inget>
- Spela in: göra en ljudinspelning
- Nytt SMS: att skriva ett nytt textmeddelande
- Läs SMS: att läsa ett textmeddelande

- Skicka IR: skicka ett kontrollkommando
- Läs tid: läser upp tiden
- Inspelning (A): spela upp inspelningen under tecknet A
- Meddelande (A): spela upp meddelandet under tecknet A

10.8.10 Skift + stjärna

På samma sätt som med stjärntangenten, går det att koppla ett av dina förvalda

användningsalternativ till tangentkombinationen  .

10.8.11 Fn + stjärna

På samma sätt som med stjärntangenten, går det att koppla


tangentkombinationen   till ett av dina förvalda användningsalternativ.

10.8.12 Verktygsmeny

Allora stöder ett antal olika program. Huvudprogrammet är Kommunikation, men det går även att spela in ljud eller skriva anteckningar. Din Allora kanske även har extraprogram när den har en IR-modul för omgivningskontroll och/eller en GSM-modul för att skicka och ta emot SMS. Välj vilka program som är tillåtna med Verktygsmeny. Endast dessa program visas när du trycker på tangenten för

användningsalternativ .

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Verktymsmeny och tryck på . Följande lista med inställningar visas på skärmen:

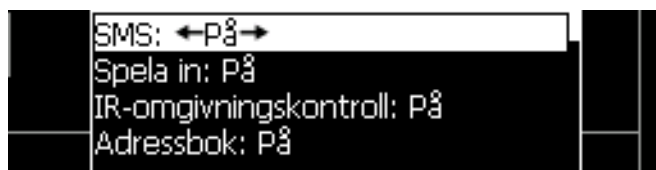

Använd piltangenterna  och  till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna  och  för att ändra en inställning.

Ge de alternativ du vill tillåta värdet "på".

Alternativen som ställts in på "av" visas inte på programlistan när du trycker på

programtangenten .

10.8.13 Säkerhetskopiera/återställ

Med den här funktionen går det att säkerhetskopiera och återställa data såsom lagrade meddelanden, ljudinspelningar och IR-koder till ett USB-minne. Om data på enheten av någon anledning tas bort (förlust, reparation), går det alltid att återställa data från USB-minnet till din Allora.

Det här verktyget går även att använda till att installera en uppgradering av den inbyggda programvaran eller till att återställa standardinställningarna.

Tryck på tangentkombinationen   för att öppna inställningsmenyn, välj Säkerhetskopiera/återställ och tryck på . Följande lista med inställningar visas på skärmen:

Använd piltangenterna  eller  för att välja en inställning.

Tryck på  för att starta proceduren.

Följande översikt förklarar de olika procedurerna:

3. Skapa en fullständig säkerhetskopiera

Gör en säkerhetskopiera av både Alloras programvara och data. Kontrollera att USB-minnet är anslutet till Allora.

4. Återställ säkerhetskopiera

Återställ säkerhetskopierad data från USB-minnet. Kontrollera att USB-minnet är anslutet till Allora.

5. Installera uppdatering

Om en ny version av Alloras inbyggda programvara finns tillgänglig kopierar du den först till ett USB-minne och installerar uppdateringen från minnet till Allora.

6. Säkerhetskopiera data

Detta lagrar endast Alloras data – såsom inspelningar, lagrade meddelanden och IR-koder – på ett USB-minne. Kontrollera att USB-minnet är anslutet till Allora.

7. Återställ data

Kopierar Alloras data från ett USB-minne tillbaka till Allora.

8. Återställ standardinställningar

Välj detta alternativ för att återställa Allora till standardvärdena. Detta rensar även alla data i Alloras minne.