

DaeSSy

Monteringsystem

- Enkelt, flexibelt och stabilt montage av datorer och pratapparater.
- Datorn kan lätt kopplas loss och flyttas mellan rullstol och bordsstativ.
- Färdiga monteringsplattor för många olika datorer och pratapparater.
- Alla stativ levereras med snabbkoppling men utan monteringsplatta

DaeSSy systemet finns i fem olika grundmodeller.



Fast montering.

Enkel, stabil och säker men ändå justerbar montering.

Kan fås med 90° böjt rör eller justerbar 90° led.

Kan utan verktyg lyftas, svängas åt sidan eller lyftas bort helt från rullstolen. Förmodligen ej av brukaren själv.



Svängbar montering.

Låses i position med en fjäderbelastad sprint. Sprinten kan frikopplas med hjälp av en wire under monteringsplattan.

Kan frikopplas och svängas åt sidan av brukaren själv eller av en assistent. Kan även lyftas bort från rullstolen.



Sidofällbar montering.

Stativet vinklas upp och placeras i läge framför brukaren. När utrustningen ej används kan stativet vinklas åt sidan och fällas ner. Vid transporter eller när det finns risk att slå emot utrustningen kan den även lyftas bort från rullstolen.



Bakåtfällbar montering.

Stativet vinklas fram och placeras i läge framför brukaren. När utrustningen ej används vinklas stativet åt sidan, fälls bakåt och in bakom ryggstödet. Utrustningen är då helt ur vägen och skyddad vid transporter.

Obs! På grund av tipprisk då stolen är tom bör denna modell endast användas på el.rullstolar.



Bordsstativ.

Ett enkelt stadigt stativ att placera utrustningen på när den inte skall användas på rullstolen. Höjd och vinkel på den monterade utrustningen kan justeras.



Artikelnummer

8501-1	Bordsstativ	8501-2	Fast stativ med rör.
8501-3	Fast stativ med led.	8501-4	Svängbart stativ
8501-5	Sidofällbart stativ.	8501-6	Sido/bakåtfällbart stativ

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49