

Leveransens innehåll

Kontrollera noga innehållet. Förpackningen ska innehålla följande:

- OPTIMA Styrkuleenhet med USB-kabel
- PS2-till-USBadapter
- Denna manual



Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se
Tel. 08 768 25 00

OPTIMA STYRKULA



Handledning

Produktbeskrivning

OPTIMA Styrkula är en styrkula med låg vikt och robust konstruktion som utformats med tanke på användare med motoriska svårigheter.

Optisk teknologi säkerställer precisa markörflyttningar och friktionsfria kulrörelser för en störningsfri användning.

Egenskaper

- Robust konstruktion med ergonomiskt utförande
- Pålitlig optisk teknologi utan mekaniskt slitage
- Precis styrning och markörhantering
- Stor, fritt löpande kula som kräver minimal beröringskraft
- Mjuka, friktionsfria kulrörelser
- Stor bottenplatta för maximal stabilitet
- Låg profil medför naturlig handställning för vilsam användning
- Knappar för vänster-, höger- och dragklick
- Färgkodade nedsänkta knappar för att undvika ofrivilliga tryck
- Ingångar för möjlighet till höger/vänsterklick med externa kontakter
- Känner automatiskt av PS2 eller USB
- Enkel ”plug and play” installation
- PC- och Mackompatibel.

Installation

Kontrollera att datorn är helt avstängd och inte bara i viloläge.

Anslut **OPTIMA STYRKULA** (om en PS2-ingång används måste den medföljande (eller annan) PS2-till-USB-adaptern användas).

När datorn startas kommer **OPTIMA STYRKULA** att automatiskt konfigureras för antingen USB eller PS2-ingång. Så snart datorn startas är n-ABLER styrkula klar att användas. Inga extra drivrutiner behöver installeras.

Rulla kort på styrkulan för att kontrollera att musmarkören svarar mot rörelsen.

Underhåll

OPTIMA STYRKULA har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.