

OPTIMAX JOYSTICK



RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se
Tel. 08 768 25 00

Avfallshantering
*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

Handledning

Produktbeskrivning



Optimax Joystick är en trådlös joystick som utformats direkt med tanke på användare med motoriska svårigheter.

Med en räckvidd på 10 meter kan **Optimax Joystick** användas antingen på skrivbordet eller som en mobil enhet.

Optimax Joystick är specifikt utformad för att med minsta möjliga kraft (0.5 Newton) utföra exakt markörflyttning och precisa rörelser för att handskas med objekt på datorskärmen.



Felsökning

Om OPTIMAX JOYSTICK inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enhetern fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Musmarkören rör sig inte – Lysdioden förblir tänd	<ul style="list-style-type: none">• Enheterna är inte parade. Följ instruktionerna i sektionen “Parning”
Musmarkören rör sig inte – Lysdioden lyser inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera anslutningen i datorn.• Enheterna är ev. inte korrekt parade. Följ instruktionerna i sektionen “Parning”
Musmarkören rör sig ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet kan vara slut – byt batteri.• Placera inte mottagarenheten för nära metallföremål eller utom räckhåll för joysticken.• Utom räckhåll – flytta joysticken närmare mottagarenheten.• Störningar från annan radioutrustning.• Gör en total omstart av datorn.
Enheterna låter sig inte paras – Lysdioden slocknar efter 15 sekunder och musmarkören rör sig inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att Joystickens hålls inom en meter från mottagaren under parningsprocessen.• Kontrollera batteriet – byt om det är dåligt.

Parning


OPTIMAX JOYSTICK använder sig av ett unikt överföringssystem för att inga störningar ska ske från närliggande enheter. Joysticken överför data med en kod och det är endast mottagaren som svarar mot denna kod.

För att fungera korrekt måste både joysticken och mottagaren använda sig av samma kod. Processen för att få två enheter att kommunicera med varandra kallas ”parning” och så snart denna kommunikationskod har lärts in behåller både joystick och mottagare denna information, även i avstängt läge eller när batteriet byts.

När OPTIMAX JOYSTICK levereras är enheterna redan parade men det finns tillfällen då det är nödvändigt att gå igenom processen igen – till exempel om en ny mottagare ska användas tillsammans med en befintlig joystick eller om någon av enheterna mot förmodan skulle ”glömma” bort koden.

För att para enheterna följ instruktionerna nedan:

1. Avlägsna luckan till batterifacket
2. Placera joysticken inom en meter från mottagaren.
3. Tryck in knappen på mottagarens undersida. Lysdioden (som är placerad ovanför anslutningskabeln) ska då blinka.
4. Tryck *kort* på knappen inuti joystickens batterifack inom 10 sekunder. Det är inte nödvändigt att röra på joysticken.
5. Efter en liten stund ska lysdioden lysa stadigt i fem sekunder och aktivering av markören återupptas. Sätt tillbaka locket på batterifacket.
6. Om lysdioden upphör att blinka efter c:a 15 sekunder och inte blinkar stadigt, upprepa proceduren från 3. Om det då fortfarande inte fungerar, gå till sektionen för Felsökning.

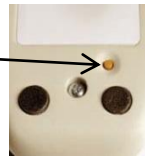

Egenskaper

- Störningsokänslig radioöverföring med c:a 10 meters räckvidd.
- Använder 2,4 GHz för radioöverföring
- Extremt känslig joystick, kräver endast 0,5 newton
- Mottagare med ingångar för två alternativa kontakter
- Exakt styrning och markörhantering
- Fyra hastigheter för markören
- Auditiv signal för hastighetsinställning
- Stor bottenplatta för maximal stabilitet
- Låg profil medför naturlig handställning för vilsam användning
- Knappar för vänster-, höger- och dragklick
- Färgkodade nedsänkta knappar för att undvika ofrivilliga tryck
- Ingångar i joysticken för möjlighet till höger/vänsterklick med externa kontakter
- Normalt sex månaders batteritid
- Enkel ”plug and play” installation
- Känner automatiskt av PS2 eller USB
- PC- och Mac-kompatibel.

Installation

Kontrollera att datorn är helt avstängd och inte bara i viloläge.

Anslut **OPTIMAX JOYSTICK** mottagarenhet (om en PS2-ingång används måste den medföljande (eller annan) PS2-till-USB-adaptern användas).

För att optimera räckvidden, undvik om möjligt att placera mottagarenheten bakom datorn eller i närheten av något stort metallföremål eller annan störningskälla, såsom mobiltelefon eller hubb för trådlöst nätverk.

1. Vänd på joystickenheten och avlägsna luckan till batterifacket med en skruvmejsel.
2. Sätt i ett 9-volts batteri av bra kvalitet i batterihållaren. Alkalinebatterier ger bästa livslängd. Vänta med att sätta tillbaka batteriluckan.
3. Sätt på datorn och låt den starta helt och hållet. Kontrollera att lysdioden på baksidan av mottagarenheten först lyser under några sekunder för att sedan slockna. Om den fortsätter att lysa, var vänlig gå till sektion "Parning".
4. Vicka på joysticksspaken för att kontrollera att musmarkören flyttar sig och sätt därefter tillbaka batteriluckan. **OPTIMAX JOYSTICK** är nu klar att användas. Om musmarkören inte rör sig, gå till sektionen "Felsökning".

Underhåll

OPTIMAX JOYSTICK har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.

Inställningar för hastighet

OPTIMAX JOYSTICK går att använda med fyra hastigheter. För att ändra markörens hastighet tryck in och håll ner dragklickknappen tills ett pip hörs och släpp sedan.

För att sedan sänka hastigheten tryck på knappen för vänsterklick (varje tryck sänker hastigheten ett steg).

För att öka hastigheten tryck på knappen för högerklick (varje tryck ökar hastigheten ett steg).

När önskad hastighet har uppnåtts, tryck in och håll nere dragklickknappen tills ett dubbelpip hörs. Hastigheten är nu inställd.

Leveransens innehåll

Kontrollera noga innehållet. Förpackningen ska innehålla följande:

- Optimax Joystick
- Optimax Joystick mottagarenhet med USB-kabel.
- PS2-till-USB-adapter
- T-handtag
- Handtag i form av en mjuk boll
- Denna manual

