

Felsökning

Om SimplyWorks Joystick inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enheterna fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte Musmarkören rör sig inte Lysdioden förblir tänd	<ul style="list-style-type: none">• Enheterna är inte parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"• Dåligt batteri i enheten SimplyWorks Joystick. Byt batteri!• Kontrollera USB-anslutningen.
Enheten fungerar ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten SimplyWorks Joystick eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Utom räckhåll – flytta Joysticken närmare mottagarenheten.• Störningar från annan radioutrustning eller annan störningskälla.• Kontrollera anslutningen i datorn.• Enheterna är ev inte korrekt parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"
Det går inte att para enheterna	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten SimplyWorks Joystick eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Kontrollera att enheterna befinner sig inom en meter från varandra .

RehabCenter AB

www.rehabcenter.se

info@rehabcenter.se

Tel. 08 768 25 00

Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

SIMPLYWORKS Joystick



Handbok

REHABCENTER AB

Produktbeskrivning

SimplyWorks är det första helintegrerade trådlösa systemet för datorstyrning speciellt utformat för personer med begränsade motoriska färdigheter.

SimplyWorks gör det möjligt att skapa en trådlös användarmiljö för en eller flera personer, vilket underlättar inlärnings/arbetsituationen.

SimplyWorks Joystick kan användas med alla SimplyWorks mottagare för datorstyrning eller för att styra leksaker eller andra batteridrivna apparater.

Innehåll vid leverans

Kontrollera att kartongen innehåller följande delar.

- ❖ SimplyWorks Joystick
- ❖ T-handtag och mjuk gummiboll
- ❖ Manual

Egenskaper

- Fungerar med alla SimplyWorks mottagare för styrning av datorer, leksaker eller andra batteridrivna apparater
- Högkvalitativ radiolänk med störningsfri räckvidd på över 10 meter
- Känslig joystick, kräver endast 0,5 newton
- Fyra hastigheter för markören
- Auditiv signal för hastighetsinställning
- Färgkodade, nedsänkta knappar för att minska risken för ofrivilliga tryckningar
- Ingångar i enheten för möjlighet till höger/vänsterklick med externa kontakter
- Enkel ”plug and play” installation
- Känner automatiskt av PS2 eller USB

Kompatibilitet


Fungerar med alla SimplyWorks mottagare för styrning av datorer, leksaker eller andra batteridrivna apparater

Byte av batteri

Avlägsna batteriluckan på undersidan av enheten. Sätt i ett 9-volts batteri av hög kvalitet. Om inte apparaten ska användas inom en rimlig tid är det klokt att ta ur batteriet för att förhindra att det läcker, vilket kan skada enheten.



Parning

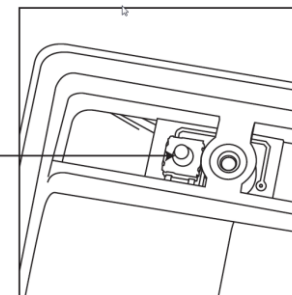

Knapp för parning

Innan SimplyWorks Joystick kan användas måste den paras med någon av SimplyWorks mottagarenheter (RECEIVE, CONTROL LITE, CONTROL, CONTROL PRO). För att para enheterna följ instruktionerna som följer:

1. Avlägsna batteriluckan på undersidan av SimplyWorks Joystick
2. Placera mottagarenheten inom en meter från SimplyWorks Joystick
3. Tryck snabbt på parningsknappen på mottagarenheten. Parningslampan på mottagarenheten börja nu blinka långsamt.
4. Inom tio sekunder, tryck kort på parningslampan på insidan av batterifacket på SimplyWorks Joystick.
5. Inom kort kommer parningslampan på mottagarenheten att lysa med ett fast sken i fem sekunder för att meddela att parningen är genomförd.
6. Om parningslampan slutar att blinka och inte börja lysa med fast sken, upprepa proceduren från punkt 3. Om det fortfarande inte lyckas, vänligen se avsnittet ”Felsökning”.

Inställningar för hastighet

SimplyWorks Joystick går att använda med fyra hastigheter. För att ändra markörens hastighet, håll in dragklickknappen tills ett pip hörs och släpp sedan.

För att sänka hastigheten, tryck på knappen för vänsterklick (varje tryck sänker hastigheten med ett tryck). För att öka hastigheten, tryck på knappen för högerklick (varje tryck ökar hastigheten med ett tryck).

När önskad hastighet uppnåtts, håll åter in dragklickknappen tills ett pip hörs. Hastigheten är nu inställd.

Underhåll

SimplyWorks Joystick har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.