

Felsökning

Om SimplyWorks Styrkula inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enheterna fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte Musmarkören rör sig inte Lysdioden förblir tänd	<ul style="list-style-type: none">• Enheterna är inte parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"• Dåligt batteri i enheten SimplyWorks Styrkula. Byt batteri!
Enheten fungerar ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten SimplyWorks Styrkula eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Utom räckhåll – flytta styrkulan närmare mottagarenheten.• Störningar från annan radioutrustning eller annan störningskälla. • Kontrollera anslutningen i datorn.• Enheterna är ev inte korrekt parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"
Det går inte att para enheterna	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten SimplyWorks Styrkula eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Kontrollera att enheterna befinner sig inom en meter från varandra .

RehabCenter AB

www.rehabcenter.se

info@rehabcenter.se

Tel nr: 08 768 25 00

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

SIMPLYWORKS STYRKULA



Handbok

REHABCENTER AB

Produktbeskrivning

SimplyWorks är det första helintegrerade trådlösa systemet för datorstyrning speciellt utformat för personer med begränsade motoriska färdigheter.

SimplyWorks gör det möjligt att skapa en trådlös användarmiljö för en eller flera personer, vilket underlättar inlärnings/arbetsituationen.

SimplyWorks styrkula kan användas med alla SimplyWorks mottagare för datorstyrning eller för att styra leksaker eller andra batteridrivna apparater.

Innehåll vid leverans

Kontrollera att kartongen innehåller följande delar.

- ❖ SimplyWorks Styrkula
- ❖ Manual

Egenskaper

- Fungerar med alla SimplyWorks mottagare för styrning av datorer, leksaker eller andra batteridrivna apparater
- Högkvalitativ radiolänk med störningsfri räckvidd på över 10 meter
- Stor, fritt löpande kula som kräver minimal beröringskraft
- Mjuka, friktionsfria kulrörelser
- Färgkodade, nedsänkta knappar för att minska risken för ofrivilliga tryckningar




Kompatibilitet

Fungerar med alla SimplyWorks mottagare för styrning av datorer, leksaker eller andra batteridrivna apparater

Byte av batteri

Avlägsna batteriluckan på undersidan av enheten. Sätt i ett 9-volts batteri av hög kvalitet. Om inte apparaten ska användas inom en rimlig tid är det klokt att ta ur batteriet för att förhindra att det läcker, vilket kan skada enheten.

Parning

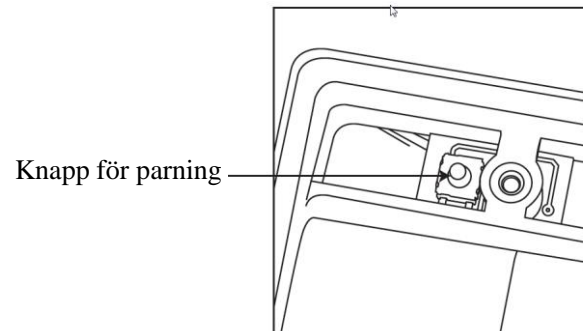

Innan SimplyWorks styrkula kan användas måste den paras med någon av SimplyWorks mottagarenheter (RECEIVE, CONTROL LITE, CONTROL, CONTROL PRO). För att para enheterna följ instruktionerna som följer:

1. Avlägsna batteriluckan på undersidan av SimplyWorks Styrkula
2. Placera mottagarenheten inom en meter från SimplyWorks Styrkula
3. Tryck snabbt på parningsknappen på mottagarenheten. Parningslampan på mottagarenheten börja nu blinka långsamt.
4. Inom tio sekunder, tryck kort på parningslampan på insidan av batterifacket på SimplyWorks Styrkula.
5. Inom kort kommer parningslampan på mottagarenheten att lysa med ett fast sken i fem sekunder för att meddela att parningen är genomförd.
6. Om parningslampan slutar att blinka och inte börjar lysa med fast sken, upprepa proceduren från punkt 3. Om det fortfarande inte lyckas, vänligen se avsnittet ”Felsökning”.

Underhåll

SimplyWorks Styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.