

Felsökning

Om CONTROL LITE inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enheterna fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Inte parat med någon sändare. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"• Dåligt batteri i enheten SEND. Byt batteri!• Kontrollera USB-anslutningen!
Enheten fungerar ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten SEND eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Utom räckhåll – flytta SEND närmare mottagarenheten.• Störningar från annan störningskälla.
Det går inte att para enheterna – LED-fönstret slocknar efter 30 sekunder	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri – Byt batteri!• Kontrollera att enheterna befinner sig inom en meter från varandra vid parning.

Underhåll

CONTROL LITE har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.

Begränsningar för utgående kapacitet

3,5mm-utgångens maximala kapacitet är 1.0A/30V. Om denna nivå överskrids kan det orsaka permanenta skador och ersätts inte.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se
Tel nr: 08 768 25 00

SIMPLYWORKS CONTROL LITE



Handbok

REHABCENTER AB

Produktbeskrivning

SimplyWorks är det första helintegrerade trådlösa systemet för datorstyrning speciellt utformat för personer med begränsade motoriska färdigheter.

SimplyWorks gör det möjligt att skapa en trådlös användarmiljö för en eller flera personer, vilket underlättar inlärnings/arbetsituationen.

CONTROL LITE kan användas med alla SimplyWorks sändare för att styra batteridrivna leksaker och apparater, förutsatt att de är försedda med en 3,5 mm kontakt.

CONTROL LITE är enkel att använda men ta gärna lite tid att läsa igenom denna handledning för att kunna utnyttja CONTROL LITE optimalt.

Innehåll vid leverans

Kontrollera att kartongen innehåller följande delar.

- ❖ CONTROL LITE
- ❖ Sladd med 3,5 mm kontakter
- ❖ Manual

• Egenskaper

- CONTROL LITE fungerar med alla SimplyWorks sändare för att styra batteridrivna leksaker och apparater
- 3,5 mm utgångskontakt via medföljande kabel
- Tillräckligt liten för att sättas fast på en batteridrivna leksak
- 10 meters räckvidd
- Automatisk energisparläge – ingen AV/PÅ-knapp
- Lång batteritid


Kompatibilitet

Även om CONTROL LITE har specialutformats för att användas tillsammans med SWITCH 125 fungerar den med alla SimplyWorks sändare. Till exempel, om den paras med ett tangentbord aktiveras den med mellanslagstangenten eller om den paras med en SimplyWorks Styrkula aktiveras den med vänsterklick.

Byte av batterier

Vänd på enheten, avlägsna luckan till batterifacket genom att skjuta det bakåt. Sätt i två AAA-batterier av bra kvalitet i batterihållaren. Kontrollera att de är monterade åt rätt håll. Sätt tillbaka batteriluckan!

Om inte apparaten ska användas inom en rimlig tid är det klokt att ta ur batterierna för att förhindra att de läcker, vilket kan skada enheten.

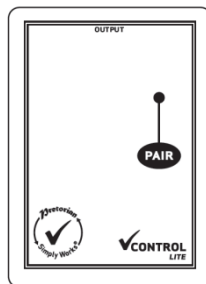


Parning

Innan CONTROL LITE kan användas måste den paras med någon av SimplyWorks sändare. För att para enheterna följ instruktionerna som följer:

1. Placera sändaren i närheten av CONTROL LITE
2. Tryck snabbt på parningsknappen (A) på frontpanelen på CONTROL LITE. Parningslampan (B) börjar nu blinka långsamt.
3. Inom tio sekunder, tryck kort på parningslampan på sändaren.
4. Parningslampan på CONTROL LITE kommer att fortsätta blinka en kort stund under det att den söker efter sändaren.
5. Inom kort kommer parningslampan på mottagarenheten att lysa med ett fast sken i tio sekunder för att meddela att parningen är genomförd.
6. CONTROL LITE är nu klar att användas. Varje gång data överförs till CONTROL LITE blinkar parningslampan för att ge en visuell signal om att den trådlösa enheten fungerar som den ska.
7. Om parningslampan slutar att blinka efter 30 sekunder och inte börjar lysa med fast sken, upprepa proceduren från punkt 2. Om det fortfarande inte lyckas, vänligen se avsnittet ”Felsökning”.

Parningsinformationen lagras i CONTROL LITE även efter batteribyte.

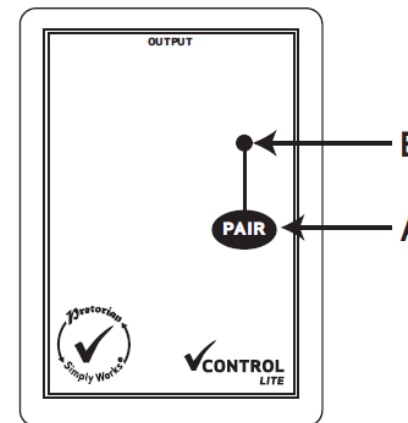

Att använda med SWITCH 125 eller SEND

I de flesta fall kommer CONTROL LITE att användas med en SEND eller SWITCH 125. Det spelar ingen roll vilket läge dessa är inställda för, CONTROL LITE fungerar ändå.