

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se
Tel. 08 768 25 00

Avfallshantering
*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

SIMPLYWORKS CONTROL



Handbok

REHABCENTER AB

Produktbeskrivning

SimplyWorks är det första helintegrerade trådlösa systemet för datorstyrning speciellt utformat för personer med begränsade motoriska färdigheter.

SimplyWorks gör det möjligt att skapa en trådlös användarmiljö för en eller flera personer, vilket underlättar inlärnings/arbetsituationen.

CONTROL kan användas med alla SimplyWorks sändare för att styra batteridrivna leksaker och apparater, förutsatt att de är försedda med en 3,5 mm kontakt.

CONTROL är enkel att använda men ta gärna lite tid att läsa igenom denna handledning för att kunna utnyttja CONTROL optimalt.

Innehåll vid leverans

Kontrollera att kartongen innehåller följande delar.


- ❖ CONTROL
- ❖ Sladd med 3,5 mm kontakter
- ❖ Manual

• Egenskaper

- CONTROL fungerar med alla SimplyWorks sändare för att styra batteridrivna leksaker apparater
- Alternativa styrlägen i form av *direkt* (aktivering under pågående tryckning), *AV/PÅ*, *tidsinställd* (minuter) och *tidsinställd* (sekunder)
- Valbar längd för tidsinställning
- 3,5 mm utgångskontakt via medföljande kabel
- Tillräckligt liten för att sättas fast på en batteridrivna leksak
- 10 meters räckvidd
- Automatisk energisparläge – ingen AV/PÅ-knapp
- Lång batteritid

Kompatibilitet

Även om CONTROL har specialutformats för att användas tillsammans med SWITCH 125 fungerar den med alla SimplyWorks sändare. Till exempel, om den paras med ett tangentbord blir mellanslagstangenten aktiveringstangenten eller om den paras med en SimplyWorks Styrkula blir vänsterknappen aktiveringskontakten.

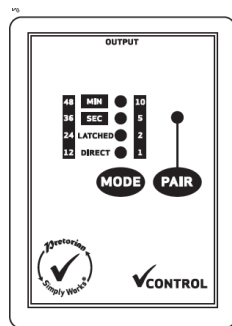

Underhåll

CONTROL har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.

Begränsningar för utgående kapacitet

3,5mm-utgångens maximala kapacitet är 1.0A/30V. Om denna nivå överskrids kan det orsaka permanenta skador och ersätts inte.

Byte av batterier

Vänd på enheten, avlägsna luckan till batterifacket genom att skjuta det i pilens riktning. Sätt i två AAA-batterier av bra kvalitet i batterihållaren. Kontrollera att de är monterade åt rätt håll. Sätt tillbaka batteriluckan!


Om inte apparaten ska användas inom en rimlig tid är det klokt att ta ur batterierna för att förhindra att de läcker, vilket kan skada enheten.

Parning

Innan CONTROL kan användas måste den paras med någon av SimplyWorks sändare. För att para enheterna följ instruktionerna som följer:

1. Placera sändaren i närheten av CONTROL
2. Tryck snabbt på parningsknappen (C) på frontpanelen på CONTROL . Parningslampan (D) börjar nu blinka långsamt.
3. Inom tio sekunder, tryck kort på parningslampan på sändaren.
4. Parningslampan på CONTROL kommer att fortsätta blinka en kort stund under det att den söker efter sändaren. Inom kort kommer parningslampan på mottagarenheten att lysa med ett fast sken i tio sekunder för att meddela att enheterna har hittat varandra. CONTROL är nu klar att användas. Varje gång data överförs till CONTROL blinkar parningslampan för att ge en visuell signal om att den trådlösa enheten fungerar som den ska.
5. Om parningslampan slutar att blinka efter 30 sekunder och inte börjar lysa med fast sken, upprepa proceduren från punkt 2. Om det fortfarande inte lyckas, vänligen se avsnittet ”Felsökning”.

Parningsinformationen lagras i CONTROL även efter batteribyte.

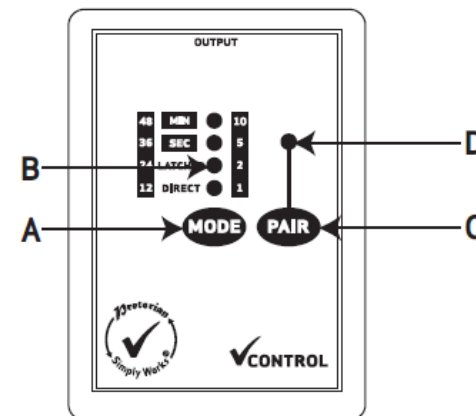

Att ställa in styrlägen

CONTROL erbjuder fyra lägen för styrning.

Direkt (Direct) Apparaten aktiveras när kontakten trycks in och stängs av när kontakten släpps, dvs aktivering under pågående tryckning. Detta är standardinställning.

AV/PÅ (Latched) Apparaten aktiveras vid första trycket på kontakten och stängs av vid nästa tryck.

Tidsinställd (sekunder) (Sec) När kontakten trycks in aktiveras apparaten under det antal sekunder som angivits. Tiden förlängs inte genom att knappen trycks in fler gånger under pågående aktiveringstid.

Tidsinställd (minuter) (Min) När kontakten trycks in aktiveras apparaten under det antal minuter som angivits. Tiden förlängs inte genom att knappen trycks in fler gånger under pågående aktiveringstid.

Att ange tidsinställningen

För att ändra den angivna tiden, tryck in och håll lägesknappen (A) tills lamporna (B) lyser. Tidsperioden kan enkelt läsas av i rutan bredvid den översta lampan som lyser, antingen i sekunder eller i minuter beroende på inställning. Efter fyra sekunder slocknar lampan för att spara batteri. För att ändra tidsinställningen, tryck igen kort på lägesknappen medan lampan fortfarande lyser och upprepa tills det önskade antalet visas vid lamporna. Efter ytterligare fyra sekunder slocknar lamporna och tidsinställningen är sparad.

Att använda med SWITCH 125 eller SEND

I de flesta fall kommer CONTROL att användas med en SEND eller SWITCH 125. Det spelar ingen roll vilket läge dessa är inställda för, CONTROL fungerar ändå.

Felsökning

Om CONTROL inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enheterna fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Inte parat med någon sändare. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"• Dåligt batteri i enheten CONTROL. Byt batteri!• Kontrollera USB-anslutningen!
Enheten fungerar ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri antingen i enheten CONTROL eller i någon mottagardel. Byt batteri!• Utom räckhåll – flytta CONTROL närmare mottagarenheten.• Störningar från annan störningskälla.
Det går inte att para enheterna – LED-fönstret slocknar efter 30 sekunder	<ul style="list-style-type: none">• Dåligt batteri – Byt batteri!• Kontrollera att enheterna befinner sig inom en meter från varandra vid parning.