


SCATIR Switch

Beröringsfri manöverkontakt

SCATIR Switch är ett styrsätt för personer som helt saknar förmåga att trycka på kontakter. Det räcker att viljemässigt kunna blinka, att röra ett ögonbryn eller ett finger intill sensorn.

SCATIR Switch ansluts via en sladd med en 3,5 mm kontakt till apparaten som skall styras. SCATIR Switch används ofta för att styra apparater som t.ex. ett larm, en omgivningskontroll eller en samtalsapparat på samma sätt som görs med en vanlig kontakt som t.ex. en JellyBean eller liknande manöverkontakt. Skall en 220v el.apparat styras måste en reläbox användas.

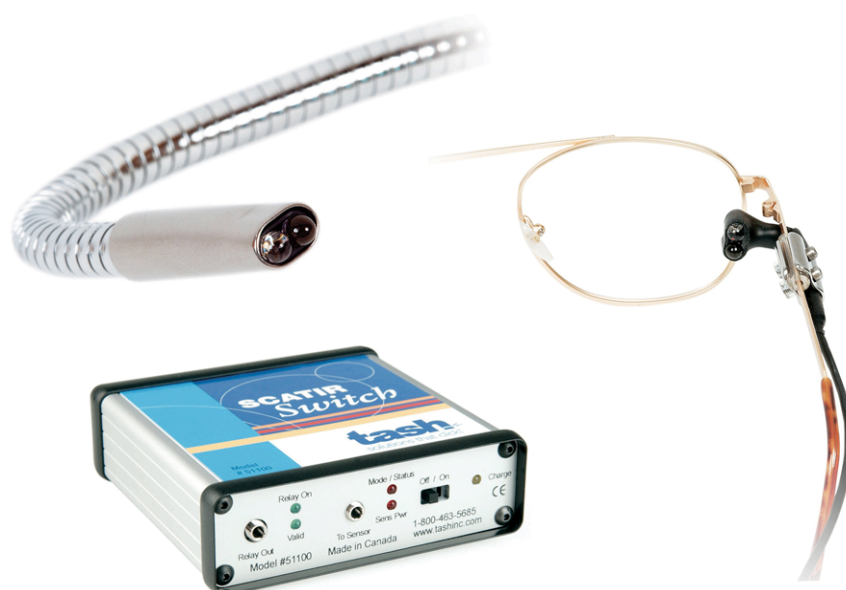

SCATIR Switch är beröringsfri och aktiveras genom att en infraröd ljusstråle reflekteras mot en kroppsdel. SCATIR Switch levereras med två alternativa sensorer. En är monterad på en flexibel arm och den andra på en glasögonbåge. Hållare för montering av flexiarmen medföljer.

Kroppsdelens som skall aktivera SCATIR Switch kan vara på från några mm och upp till fem cm avstånd från sensorn. En minimal rörelse räcker för att aktivera SCATIR Switchen.

SCATIR Switch kalibreras automatiskt vid start och avger en auditiv feedback vid aktivering. Den auditiva feedbacken kan stängas av. SCATIR Switch drivs med ett laddningsbart batteri.

SCATIR Switch är helt komplett vid leverans. Sensor på flexiarm med monteringsdetaljer och sensor på glasbåge, anslutningskabel, laddningsbart Ni/Mh batteri och laddare ingår.

Artikelnummer

4635-10 SCATIR Switch

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se