

Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan kontakten returneras för service. Om kontakten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. (Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer kontakten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

Garanti

BIG Red, Jelly Bean och Specs Switch har ett års garanti mot fabrikationsfel. Efter reparation är garantin 90 dagar.

**Kontakta gärna RehabCenter AB
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00
Fax. 08 - 792 49 49**

Användarvägledning

BIG Red[®]

Jelly Bean[®]

och

Specs[™] Switch

Introduktion

Big Red[®], Jelly Bean[®] och Specs[™] switch kan användas för att styra:

- 220v elektriska apparater som kopplas via en godkänd styrbox.
- Batteridrivna leksaker eller apparater som ansluts via en batterikabel.
- Talapparater med 3,5mm kontakt för anslutning av extra manöverkontakt.
- Datorer via ett switch interface.
- Diaprojektorer som kan förses med adapter för fjärrstyrning.

Det finns många olika sätt att montera och fästa kontakterna i rätt position. På en slät yta kan kontakterna fästas med tre skruvar, med ett självhäftande mtrl som HandiTak[®], Dual Lock[™] eller UltraStick[™]. Man kan även använda en av monteringsarmarna SlimArmstrong[®] eller Universalarmen.

Styrboxar, batterikabel, switchinterface för datorer och vissa projektorer samt alla olika alternativen på fästnanordningar kan beställas från RehabCenter AB.

Individuella egenskaper hos de olika switcharna

Specs: Alternativa bottenplattor.

Tre olika bottenplattor medföljer Specs[™] switch. Dessa möjliggör många olika monteringsalternativ. För att byta botten skall de tre skruvarna på undersidan lossas. På bottenplattorna finns styrtappar som skall passas in i motsvarande hål i switchen. Se till att kabel ligger i sitt spår. Fäst därefter den nya plattan med de tre skruvarna. Använd aldrig en switch utan bottenplatta som skyddar kabel och mekanism.

Bottenplatta med fläns.

Bottenplattan med fläns har större diameter än switchen för att underlätta montering. Plattan med fläns kan fästas som beskrivits ovan.

Bottenplatta för ett band.

Bottenplattan för ett band används för att underlätta montering av switchen på t.ex ett arm eller nackstöd på en rullstol. Ett fjädrande velcro[™] band ingår. Extra band kan köpas som tillbehör. Vid montering av bandet skall det vändas så att den mjuka sidan kommer mot användarens hud. Om bandet klipps av kan änden smältas med en tändsticka för att förhindra att bandet repas upp.

OBS! Var försiktig så bandet ej börjar brinna. Låt bandet svalna ordentligt innan det kommer i kontakt med användaren.

Liten bottenplatta utan fläns.

Den lilla plattan har samma diameter som switchen. Den kan användas tillsammans med två switchar skall monteras med minsta möjliga avstånd. Den kan ofta monteras med självhäftande mtrl. mot ett slätt underlag.

Big Red[®] anpassning av kabellängd.

På undersidan av Big Red[®] finns ett spår i vilket överbliven kabel kan ligga.

Säkerhetstips

- Läs instruktioner för apparater som kopplas till en switch före användning.
- Var uppmärksam om en apparat som rör sig eller avger värme placeras nära en switchanvändare.
- Använd aldrig en Big Red[®], Jelly Bean[®] eller Specs[™] switch, en styrbox eller leksak eller annan el.apparat i eller intill vatten där de kan bli blöta.

Skötsel och förvaring

För att rengöra Big Red[®], Jelly Bean[®] eller Specs[™] switch skall en torr eller ett mildt rengöringsmedel användas. **Spola aldrig en switch med vatten.** **Tag aldrig bort den färgade toppen på switchen.** Koppla alltid bort switchen från alla utrustningar före rengöring.

Felsökning

Om ansluten utrustning eller apparat slutar fungera kan följande kontroller göras:

- Kontrollera alla elektriska kopplingar, kablar och kontakter.
- Kontrollera placeringen av ev. batterikabel i batterifacket på en leksak.
- Kontrollera att alla till/från knappar är i läge till.
- Prova ansluten apparat utan inkopplad switch för att kontrollera funktionen.
- Prova batterikabel eller styrbox genom att ansluta en annan switch.