
Användarvägledning

BIGmack

Ett hjälpmedel
för träning och kommunikation
med
ett talat meddelande

**Kontakta gärna RehabCenter AB
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00
Fax. 08 - 792 49 49**

Innehållsförteckning

Innehåll	Sidan
BIGmack, presentation	2
BIGmack, möjligheter	3
Hur använder man BIGmack ?	4
Att börja	4
Spela in ett meddelande	4
Att ansluta och styra andra el.apparater	5
Spela upp ett meddelande	6
Extra switch	6
Extra högtalare	6
Montagemöjligheter	7
Felsökning	8
Skötsel	9
Garanti	9
Kundservice - reparationer - returer	10

Att använda denna vägledning

Denna vägledning är till för att förenkla handhavandet av BIGmack. Den kan även ge tips och kanske någon ny idé angående användningsområden. Var snäll och läs hela vägledningen samt spara den för framtida behov.

Vi välkomnar alla synpunkter, idéer och förslag på nya användningsområden från alla BIGmack användare.

Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. (Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

Skötsel och lagring

BIGmack kommer att fungera under lång tid med ett minimum av service.

En inspelning lagras tills den spelas över av en ny.

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals meddelanden, lite beroende på meddelandelängden. T.ex : 2.800 femsekunds, 1.400 tiosekunds eller 700 tjugosekunds meddelanden.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

Om en BIGmack inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

BIGmack får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

BIGmack får ej dränkas i vatten !

Garanti

BIGmack har ett års garanti mot fabrikationsfel.

Presentation av BIGmack

BIGmack konstruerades som ett svar på förfrågningar från våra kunder angående ett enkelt talande hjälpmedel.

BIGmack är idealisk för :

- Någon som just börjat använda en switch.
- Den som just börjat utveckla sin kommunikationsförmåga.
- Att använda som en möjlighet att väcka uppmärksamhet.

BIGmack är enkel att använda och har god ljudkvalitet. Det är enkelt att ändra talmeddelande för olika situationer. Några exempel på användning av BIGmack är.

- Att säga hej till kamrater och familj.
- Be om hjälp med olika saker.
- Beställa mat i cafeterian.
- Ropa på ett husdjur.
- Säga ett ord eller fras som upprepas i en sång eller lek.

Att ofta ändra / byta meddelanden ger användaren större möjligheter att använda sin BIGmack.

När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för användaren lämplig röst. T.ex barnröst för barn.

Hur använder man BIGmack ?

Börja med att.

Skruva loss den stora mässingsskruven på undersidan av BIGmack och tag bort batteriluckan. Sätt i ett nio-volts batteri. Kontrollera att batteriet kopplas rätt, se + och - symbolerna. Sätt batteriluckan på plats och skruva fast den igen. BIGmack är nu klar för inspelning.

Spela in ett meddelande.

Meddelanden på upp till tjugo sekunder kan spelas in. Detta motsvarar ca 25 - 30 ord. Om meddelandet blir mer än tjugo sekunder kommer BIGmack att automatiskt avsluta mitt i meddelandet.

Vid tveksamhet, tag tid på meddelandet före inspelning.

Vad du gör	Vad som sker	Tips
Tryck in record knappen först och sedan överdelen på BIGmack. Håll ner bägge under inspelningen.	Inspelningskretsen aktiveras.	
Tala i den inbyggda mikrofonen.	Meddelandet spelas in.	Rikta talet mot mikrofonen. Max tal tid är 20 sekunder eller ca 25 - 30 ord.
Släpp både knapp och överdel när meddelandet klart.	Inspelningen slutar.	
Tryck ner och släpp överdelen på BIGmack igen.	Meddelandet spelas upp	Detta steg klargör BIGmack för användaren och förlänger batteriets livslängd.

Felsökning

Om BIGmack inte fungerar. Gå först igenom följande punkter. Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB. Tel 08 - 768 25 00.

Problem

BIGmack återger ej inspelat meddelande

Lösning

1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.
2. Spela in meddelandet på nytt.
3. Skruva upp volymkontrollen till max.
4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Koppla ur den och prova BIGmack igen.
5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ”switch ”
6. Om yttre högtalare används. Koppla ur dessa och prova BIGmack igen.

BIGmack talar men säger fel meddelande.

Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 sek, sätt i batteriet och spela in på nytt.

Bara en del av meddelandet spelades in.

Meddelandet var längre än 20 sekunder. Spela in ett kortare meddelandet. Om ”recordknappen”släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet.

Byt batteri.

Talet går saktare.

Byt batteri

Meddelandet upprepas utan nya tryck på BIGmack.

Byt batteri

On/Off

On/Off kontrollen är samtidigt volymkontroll. BIGmack bör stängas av helt när den inte används. Det görs genom att kontrollen vrids till det klickar till i off läge. Detta förhindrar dels att BIGmack talar p.g.a ett tryck av misstag och dels minskar strömförbrukningen.

Yttre manöverkontakter

Alla manöverkontakter med 3,5 mm plugg kan användas för att aktivera BIGmack. Koppla in manöverkontakten i kontakten märkt "switch". BIGmack fungerar som vanligt även om extra manöverkontakt är ansluten.

Extra högtalare

Extra högtalare med plugg som passar till urtaget märkt "speaker" kan anslutas till BIGmack. Högtalare med inbyggd batteridrivnen förstärkare är bra i bullriga miljöer. T.ex för att "HEJA" på sitt favoritlag i någon sport. Kontakta gärna RehabCenter AB för tips om lämpliga högtalare.

Montagemöjligheter

BIGmack har tre gängade hål på undersidan. Dessa passar till fästplattan som medföljer Universalarmen från RehabCenter AB. Universalarmen är mkt flexibel och kan fästas på ett bord eller rör.

BIGmack kan monteras med Duallock, ett kardborrliknande mtrl.

Även UltraStick som är ett dubbelsidigt självhäftande mtrl kan användas. UltraStick kan rengöras och återanvändas många gånger.

Såväl UltraStick som DualLock kan beställas från RehabCenter AB.

Kabel anslutning: Batteridrivna utrustningar för direktkontroll

En batteridrivnen leksak eller utrustning kan anslutas till BIGmack med kabel för batteridrivnen leksak (kabel kan fås från RehabCenter). Ansluten på detta sätt kommer leksaken att vara aktiverad lika länge som meddelandet varar.

Vad du gör	Vad som sker	Tips
Placera kopparbiten på batterikabeln mellan batterierna i leksaken. Kontrollera att till/från knappen är tillslagen.		Fila ett spår i batterifacket på leksaken för att förhindra att kabeln kläms och skadas.
Koppla batterikabeln från leksaken till BIGmack-kabeln som sedan ansluts till kontakt märkt toy/appl. på BIGmack.		BIGmack kabeln ingår i BIGmack leveransen.
Aktivera BIGmack	Meddelandet spelas upp och leksaken aktiveras.	

Kabel anslutning: 220v el. utrustningar för kontroll via styrbox

En 220v el.apparat måste alltid anslutas via godkänd styrbox.

Vad du gör	Vad som sker	Tips
Koppla in styrboxen till 220v uttag. Koppla in el.apparaten i styrboxen Se till att till/från knappen på el.apparaten är tillslagen.		Se bruksanvisningen till styrboxen för mer information. Ibland måste till/från knappen fästas med tape eller liknande.
Koppla BIGmack-kabelns ena ände till styrboxen och den andra till kontakt märkt Toy/Appl. på BIGmack.		BIGmack kabeln ingår i BIGmack leveransen.
Aktivera BIGmack	Meddelandet spelas upp och el.apparaten aktiveras.	Styrboxens inställning avgör hur länge el.-apparaten är aktiverad.

Möjligheter med BIGmack

BIGmack är konstruerad och tillverkad för samma pålitlighet och kvalitet som t.ex JellyBean och BIG kontaktarna. Detta innebär att BIGmack är :

Enkel att använda

Tryck ner recordknappen och BIGmack´s överdel samtidigt som du talar i mikrofonen. Släpp och BIGmack är klar att använda. (se även sid 4)

Känslig

Den färgglada överdelen är lika lätttryckt över hela sin yta. Ett tryck spelar upp hela meddelandet. För att repetera, bara tryck igen. Kontinuerligt tryck startar ej en repetition.

Tyst eller högljudd

Justera volymen till lämplig nivå. I bullriga omgivningar kan extra högtalare enkelt anslutas för att erhålla bättre ljud vid högre volym.

Flexibel

Valfri manöverkontakt med 3,5mm´s telepropp kan anslutas för aktivering.

Hållbar

Det splitterfria plasthöljet är enkelt att hålla rent.

Ett redskap för förstärkt orsak/verkan träning

BIGmack kan aktivera en leksak eller annan el.apparat samtidigt som det inspelade meddelandet återges.

Spela upp meddelandet

BIGmack kan aktiveras på följande sätt :

Vad du gör	Vad som sker	Tips
Tryck ner och släpp BIGmack .	Meddelandet spelas upp.	BIGmack är klar för nästa uppspelning.
Tryck ner och håll kvar BIGmack.	Meddelandet spelas upp.	BIGmack måste släppas före nästa uppspelning.
Tryck ner BIGmack många gånger	Meddelandet spelas upp	Meddelandet upprepas
Koppla in och använd en yttre manöverkontakt.	Meddelandet spelas upp	Switchen kopplas in i urtaget på sidan av BIGmack.

Använda extra yttre switch

Extra manöverkontakt med 3,5 mm plugg kan anslutas till BIGmack. Kontakten kopplas in på sidan av BIGmack i urtaget märkt ” Switch ”. Användaren kan sedan aktivera BIGmack antingen genom tryck på switchen eller på överdelen av BIGmack.

Extra högtalare

När det krävs hög volym från BIGmack bör extra högtalare och kanske även en förstärkare användas. Som exempel när högre ljud behövs kan nämnas t.ex för Hejaramsor vid sportevenemang. Kontakta RehabCenter AB för lämplig utrustning