

Att spela in

- Stoppa i ett överlägg och slå på GoTalk.
- Tryck på inspelningsknappen så gröna lampan tänds. Tryck på önskad meddelanderuta så röda lampan tänds-släcks-tänds igen. Släpp rutan och läs in en fras. Tryck på en annan ruta för att avsluta inspelningen. Inlästa fraser sparas även om GoTalk stängs av och batterierna tas ur.
- För bästa inspelning skall volymkontrollen stå på låg till medelhög volym. Försök undvika att göra inspelningar i bullriga miljöer.
- GoTalk4 spelar in när röda lampan tänds andra gången för att undvika att spela in ljud från tryck på inspelningsknappen.
- Den gula meddelandeknappen under handtaget kan lagra ett meddelande som alltid behöver vara tillgängligt oberoende av vilken nivå som är aktiv.
- Inspelningslås kan förhindra oavsiktlig radering av inspelade meddelanden. Aktiveras genom att inspelningsknappen hålls ner till gröna nivå-lampan tänds. Tryck sedan på knappen volym upp. Inspelningslåset avbryts om GoTalk 4 stängs av minst 40 sekunder och sedan sätts på igen.
- Stäng av GoTalk4 om den inte används dagligen.
- Tag ur batterierna om GoTalk4 skall lagras längre än två månader.