



Nio eller fyra meddelanderutor för lagring av inspelat tal.

**RehabCenter AB**  
Enhags vägen 18, 187 40 TÄBY  
Tel. 08-768 25 00 Fax 08-792 49 49

## **Instruktioner**

- Nio rutor och fyra nivåer ger 36 fraser.
- Fras ett och två på varje nivå har femton sek. inspelningstid. Fras 3-9 har åtta sek.var.
- Ett tryck på nivåknappen visar nuvarande nivå. Ett tryck till byter till nästa nivå.
- Inspelningslås gör det svårare att radera en fras av misstag. Låses med tryck på inspelning så gröna lampan tänds, tryck därefter på volym upp. För upplåsning, stäng av GoTalk, vänta 30 sek och slå sedan på GoTalk igen.
- Överlägg förs in i springan på höger sida. Använd ett överlägg för varje nivå. Extra överlägg kan placeras under det som används.
- Vi föreslår att batterierna tas ur om GoTalk inte skall användas på flera månader.

### **Att spela in**

- Stoppa i ett överlägg och slå på GoTalk.
- Tryck på inspelningsknappen så gröna lampan tänds. Tryck på önskad meddelanderuta så röda lampan tänds-släcks-tänds igen. Släpp rutan och läs in en fras. Tryck på valfri ruta för att avbryta inspelningen. Inlästa fraser sparas även om GoTalk stängs av och batterierna tas ur.
- För bästa inspelning skall volymkontrollen stå på låg till medelhög volym.