

## Att använda Pocket GoTalk

- Stoppa i ett överlägg och slå på PocketGoTalk.
- **Att spela in**
- Tryck på inspelningsknappen så att den första gröna nivålampan tänds. Tryck på önskad meddelanderuta så röda lampan vid rutan tänds-släcks-tänds igen. Släpp rutan och läs in en fras. Tryck på en annan ruta för att avsluta inspelningen. Inlästa fraser sparas även om PocketGoTalk stängs av och batterierna tas ur.
- För bästa inspelning skall volymkontrollen stå på låg till medelhög volym. Försök undvika att göra inspelningar i bullriga miljöer.
- PocketGoTalk spelar in när röda lampan tänds andra gången för att undvika att spela in ljud från tryck på inspelningsknappen.
- Stäng av PocketGoTalk om den inte används dagligen.
- Tag ur batterierna om PocketGoTalk skall lagras längre än två månader.

